



DYNO

WÓZEK DYNO



INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYSTRYBUTOR WÓZKA: NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY
PRZEKAZAĆ UŻYTKOWNIKOWI WÓZKA

UŻYTKOWNIK: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z
WÓZKA, NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I
ZACHOWAĆ JĄ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI

Wybór wózka firmy Leggero to doskonałe rozwiązanie dla Państwa dziecka. Wierzymy, że każde dziecko powinno być w stanie funkcjonować w pełnym zakresie swoich możliwości. Jesteśmy otwarci na pytania i komentarze na temat naszych produktów i usług. Prosimy o kontakt z nami lub z autoryzowanym dystrybutorem, korzystając z informacji poniżej.

Leggero
174 D Shepherd Trail
Bozeman MT 59718
Infolinia: 1-844-503-KIDS
www.Leggero.us

Autoryzowany dystrybutor firmy Leggero:

Nazwa dystrybutora	LIW CARE TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Adres	Ul. GOLFOWA 7, 94 – 406 Łódź
Telefon	+ 509 089 816
E-mail	biuro@liwcare.pl
Strona internetowa	www.liwcare.pl

Autoryzowany Przedstawiciel w Europie:



Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie, ostrzeżenia i cechy	4
1.1 Wprowadzenie.....	4
1.2 Przewidziany użytkownik	4
1.3 Przewidziany asystent	4
1.4 Warunki gwarancji.....	4
1.5 Serwisowanie i naprawa	4
1.6 Cechy	5
1.7 Elementy siedziska i pozycjonowania	6
1.8 Regulacja i specyfikacje	7
Rozdział 2: Ostrzeżenia	8
Rozdział 3: Rozpakowanie wózka	11
Rozdział 4: Obsługa i regulacja.....	12
4.1 Obsługa blokad kół.....	12
4.2 Regulacja kąta rączki do prowadzenia.....	13
4.3 Ustawianie blokad skrętu koła	13
4.4 Regulacja kąta nachylenia siedziska / Tiltu.....	13
4.5 Regulacja kąta oparcia pleców i aktywator dynamiczny w trybie siedzenia.....	14
4.6 Regulacja kąta oparcia siedziska.....	14
4.7 Składanie i rozkładanie.....	15
4.8 Składanie i rozkładanie.....	15
4.9 Regulacja podnóżka	16
4.10 Regulacja wysokości oparcia.....	16
4.11 Regulacja głębokości siedziska	17
4.12 Korzystanie ze stolika terapeutycznego lub poręczy pomocniczej.....	17
4.13 Zmiana sprężyn aktywatora dynamicznego	18
4.14 Korzystanie z wózka Dyno jako siedzenia w pojazdach silnikowych	19
Rozdział 5: Ograniczenia gwarancji	20
Rozdział 6: Konserwacja.....	21
Rozdział 7: Dokumentacja konserwacji	22

Rozdział 1: Wprowadzenie, ostrzeżenia i cechy

1.1 Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wózka DYNO. Niniejsza instrukcja wyjaśnia, w jaki sposób obsługiwać, regulować i dokonywać konserwacji wózka. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych opisywanego produktu bez uprzedniego powiadomienia.

Niestety, nie możemy dostarczyć niniejszych informacji dla użytkownika w formacie odpowiednim dla osób z dysfunkcją wzroku. Osoby takie prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem firmy Leggero w celu uzyskania informacji i instrukcji w formie komunikacji werbalnej oraz w razie potrzeby szkolenia praktycznego.

1.2 Przewidziany użytkownik

Wózki rehabilitacyjne i pediatryczne systemy pozycjonowania są odpowiednie dla dzieci, które są ograniczone do pozycji siedzącej i potrzebują wsparcia w zakresie mobilności i pozycjonowania. Osoby wymagające takiej pomocy mogą wykazywać szeroki zakres przypadłości, ograniczających ich zdolność do osiągnięcia mobilności bez takiego systemu. Informacje o maksymalnym obciążeniu oraz dodatkowe specyfikacje zamieszczono w podrozdziale 1.7 niniejszej instrukcji.

1.3 Przewidziany asystent

Asystenci obsługujący wózek muszą być w stanie wzrokowo, umysłowo i fizycznie bezpiecznie obsługiwać wózek w każdych okolicznościach. Wymagane jest czytanie i przestrzeganie wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.



1.4 Warunki gwarancji

Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie jeśli produkt jest wykorzystywany zgodnie z rekomendacjami producenta, zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami określonymi dla produktu.


1.5 Serwisowanie i naprawa

Serwisowanie i naprawa wózka DYNO powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego dystrybutora firmy Leggero. W przypadku jakichkolwiek problemów, należy skontaktować się z dystrybutorem, który dostarczył wózek. Autoryzowani dystrybutorzy wymieniają i montują wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Leggero.


1.6 Cechy

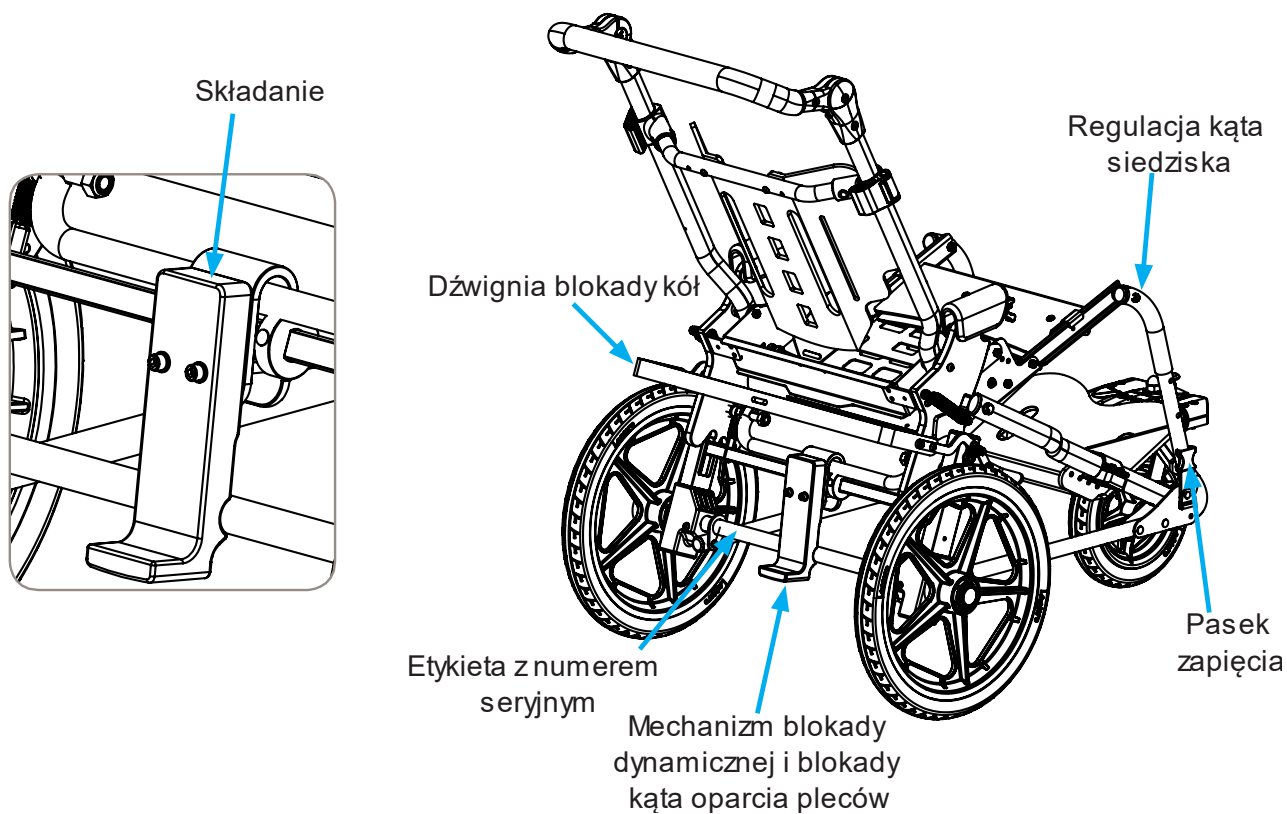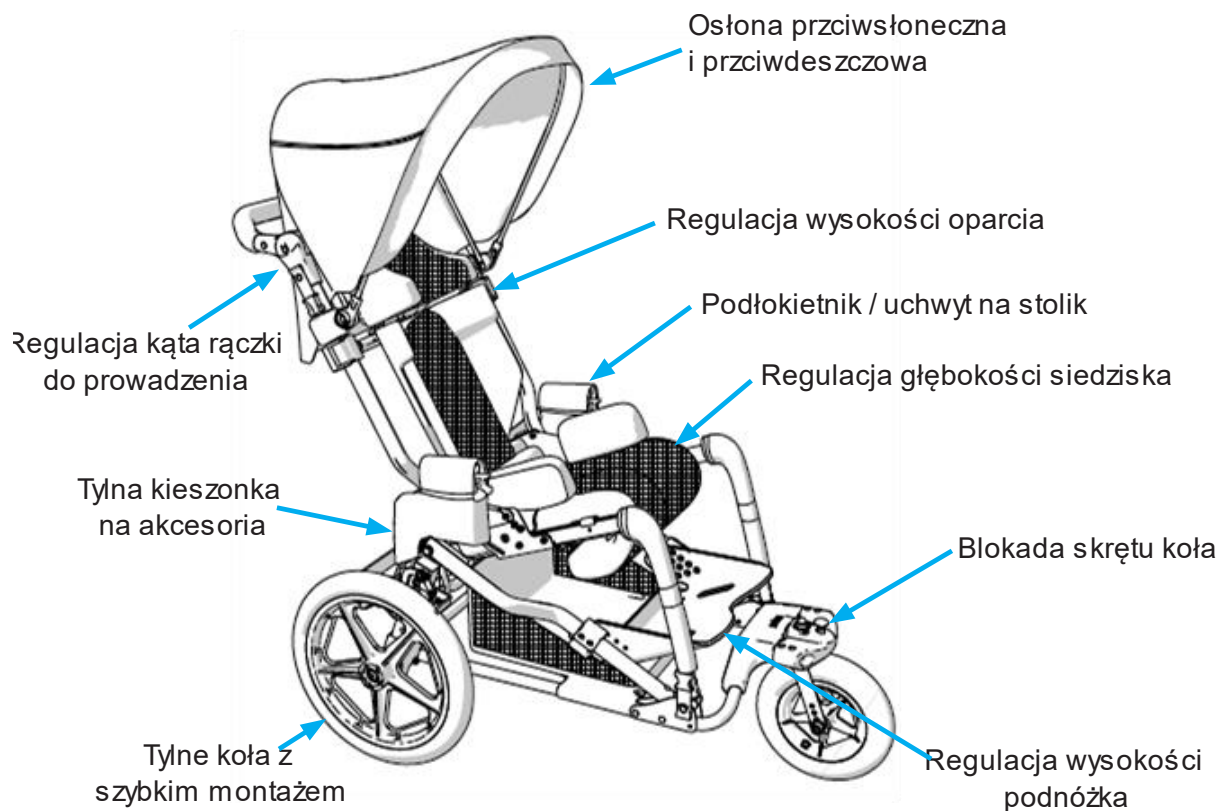


1.7 Elementy siedziska i pozycjonowania

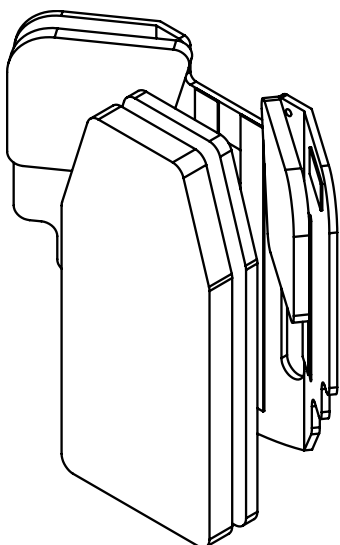



Poduszka oparcia

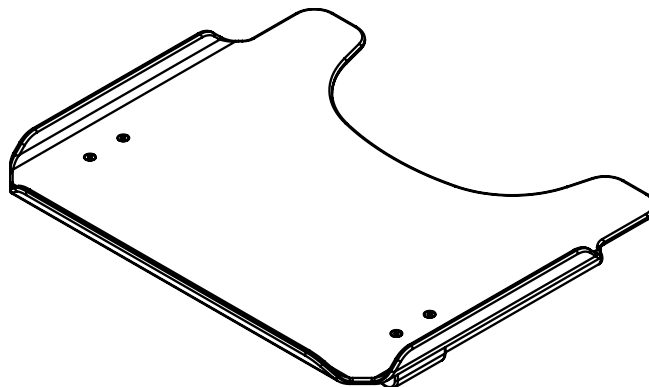


Stolik terapeutyczny

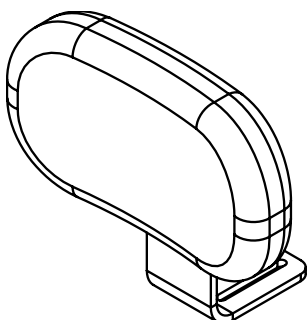

Zagiówek

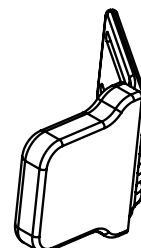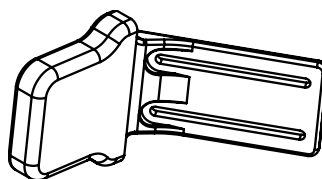

Peloty piersiowe

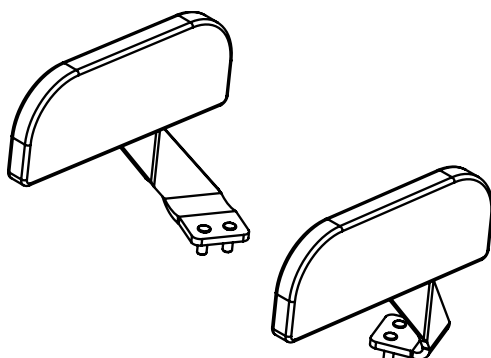

Peloty biodrowe

1.8 Wymiary i specyfikacje

Wymiary

Głębokość siedziska	6-14" (15-35cm)
Szerokość Siedziska	14" (35cm)
Długość nogi dolnej	8,5-14" (15-35cm)
Wysokość oparcia	13-21" (29-53cm)
Regulacja kąta oparcia pleców	90°, 120°
Kąt siedziska / tilt	20°, 23°, 26°

Specyfikacje

Maks. Waga użytkownika	80lb (36kg)
Zakres wysokości uchwytu	40-45" (101-114cm)
Waga wózka	26lb (12kg)
Szerokość całkowita	26,5" (67cm)
Średnica opon przednich	10" (25cm)
Średnica opon tylnych	16" (41cm)
Wymiary po złożeniu	39 x 18 x 26,5" (99 x 46 x 67cm)
Szerokość zawracania	41" (104cm)
Maks. Bezpieczne nachylenie	5°

Rozdział 2: Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem korzystania z wózka wymagane jest przeczytanie niniejszej instrukcji w całości.

Przed rozpoczęciem obsługi wózka Dyno, wszyscy opiekunowie i/lub asystenci muszą przeczytać niniejszą instrukcję. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu, konieczne jest zapoznanie się z jego obsługą i cechami. W przypadku niezrozumienia jakichkolwiek informacji z niniejszej instrukcji, prosimy zwrócić się o pomoc do autoryzowanego dystrybutora firmy Leggero.

Niezastosowanie się do instrukcji i nieprzestrzeganie ostrzeżeń zawartych w instrukcji może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenia wózka DYNO, a także potencjalnie unieważnienie gwarancji.

Symbole stosowane na etykietach produktów i symbole ostrzegawcze w instrukcji obsługi



OSTRZEŻENIE!

Słowo „OSTRZEŻENIE” lub ten symbol wskazuje na praktyki, które są niebezpieczne i mogą spowodować poważne obrażenia ciała pasażera i/lub opiekuna



OSTRZEŻENIE! ZOB. INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Odpowiedni dobór wózka i środków bezpieczeństwa

W przemyśle mobilności istnieje kilka opcji dostosowanych do potrzeb dzieci. Należy upewnić się, że Państwa (i dystrybutora) wybór wózka i innych opcji uwzględnia komfort, pozycjonowanie, fizyczne ograniczenia dziecka i zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas codziennego użytkowania.

Ostrzeżenia: Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem korzystania z wózka wymagane jest przeczytanie niniejszej instrukcji w całości.

Przed rozpoczęciem obsługi wózka Dyno, wszyscy opiekunowie i/lub asystenci muszą przeczytać niniejszą instrukcję. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu, konieczne jest zapoznanie się z jego obsługą i cechami. W przypadku niezrozumienia jakichkolwiek informacji z niniejszej instrukcji, prosimy zwrócić się o pomoc do autoryzowanego dystrybutora firmy Leggero.

OSTRZEŻENIE! Niekonwencjonalne wykorzystanie i/lub obsługa produktu mogą być niebezpieczne. Wózek nie jest bezpieczny w przypadku jazdy sportowej ani podobnych szybkich manewrów. Obrotowe przednie koła mogą zachwiać się przy większej prędkości i spowodować nagłe zatrzymanie oraz przewrócenie wózka. Zaleca się korzystanie z blokad krętlików kół samonastawnych. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, z wózka należy korzystać tylko w normalnej prędkości spaceru. W żadnym wypadku nie należy wypuszczać uchwytu podczas pchania wózka. Nigdy nie wolno odpychać wózka.

OSTRZEŻENIE! Początkowy montaż wózka musi zostać wykonany przez wykwalifikowany personel.

OSTRZEŻENIE! Procedury inne niż opisane w niniejszej instrukcji muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.

OSTRZEŻENIE! Waga przewożona przez wózek Dyno nie może przekraczać limitu wagi całkowitej 80lb/36kg (maksymalna waga pasażera oraz waga przewożonych akcesoriów i/lub przedmiotów).

OSTRZEŻENIE! Regulacje dokonywane przy wózku mogą wpływać na stabilność, zwiększając ryzyko przewrócenia. Regulacje muszą być dokonywane przez autoryzowanego dystrybutora firmy Leggero.

OSTRZEŻENIE! Należy unikać zmoczenia lub przechowywania wózka w wilgotnym środowisku. Nadmiar wilgoci może spowodować rdzę lub korozję, które mogą skutkować uszkodzeniami elementów. W przypadku narażenia wózka na wilgoć, należy go dokładnie wysuszyć.

OSTRZEŻENIE! Nie należy pozostawiać wózka ani dziecka w słońcu lub w pobliżu innych źródeł ciepła, ponieważ powierzchnie wózka mogą osiągać temperatury mogące oparzyć dziecko. Nie należy pozostawiać wózka ani dziecka na zewnątrz w niskich temperaturach, ponieważ kontakt z wózkiem w temperaturach poniżej 0° C. może spowodować uraz. Uszkodzenie wózka może również wynikać z narażenia na działanie ekstremalnych, wysokich lub niskich temperatur.

OSTRZEŻENIE! Wózek powinien być używany wyłącznie na twardym i równym podłożu. Nie należy próbować przepychać wózka nad ani przez przeszkody. Przed podniesieniem wózka w celu ominięcia przeszkody należy zawsze wyjąć dziecko z wózka.

OSTRZEŻENIE! Nie należy używać wózka na pochyłościach o nachyleniu ponad 5 stopni. Nie należy pozostawiać wózka zaparkowanego na pochyłościach ani pochylniach. Na pochyłościach i pochylniach konieczna jest szczególna ostrożność, aby uniknąć wypadnięcia dziecka z wózka, a także przewrócenia lub stoczenia się wózka.

OSTRZEŻENIE! Przed pozostawieniem wózka, a także przed wkładaniem lub wyjmowaniem z niego dziecka, należy zawsze zablokować koła. Nie należy używać blokad kół, aby zatrzymać wózek podczas ruchu.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy pozostawiać dziecka w wózku bez opieki, nawet jeśli jest ono przypięte pasami, a koła są zablokowane.

OSTRZEŻENIE! Jeśli osoba siedząca na wózku spróbuje dosięgnąć jakiegoś obiektu z przodu, z boku lub z tyłu wózka, należy upewnić się, że nie wychyla się zbyt daleko. Przesunięcie środka ciężkości wózka może spowodować jego przewrócenie.

OSTRZEŻENIE! W przypadku wyposażenia w opony pneumatyczne, na obsługę wózka wywiera wpływ ciśnienie w oponach. Prawidłowo napompowane opony znacznie usprawniają sterowność. Ciśnienie powietrza w przednich i tylnych oponach powinno wynosić co najmniej 35 PSI/240 kPa.

OSTRZEŻENIE! Nie należy stać na podnóżku podczas przenoszenia dziecka do lub z wózka.

OSTRZEŻENIE! Podczas składania wózka należy uważać na ryzyko urazu poprzez zmiżdżenie lub zaklinowanie palców.

Więcej informacji zamieszczono w podrozdziale 4.6 niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE! Pasy piersiowe lub biodrowe mogą zaklinować się w uchwycie składalnego zamka. Wszystkie pasy należy przyciąć możliwie najkrócej. Przed ponownym użyciem należy zawsze upewnić się, że rama jest zablokowana w pozycji pionowej. Przy rozkładaniu słyszalne będzie „kliknięcie” podczas odblokowywania ramy.

OSTRZEŻENIE! Wózek jest przeznaczony wyłącznie do przewozu każdorazowo jednego dziecka. Nie należy przewozić każdorazowo więcej niż jednego dziecka.

OSTRZEŻENIE! Wózek należy podnosić tylko trzymając za części, które są pewnie zamocowane. Wózek powinien być podnoszony w miarę możliwości za elementy ramy bocznej. Po złożeniu należy przytrzymywać wózek za niższe rury ramy bocznej. Do podnoszenia zawsze potrzebne są dwie osoby, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia wózka.

OSTRZEŻENIE! Prosimy przechowywać wszystkie opakowania poza zasięgiem dzieci. Wszystkie materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych należy wyrzucić natychmiast po rozpakowaniu.


OSTRZEŻENIE! Jeśli wózek nie jest wyposażony w opcję tranzytową, nie należy używać go jako siedzenia w pojazdach silnikowych. Należy przenieść dziecko z wózka na odpowiednio dostosowane siedzenie w pojeździe. Jeśli wózek jest wyposażony w opcję tranzytową, należy zapoznać się z podrozdziałem 4.12 niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE! Wózek musi być doglądany i poddawany konserwacji zgodnie z wykresem zamieszczonym w rozdziale 6: Konserwacja. Wykryte problemy muszą zostać naprawione przed ponownym użyciem wózka.

OSTRZEŻENIE! Wiele łączników stosowanych do budowy wózka Dyno składa się ze śruby z nakrętką zawierającą nylonowy pierścień zabezpieczający. Połączenia te muszą być zachowane i zabezpieczone za pomocą oryginalnych łączników i odpowiednio wyregulowane. W celu prawidłowej regulacji punktów obrotu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Rozdział 3: Rozpakowanie wózka

1. Wyjąć wózek z opakowania.
2. Wyrzucić wszystkie materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych.
3. Zamontować tylne koła, zob. Rysunek 1.
4. Sprawdzić prawidłowość regulacji osie z szybkim zwolnieniem, pociągając za koło do zewnątrz. Koło powinno trzymać się na miejscu.
5. Zablokować koła, zob. podrozdział 4.1 niniejszej instrukcji.
6. Rozłożyć ramę i oparcie, zob. podrozdział 4.7 niniejszej instrukcji.
7. Sprawdzić ciśnienie w oponach. Ciśnienie w przednich i tylnych oponach powinno wynosić 35 PSI/240 kPa.

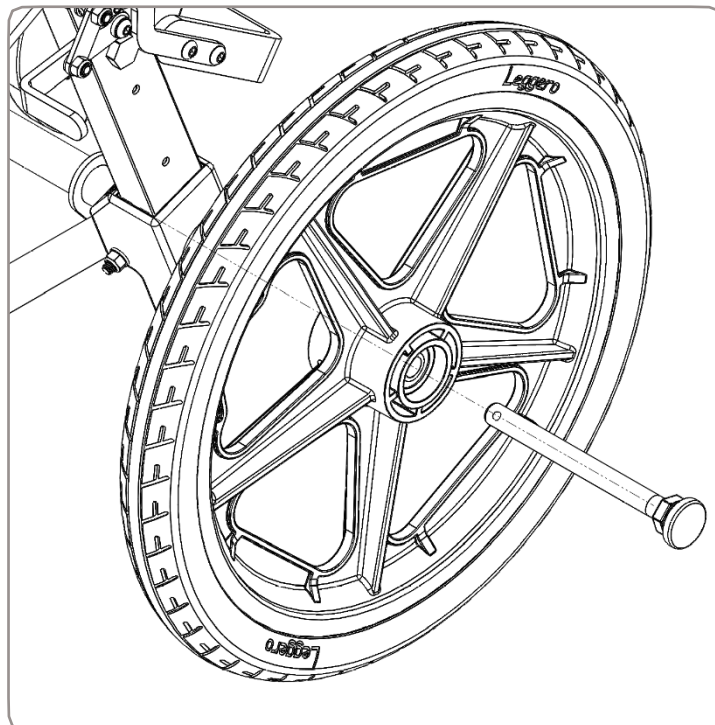


Rysunek 1


OSTRZEŻENIE! Prosimy przechowywać materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci. Natychmiast po rozpakowaniu wyrzucić wszystkie materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych.

Rozdział 4: Obsługa i regulacja


Wymagane narzędzia:

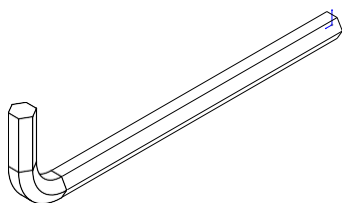

**Klucz sześciokątny
4mm**

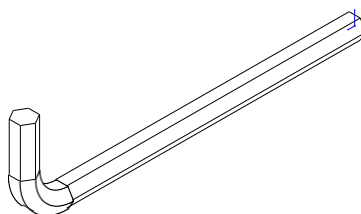


**Klucz sześciokątny
5mm**

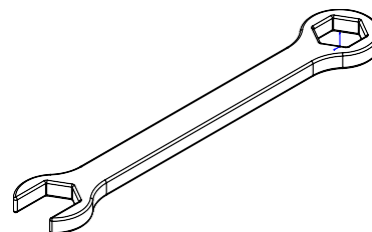


Klucz 10mm

4.1 Obsługa blokad kół

1. W celu zablokowania kół, podnieść stopą środek poprzeczki. zobacz Rysunek 2.
2. Sprawdzić, czy blokady działają po obu stronach, przesuując wózek od przodu do tyłu.
3. W celu odblokowania kół, nacisnąć stopą poprzeczkę do dołu. Zob. Rysunek 3.

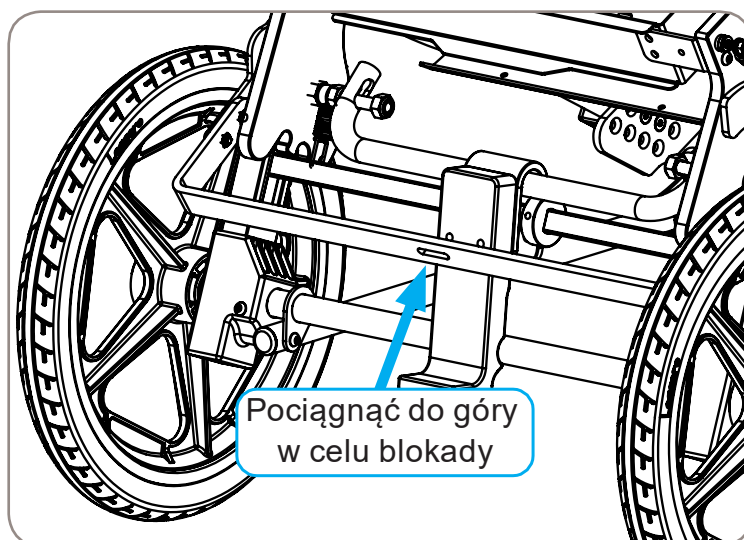


Rysunek 2

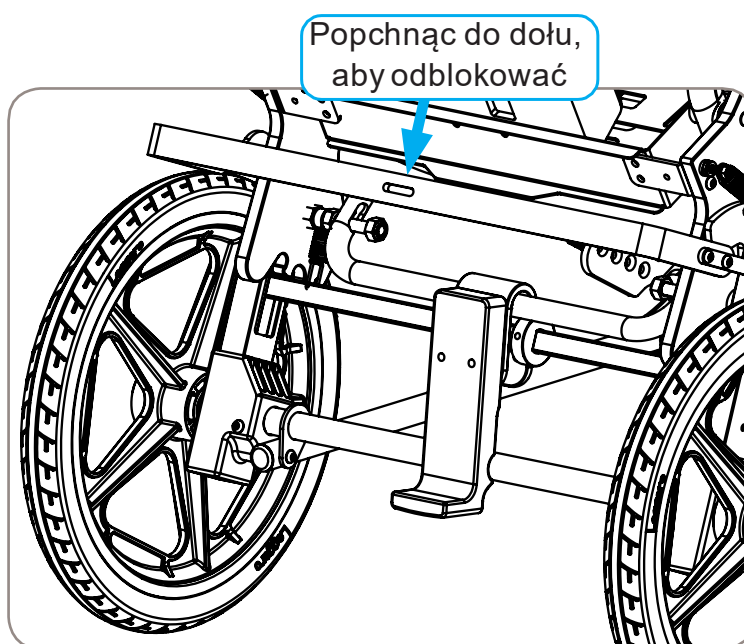

Rysunek 3

4.2 Regulacja kąta rączki do prowadzenia


1. Nacisnąć i przytrzymać kciukami przyciski wewnątrz każdej zębaki regulacyjnej, zob. Rysunek 4.
2. Ustawić uchwyt pod preferowanym kątem.
3. Zwolnić przyciski

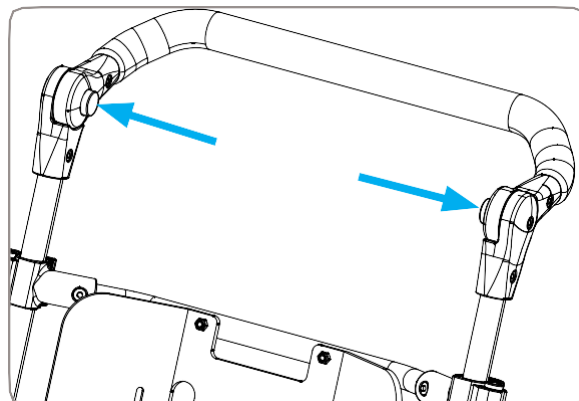


Rysunek 4

4.3 Ustawianie blokad skrętu koła


1. W celu ustawienia blokad skrętu kół, należy obrócić koło do przodu w sposób pokazany na Rysunek 6.
2. Podnieść tłok na mechanizmie blokady skrętu i przekręcić o 90 stopni.
3. Zwolnić tłok i sprawdzić, czy widełki kół samonastawnych są zablokowane.
4. Aby powrócić do trybu skrętnego, wykonać procedurę w odwrotnej kolejności.

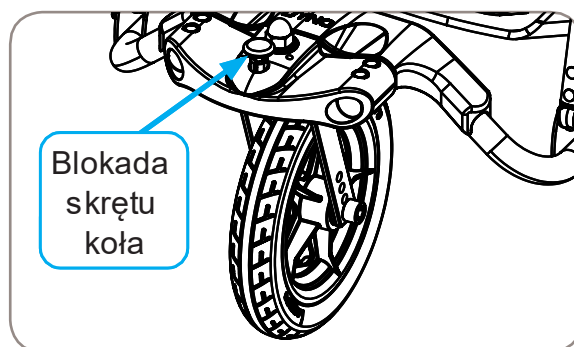


Rysunek 5

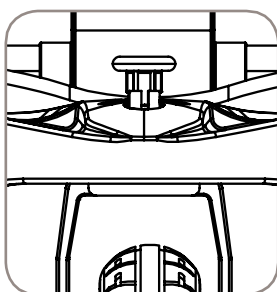

Odblokowane

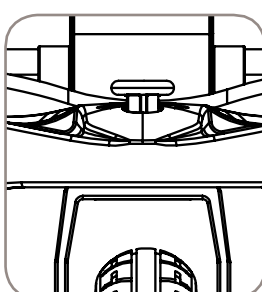


Zablokowane

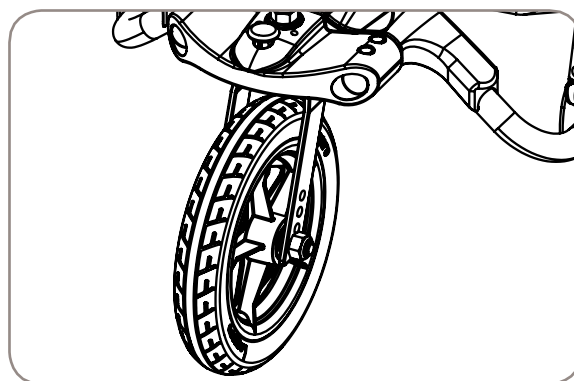

Rysunek 6

4.4 Regulacja kąta nachylenia siedziska / Tiltu

1. Zablokować koła.
2. Wcisnąć przyciski zatraskowe do wewnątrz.
3. Popchnąć lub pociągnąć górną rurę giętą w celu ustawienia w preferowanej pozycji.
4. Zwolnić przyciski zatraskowe i sprawdzić prawidłowość ustawienia.

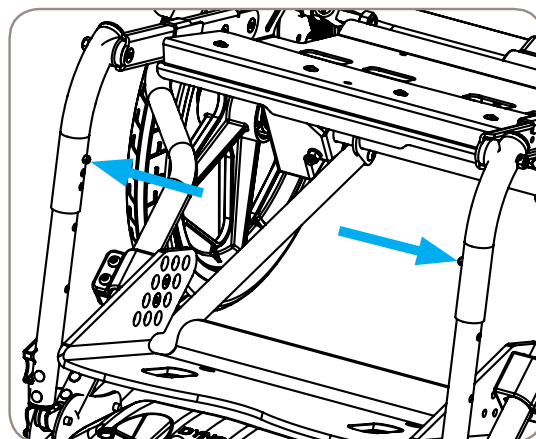


Rysunek 7


4.5 Regulacja kąta oparcia pleców i aktywator dynamiczny w trybie siedzenia

Wózki wyposażone w aktywator dynamicznej opcji siedzenia

1. Zablokować koła.
2. Umieścić obie ręce na uchwycie.
3. Aby zablokować kąt oparcia siedziska w pozycji 90°, popchnąć uchwyt jak najdalej do przodu.
4. Aby zablokować kąt oparcia siedziska w pozycji 120°, pociągnąć uchwyt jak najdalej do tyłu.
5. Przytrzymać pozycję uchwytu, stopą popchnąć do góry mechanizm blokady kąta oparcia siedziska. Zob. Rysunek 8.
6. Sprawdzić, czy pozycja kąta oparcia siedziska jest zablokowana, lekko popychając i pociągając uchwyt.
7. Aby powrócić do odblokowanego aktywatora dynamicznego trybu siedzenia, popchnąć mechanizm do dołu, aż znajdzie się na miejscu i da się słyszeć kliknięcie. Nacięcie ułoży się w stosunku do tylnej rury osiowej w sposób pokazany na Rysunek 8.

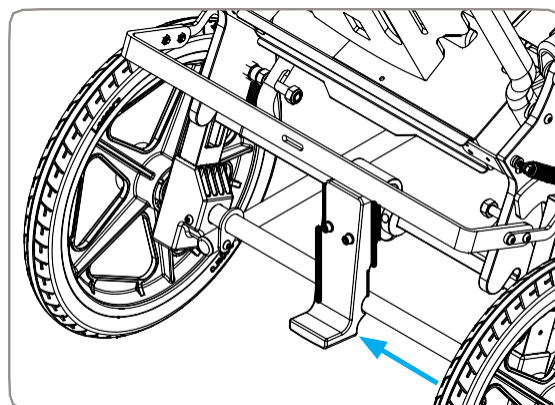

Rysunek 8, kąt bioder odblokowany

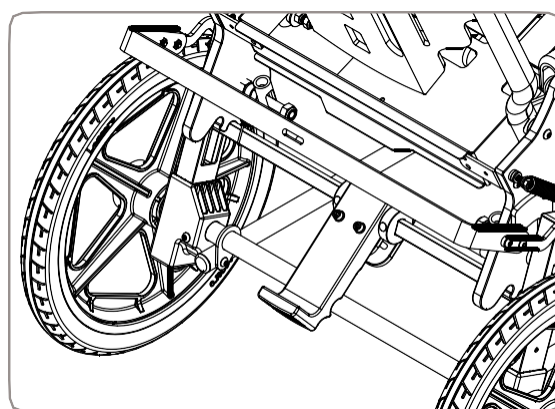


Rysunek 9, kąt bioder zablokowany

4.6 Regulacja kąta oparcia siedziska

Wózki nie wyposażone w aktywator dynamicznej opcji siedzenia

1. Zablokować koła.
2. Umieścić obie ręce na uchwycie.
3. Stopą popchnąć do dołu drążek blokady kąta oparcia siedziska. Zob. Rysunek 10.
4. Ustawić kąt oparcia siedziska do preferowanej pozycji.
5. Zwolnić drążek.
6. Sprawdzić, czy pozycja kąta blokady siedziska jest zablokowana, lekko popychając i pociągając uchwyt.

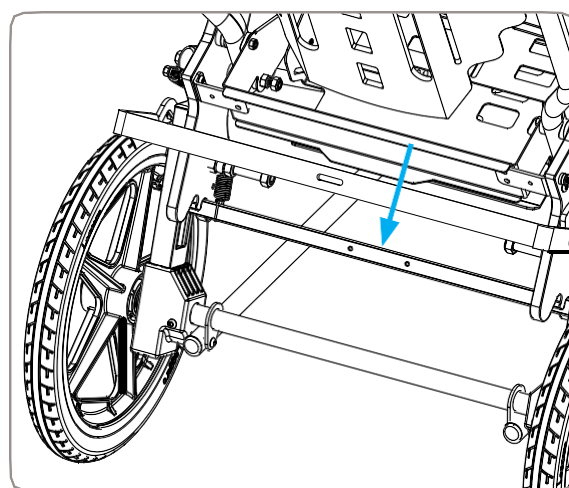


Rysunek 10

4.7 Składanie i rozkładanie


Wózki wyposażone w aktywator dynamicznej opcji siedzenia

1. Zablokować koła.
2. Umieścić ręce na rączce prowadzenia.
3. Ustawić wózek do odblokowanej (aktywator dynamiczny) pozycji kąta oparcia siedziska
4. Stopą popchnąć do dołu górną część mechanizmu blokady kąta oparcia siedziska.
5. Popchnąć rączkę do przodu i do dołu.
6. Ustawić rączkę do przodu, aby osiągnąć najniższy profil.
7. W celu rozłożenia, pociągnąć rączkę do tyłu


Ostrzeżenie! Aby uniknąć urazu podczas składania lub rozkładania wózka, należy trzymać ręce i stopy z dala od ruchomych części. Zob. Rysunek 12, strzałki wskazują punkty potencjalnego ryzyka.

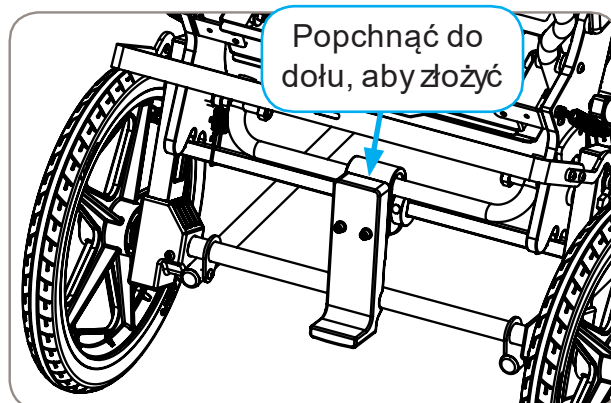


Rysunek 11

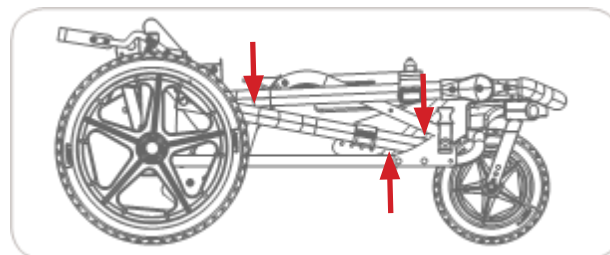


Rysunek 12

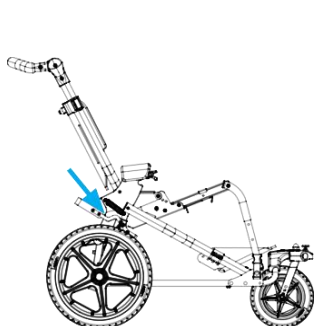


Stopą popchnąć górną część mechanizmu do dołu

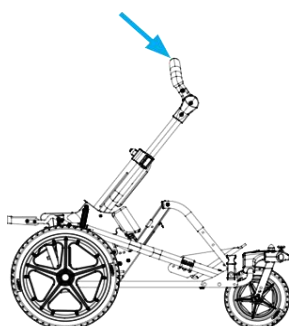

Popchnąć rączkę do przodu

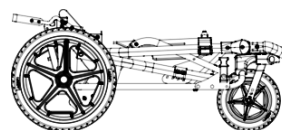

Dyno w pozycji złożonej

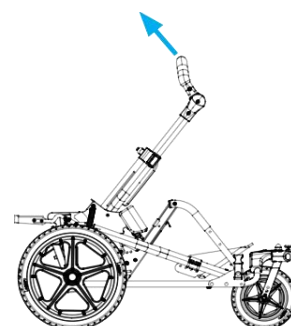


W celu rozłożenia, pociągnąć rączkę do tyłu

4.8 Składanie i rozkładanie

Wózki nie wyposażone w aktywator dynamicznej opcji siedzenia


1. Zablokować koła.
2. Umieścić ręce na rączce do prowadzenia.
3. Stopą popchnąć do dołu górną część drążka blokady kąta bioder.
4. Popchnąć rączkę do przodu i do dołu.
5. Ustawić rączkę do przodu, aby osiągnąć najniższy profil.
6. W celu rozłożenia, pociągnąć rączkę do tyłu.

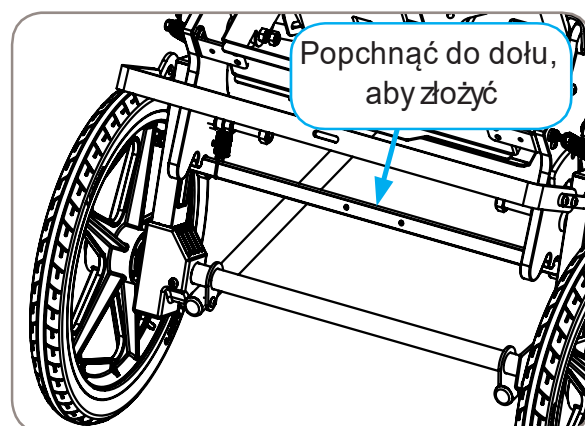

Rysunek 13

4.9 Regulacja podnóżka


1. Poluzować śruby z łbem kulistym [1] przy lewym i prawym zacisku (2 śruby na stronę). Wymagany klucz sześciokątny 4mm.
2. Przesunąć podnóżek w górę lub w dół do preferowanej pozycji.
3. Dokręcić śruby.
4. Pozycja podnóżka może być również zmieniana od przodu do tyłu poprzez usunięcie i ponowny montaż śrub z łbem płaskim [2] (2 na stronę) w innych pozycjach w otworach. Wymagany klucz sześciokątny 4mm.

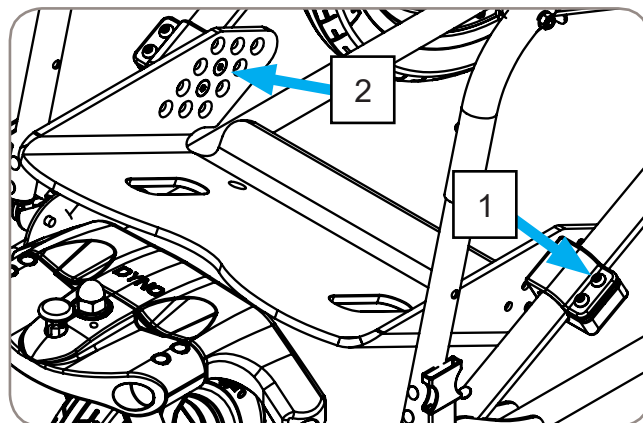


Rysunek 14

4.10 Regulacja wysokości oparcia


1. Pociągnąć do zewnątrz dźwignie do regulacji wysokości, zob. Rysunek 15.
2. Wyregulować wysokość oparcia do preferowanej pozycji.
3. Popchnąć dźwignie do regulacji wysokości do wewnątrz, aż zatrzasną się w pozycji zablokowanej.

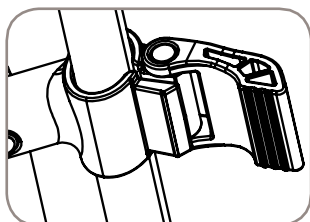

Odblokowane

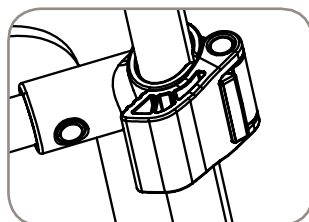


Zablokowane

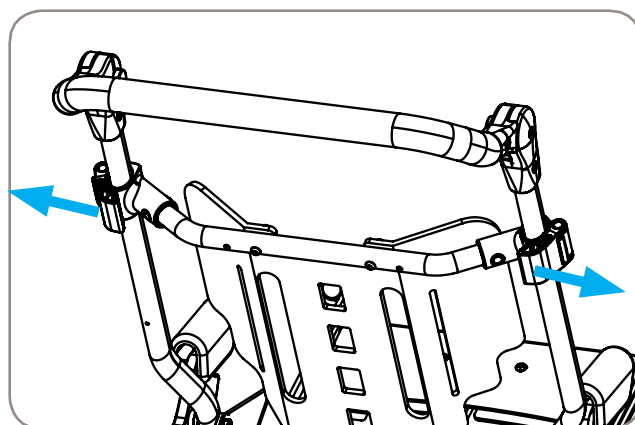


Rysunek 15

4.11 Regulacja głębokości siedziska

1. Poluzować paski tapicerki
2. Poluzować pokrętko pod środkiem płyty siedziska
3. Wyregulować przednie elementy montażowe siedziska do preferowanej wysokości .
4. Dokręcić pokrętko.
5. Zacisnąć paski tapicerki

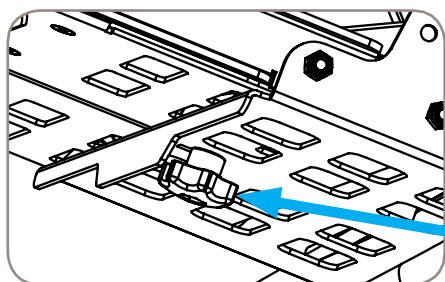


Pokrętko

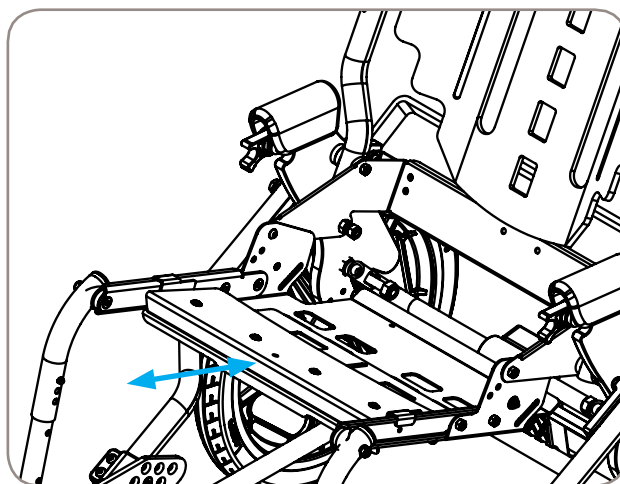


Rysunek 16

4.12 Korzystanie ze stolika terapeutycznego lub poręczy pomocniczej

1. W celu zamontowania stolika terapeutycznego lub poręczy pomocniczej, odchylić lewą i prawą blokadę do dołu. Zob. Rysunek 17.
2. Wsunąć stół terapeutyczny lub poręcz pomocniczą w uchwyty do odpowiedniej dla Ciebie głębokości.
3. Przesunąć lewą i prawą blokadę tacy do góry, tak by blokady się zablokowały. Zob. Rysunek 18.

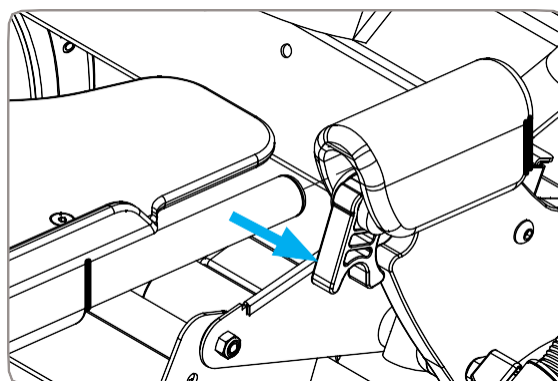

Rysunek 17

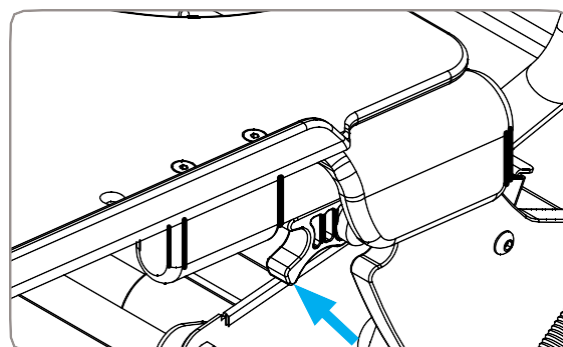


Rysunek 18


4.13 Zmiana sprężyn aktywatora dynamicznego

W przypadku wózków wyposażonych w opcję aktywatora siedzenia dynamicznego. Opór dynamicznego oparcia może zostać zmieniony poprzez montaż miękkich, średnich lub twardych sprężyn. Jeśli dziecko jest w stanie oprzeć się z plecami wysuniętymi uzyskując kąt bioder większy niż 90 stopni, wówczas potrzebne są twardsze sprężyny.

1. Usunąć górną nakrętkę i podkładkę, zob. Rysunek 19. Wymagany klucz sześciokątny 4mm i klucz 10mm. Należy uważać, by nie zgubić wewnętrznych elementów dystansowych.
2. Odczepić oczko sprężyny od śruby i wysunąć płytę do przodu, aby dostać się do łba dolnej śruby z tylnej strony płyty, zob. Rysunek 20. Usunąć dolną nakrętkę i podkładkę.
3. Usunąć obecne sprężyny, uważając, by nie zgubić wewnętrznych elementów dystansowych.
4. Zamontować inne sprężyny.
5. Zamontować ponownie dolną nakrętkę i podkładkę. Dokręcić, następnie odkręcić o 1/4 obrotu.
6. Zaczepić oczko sprężyny o górną śrubę. Zamontować ponownie nakrętkę i podkładkę. Dokręcić, następnie odkręcić o 1/4 obrotu.

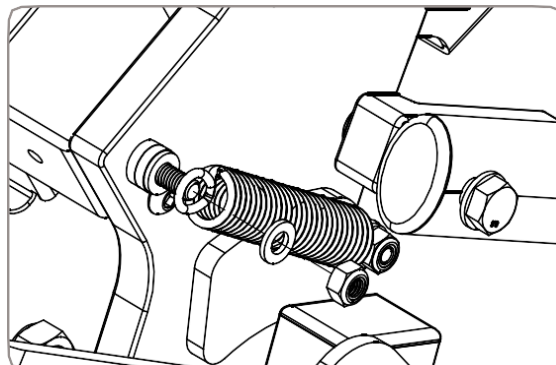

Rysunek 19

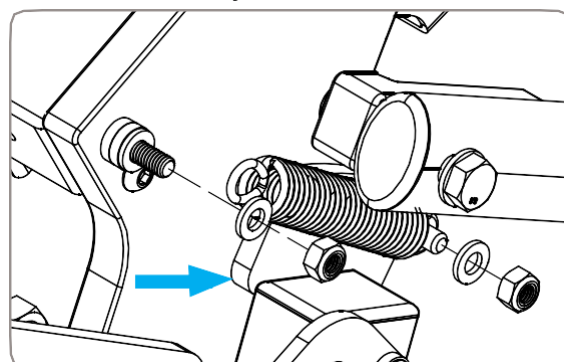

Rysunek 20

4.14 Korzystanie z wózka Dyno jako siedzenia w pojazdach silnikowych


Wózek Dyno jest dopuszczony do przewozu dzieci w pojazdach silnikowych, jeśli jest wyposażony w opcjonalną funkcję tranzytową i wykorzystywany zgodnie z poniższymi instrukcjami. Wózek musi być przymocowany taśmami zaciskowymi w pozycji przodem do kierunku jazdy, natomiast pasażer musi być przypięty pasami (wg systemu WTORS), zgodnie z wymogami zalecanej praktyki SAE J2249 — systemu zabezpieczeń wózka i pasażera, przeznaczonego do stosowania w pojazdach silnikowych.

WAŻNA INFORMACJA:


Niniejszy wózek pozytywnie przeszedł testy dynamiczne pod kątem zgodności z normą ANSI/RESNA WC/T. 1 – Rozdz. 19.5.3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z wózka jako siedzenia w pojazdach silnikowych prosimy o kontakt z firmą Leggero lub autoryzowanym dystrybutorem firmy Leggero. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie 2 niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIA i instrukcje:

- Wózek Dyno musi być używany zgodnie z niniejszą instrukcją oraz zgodnie z instrukcjami producenta taśm zaciskowych zamontowanych w pojeździe.
- Pasażer wózka powinien zostać przeniesiony na siedzenie pojazdu i w miarę możliwości używać pasów bezpieczeństwa dostępnych w pojeździe.
- Wózek Dyno może przewozić do 80lb/36kg. Nie należy przekraczać maksymalnych wskaźników wagi.
- Podczas stosowania jako siedzenie w pojazdach silnikowych, wózek Dyno musi być przymocowany w pozycji przodem do kierunku jazdy. Do przymocowania wózka należy stosować zatwierdzony system taśm zaciskowych w postaci 4-punktowych pasów. W przypadku pasażerów powyżej 50lb / 23kg, należy stosować pasy 3-punktowe. W przypadku pasażerów poniżej 50lb / 23kg, konieczne są 5-punktowe pasy tranzytowe.
- Zatwierdzone punkty tranzytowe do przymocowania taśm zaciskowych i punkt do przymocowania pasów pokazano na rysunkach 21 i 22.
- Pasy nie mogą być odsunięte od ciała dziecka przez jakiegokolwiek elementy wózka ani akcesoria.
- Pasy należy dostosować tak, aby przylegały i nie były luźne. Jeśli fragmenty pasów można chwycić w palce, oznacza to, że założone są zbyt luźno.
- Tylko pasy zgodne z wytycznymi normy ANSI/RESNA WC/T. 1 – Rozdz. 19.4.9.2-4.9.5 i 5.2, które pozytywnie przeszły testy dynamiczne pod kątem zgodności z załącznikiem A & 5.3 tejże normy, powinny być używane w wózku do zabezpieczenia pasażera wózka w pojeździe silnikowym.

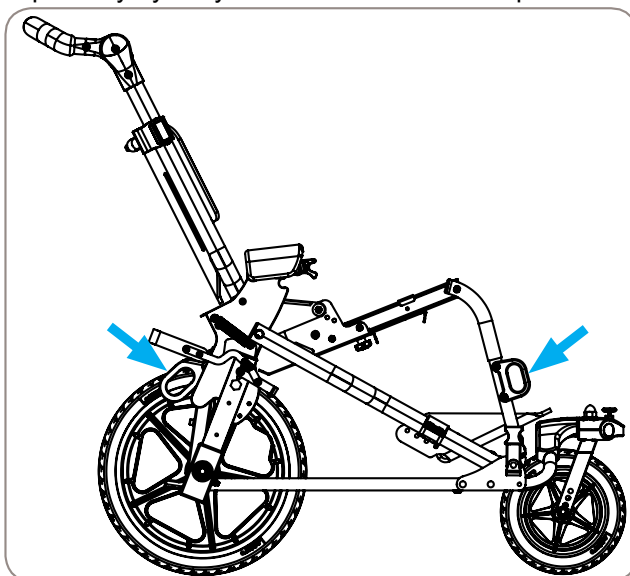

Rysunek 21

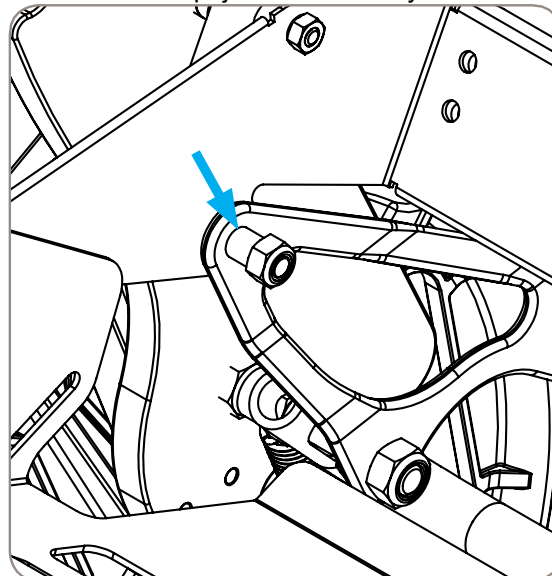

Rysunek 22

OSTRZEŻENIE! Jeśli wózek nie jest wyposażony w opcję tranzytową, nie należy go używać jako siedzenia w pojazdach silnikowych. Wówczas trzeba przenieść dziecko z wózka na zatwierdzone siedzenie do pojazdu silnikowego.

Rozdział 5: Ograniczenia gwarancji

A. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie pierwotnego nabywcę naszych produktów.

B. NA CAŁĄ ŻYWOTNOŚĆ

Firma Leggero LLC gwarantuje, że ramia i osie z szybkim zwolnieniem wykorzystane w wózku są wolne od wad w zakresie materiałów i wykonawstwa na całe życie pierwotnego nabywcy. Przewidywana żywotność ramy wynosi pięć lat.

C. Na jeden (1) rok

Gwarantujemy, że wszystkie oryginalne części zamienne i komponenty wózka są wolne od wad w zakresie materiałów i wykonawstwa przez okres jednego roku od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę.

D. OGRANICZENIA

1. Gwarancja nie obejmuje:
 - Opon, rur, tapicerki, uchwytów do popychania ani ochraniaczy ramion.
 - Szkód powstałych w wyniku zaniedbania, niewłaściwego stosowania, nieprawidłowego montażu lub naprawy.
 - Szkód powstałych w wyniku stosowania tranzytowego.
 - Szkód wynikających z przekroczenia limitów wagowych wskazanych na etykiecie z numerem seryjnym.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna wyłącznie w przypadku, gdy produkt jest używany zgodnie z określonymi warunkami i zamierzonymi celami, według wszystkich zaleceń producenta. W innych przypadkach gwarancja jest nieważna.
3. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do problemów wynikających z normalnego zużycia, przy czym takie oceny będą dokonywane wyłącznie przez firmę Leggero LLC.
4. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt zostanie zmodyfikowany bez pisemnej zgody firmy Leggero, włączając w to m.in. modyfikacje poprzez zastosowanie nieoryginalnych części lub łączników. Produkty uszkodzone z powodu napraw jakichkolwiek elementów dokonanych bez wyraźnej zgody firmy Leggero; lub produkty uszkodzone w wyniku okoliczności niezależnych od firmy Leggero, przy czym taka ocena będzie dokonywana wyłącznie przez firmę Leggero.
5. Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku usunięcia lub zmiany oryginalnego numeru seryjnego.
6. Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych. Stosowalność gwarancji międzynarodowych należy sprawdzić u dystrybutora.

E. DZIAŁANIA PRODUCENTA

Naszym jedynym obowiązkiem jest naprawa lub wymiana objętych gwarancją części. Jest to jedyne zadośćuczynienie za szkody następcze.

F. DZIAŁANIA NABYWCY

1. W okresie obowiązywania gwarancji konieczne jest uzyskanie od nas uprzedniej zgody na zwrot lub naprawę objętych gwarancją części.
2. Następnie należy zwrócić produkt lub części, wraz z dodanymi do kwoty ogółem kosztami transportu, opłaconymi na rzecz firmy Leggero LLC. Prosimy o kontakt z biurem Obsługi Klienta Leggero pod numerem telefonu 1-844-503-KIDS w celu uzyskania adresu zwrotnego i numeru autoryzacji zwrotu (RA #).
3. Nabywca pokrywa koszty robocizny w ramach naprawy, usuwania lub montażu części.

G. INFORMACJA DLA KONSUMENTA

1. Jeśli jest to dozwolone przez prawo, niniejsza gwarancja zastępuje jakiegokolwiek inne gwarancje, pisemne lub ustne, wyrażone lub domniemane, w tym gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
2. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać także inne prawa, które różnią się w zależności od stanu

Rozdział 6: Konserwacja

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konserwacji wózka Dyno, prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem. Regularna i skrupulatna konserwacja przedłuży żywotność wózka. Niewłaściwa konserwacja może znacznie skrócić żywotność wózka. Uszkodzone części należy wymienić przed ponownym użyciem wózka. Wózek powinien być regularnie czyszczony i serwisowany przez autoryzowanego dystrybutora co najmniej raz do roku.

Zaniechanie dokonywania właściwej konserwacji w określonych odstępach czasu może mieć wpływ na ważność gwarancji. Zalecane procedury konserwacji i jej częstotliwości zamieszczono w tabeli poniżej. Na następnej stronie niniejszej instrukcji znajduje się tabela służąca do prowadzenia dokumentacji zabiegów konserwacyjnych.

Zabiegi Konserwacyjne	Raz w tygodniu	Raz w miesiącu
Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach (jeśli dotyczy)	✓	
Sprawdzić koła i opony pod kątem zużycia lub uszkodzeń		✓
Sprawdzić działanie blokad kół	✓	
Sprawdzić prawidłowość wyosiowania kół samonastawnych		✓
Sprawdzić, czy wszystkie łączniki są dociśnięte		✓
Sprawdzić, czy osie z szybkim zwolnieniem działają poprawnie	✓	
Sprawdzić, czy mechanizm blokady w przypadku pochyłości działa poprawnie	✓	
Sprawdzić, czy mechanizm blokady w przypadku pochylni działa poprawnie	✓	
Sprawdzić wszystkie elementy konstrukcyjne pod kątem zużycia lub uszkodzeń		✓
Sprawdzić wszystkie elementy akcesoriów pod kątem uszkodzeń		✓

Zaleca się, regularne czyszczenie wózka:


- Oczyszczyć wszystkie elementy ramy i części z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem tylko łagodnych detergentów.
- Elementy materiałowe można prać. W przypadku korzystania z pralki, należy umieścić je w lnianym woreczku lub poszewce. Pozostawić do wyschnięcia.
- W większości przypadków, wystarczy przetarcie wilgotną szmatką.
- Nie korzystać z wózka w słonej wodzie. Może to spowodować poważne uszkodzenie.
- Uważać, by piasek ani inne drobiny nie zniszczyły łożysk kół ani widełek

Rozdział 7: Dokumentacja konserwacji

[illegible]

[illegible]

Autoryzowany dystrybutor

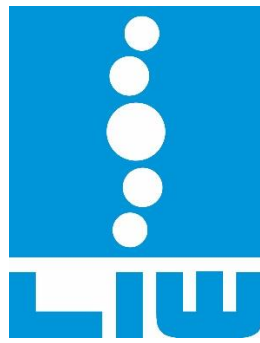

LIW CARE TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Ul. Golfowa 7, 94 – 406 Łódź, Polska

Tel. +48 509 089 816

www.liwcare.pl

Producent



Leggero LLC

174 D Shepherd Trail

Bozeman, MT 59718

Infolinia: 1-844-503-KIDS

www.Leggero.us