



FRONT RIGGINGS

INSTRUKCJA PODSTAWOWEJ OBSŁUGI



QUANTUM®

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

OSTRZEŻENIE!

Wstępną konfigurację wózka z napędem elektrycznym oraz wszystkie procedury opisane w niniejszej instrukcji przeprowadza dostawca produktów firmy Pride / Quantum Rehab lub wykwalifikowany technik.

Poniższe symbole są używane w niniejszej instrukcji użytkownika oraz na wózku z napędem elektrycznym w celu zwrócenia uwagi na ostrzeżenia i ważne informacje. Należy bezwzględnie się z nimi w pełni zapoznać i je zrozumieć.

OSTRZEŻENIE!

Oznacza potencjalnie niebezpieczne warunki / niebezpieczną sytuację. Nieprzestrzeganie wskazanych procedur może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie elementów lub nieprawidłowe działanie. Na produkcie ikona ta ma formę czarnego symbolu w żółtym trójkącie z czarną obwódką.

CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Czynności te należy przeprowadzić zgodnie z opisem. Niewykonanie czynności obowiązkowych może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie urządzenia. Na produkcie ikona ta ma formę białego symbolu w niebieskim punkcie z białą obwódką.

CZYNNOŚĆ ZAKAZANA!

Czynności te są zabronione. Pod żadnym pozorem nie wolno ich wykonywać. Wykonanie czynności zakazanej może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie urządzenia. Na produkcie ikona ta ma formę czarnego symbolu w czerwonym kole z czerwonym przekreśleniem.

Przeznaczenie

Podzespół wózka inwalidzkiego to urządzenie używane do celów medycznych, które jest przeważnie sprzedawane jako integralna część wózka, ale może też być sprzedawane oddzielnie jako część zamienna.

Dotyczy urządzeń do stosowania zgodnie z zaleceniami

OSTRZEŻENIE!

PRZESTROGA! Prawo federalne zezwala na sprzedaż niniejszego wyrobu wyłącznie lekarzowi lub z przepisu lekarza bądź innemu certyfikowanemu personelowi posiadającemu licencję na mocy prawa stanowego (dot. wyłącznie USA) lub lokalnego prawa właściwego dla miejsca, w którym personel ten użytkuje lub zleca użytkowanie urządzenia.

UWAGA: Niniejsza instrukcja użytkownika została sporządzona na podstawie najnowszych specyfikacji i informacji o produkcie dostępnych w momencie jej publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian w produkcie. Wszelkie zmiany w naszych produktach mogą powodować nieznaczne różnice między ilustracjami/ opisami w niniejszej instrukcji a zakupionym produktem. Najnowsza/aktualna wersja niniejszej instrukcji jest dostępna na naszej witrynie.

UWAGA: Produkt jest zgodny z dyrektywami i wymogami WEEE, RoHS oraz REACH.

UWAGA: Produkt spełnia wymagania klasyfikacji IPX4 (IEC 60529).

UWAGA: Produkt i jego elementy nie zawierają lateksu z kauczuku naturalnego. Przed zastosowaniem nieoryginalnych akcesoriów należy skonsultować się z producentem.

Spis treści

Wstęp.....	4
Bezpieczeństwo.....	5
Podnóżki.....	6
Odchylane podnóżki	7
Podnóżki wpuszczane.....	8
Podnoszone podnóżki	8
Wieloosiowe płyty podnóżków.....	10
Regulowany podnóżek z montażem środkowym.....	11
Elektrycznie podnoszone podnóżki.....	12
Elektrycznie uchylne podnóżki	13
Odchylane elektrycznie uchylne podnóżki	13
Uchylny podnóżek z montażem środkowym.....	14
Odchylane poduszki na łydki	14

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKREŚLONYCH PODZESPOŁÓW WŁĄCZONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO GOTOWYCH WÓZKÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM: Jeśli zespoły napędowe, systemy siedziska lub inne podzespoły są częścią gotowego wózka z napędem elektrycznym wyprodukowanego lub składanego przez dowolny podmiot zewnętrzny, ten podmiot zewnętrzny jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i zgodności z prawem gotowego wózka z napędem elektrycznym. Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa, funkcjonalności ani zgodności z prawem gotowego wózka z napędem elektrycznym ani jego podzespołów wyprodukowanych przez podmiot zewnętrzny. Chociaż dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedzialnej dystrybucji jej podzespołów, producentów, dystrybutorów i konsumentów informuje się, iż gotowe wózki z napędem elektrycznym muszą być zgodne z różnymi normami i wymogami w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Jeśli konieczna jest fizyczna modyfikacja wózka z napędem elektrycznym, na przykład dodanie podzespołów firmy zewnętrznej, w celu zaspokojenia potrzeb medycznych użytkownika wózka z napędem elektrycznym, należy przeprowadzić ocenę ryzyka zgodnie z normą ISO 14971, jak opisano w normie ISO_ DIS_7176-19 (wydanie wstępne).

Do zmian w wózkach z napędem elektrycznym, które mogą wpłynąć na zgodność i ocenę ryzyka, należą między innymi następujące: zmiana pozycji wsporników punktów mocowania, obniżenie wysokości oparcia, skrócenie siedziska, dodanie dodatkowych elementów wsparcia postawy, które nie są na stałe przytwierdzone do wózka z napędem elektrycznym, dodanie elementów o ostrych krawędziach (tj. krawędzi o promieniu poniżej 2 mm [0,08 in.]), każda zmiana, która narusza integralność strukturalną ramy wózka z napędem elektrycznym.

Wstęp

WITAMY w Pride Mobility Products (Pride). Zakupiony przez Państwa produkt łączy w sobie najnowocześniejsze elementy z **bezpieczeństwem**, wygodą i stylem. Jesteśmy przekonani, że te cechy konstrukcyjne zapewnią Państwu oczekiwaną wygodę w codziennym życiu. Zapoznanie się z zasadami **bezpiecznej** obsługi i pielęgnacji produktu powinno zapewnić wiele lat bezproblemowej eksploatacji.

Przed pierwszym użyciem produktu należy **przeczytać** wszystkie instrukcje, ostrzeżenia i uwagi zawarte w niniejszej instrukcji oraz ich **przestrzegać**. Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia konieczne jest również przeczytanie wszystkich instrukcji, ostrzeżeń i uwag zawartych we wszystkich dodatkowych broszurach instruktażowych dotyczących sterownika, podnóżków i/lub systemu siedziska, dostarczonych wraz z wózkiem z napędem elektrycznym. **Bezpieczeństwo** użytkownika zależy zarówno od samego użytkownika, jak i jego dostawcy, opiekuna lub fachowego personelu medycznego — wszystkie strony muszą postępować z zachowaniem zdrowego rozsądku.

Niniejsza instrukcja stanowi dodatek do instrukcji użytkownika zespołu napędowego dostarczonej wraz z wózkiem z napędem elektrycznym. Jeśli jakiegokolwiek informacje zawarte w niniejszej instrukcji są niezrozumiałe lub konieczna jest dodatkowa pomoc w zakresie konfiguracji lub obsługi, należy skontaktować się z dostawcą produktów Pride / Quantum Rehab. **Nieprzestrzeganie instrukcji, ostrzeżeń i uwag w niniejszym dokumencie oraz tych umieszczonych na produkcie firmy Pride może doprowadzić do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia produktu i unieważnia gwarancję produktu firmy Pride.**

Zobowiązanie nabywcy

Poprzez przyjęcie dostawy produktu nabywca zobowiązuje się, że nie będzie wprowadzać żadnych zmian w produkcie ani usuwać bądź dezaktywować żadnych osłon, zabezpieczeń ani żadnych innych funkcji bezpieczeństwa produktu. Ponadto nabywca zobowiązuje się instalować wszelkie zestawy modernizacyjne, które firma Pride może zapewniać w celu ulepszenia lub zachowania bezpieczeństwa produktu.



Bezpieczeństwo

Poniższe symbole znajdują się na produkcie i wskazują na ostrzeżenia, czynności obowiązkowe i czynności zakazane. Należy bezwzględnie się z nimi w pełni zapoznać i je zrozumieć.



Należy przeczytać instrukcję użytkownika i jej przestrzegać.



Należy w miarę możliwości zapobiegać narażeniu urządzenia na deszcz, śnieg, lód, sól lub stojącą wodę. Wózek należy utrzymywać w czystym i suchym stanie.



EMI/RFI — przeszedł pomyślnie testy odporności na poziomie 20 V/m.

Zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe

OSTRZEŻENIE!

Badania laboratoryjne wykazały, że fale elektromagnetyczne i radiowe mogą mieć negatywny wpływ na wydajność elektrycznych wózków inwalidzkich.

Zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radiostacje, stacje telewizyjne, amatorskie nadajniki radiowe (HAM), bezprzewodowe łącza komputerowe, sygnały mikrofalowe, transmistery systemów przywoławczych oraz mobilne aparaty nadawczo-odbiorcze średniego zasięgu używane przez pojazdy ratunkowe. W niektórych przypadkach fale te mogą powodować niezamierzony ruch lub uszkodzić system sterowania. Wszystkie elektryczne wózki inwalidzkie mają pewien poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Im większy poziom odporności, tym większa ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Produkt przeszedł pomyślnie testy na poziom odporności 20 V/m.

OSTRZEŻENIE!

Należy mieć świadomość, że telefony komórkowe, krótkofalówki, laptopy, generatory prądu lub źródła o wysokiej mocy i inne rodzaje nadajników radiowych mogą powodować niezamierzony ruch elektrycznego wózka inwalidzkiego z powodu zakłóceń elektromagnetycznych. Gdy wózek inwalidzki z napędem elektrycznym jest włączony, nie wolno włączać podręcznych urządzeń do komunikacji, takich jak CB

OSTRZEŻENIE!

Nie wolno próbować podnosić ani przenosić wózka z napędem elektrycznym ani systemu siedziska, chwytając lub trzymając za jakiegokolwiek części demontowalne, w tym podłokietniki, podnóżki, poduszki siedziska, oparcie siedziska, osłony lub sterownik. W celu podniesienia lub przeniesienia wózka lub systemu siedziska należy chwycić wyłącznie za solidne, niedemontowalne elementy ramy.

Radio i telefony komórkowe. Należy zwracać uwagę na znajdujące się w pobliżu nadajniki, takie jak stacje radiowe lub telewizyjne, i unikać zbliżania się do nich.

OSTRZEŻENIE!

Dodanie akcesoriów lub elementów do elektrycznego wózka inwalidzkiego może zwiększyć jego podatność na zakłócenia elektromagnetyczne. Nie wolno modyfikować wózka z napędem elektrycznym w żaden sposób niezatwierdzony przez firmę Pride.

Sam elektryczny wózek może zakłócać wydajność innych znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych, takich jak systemy alarmowe.


UWAGA: Więcej informacji dotyczących zakłóceń elektromagnetycznych/radiowych znajduje się w sekcji Resource Center na stronie www.pridemobility.com. W przypadku wystąpienia niezamierzonego ruchu lub zadziałania hamulców należy możliwie najszybciej wyłączyć wózek z napędem elektrycznym, jeśli jest to bezpieczne. W celu zgłoszenia zdarzenia należy skontaktować się z firmą Pride lub dostawcą produktów Pride / Quantum Rehab.

Podnóżki


Rysunek 1 zawiera informacje dotyczące dostępnych elementów podnóżków. Przed użyciem podnóżków należy za pomocą tego schematu zapoznać się z funkcją każdego elementu.

SWING-AWAY FOOTRESTS


Enable user to rotate the footrests to the side before transferring onto or off the power chair.

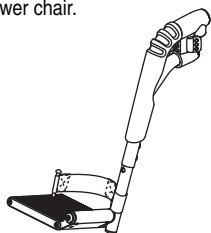


Swing-away Footrest

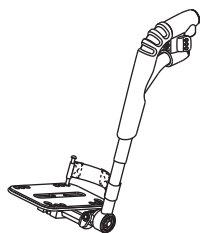

Swing-away Footrest with Multi-axis Foot Plate

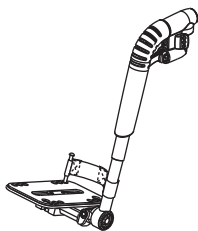


60°-90°

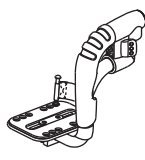


Pediatric

ELEVATING LEG RESTS


Offer an infinite range of adjustment for the leg angle.

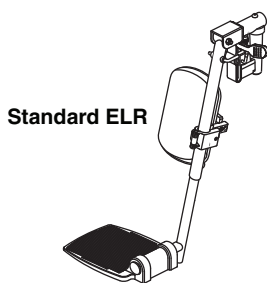

Standard ELR

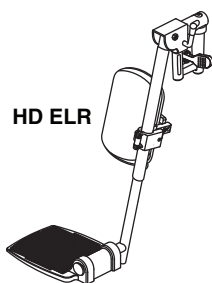


HD ELR

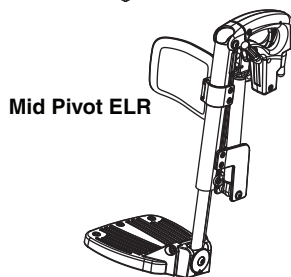

Mid Pivot ELR


DROP-IN LEG RESTS

Heavy Duty with Multi-axis Foot Plate

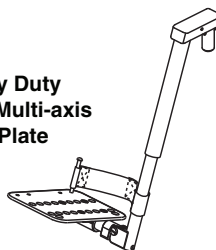


HIGH PIVOT POWER ELEVATING LEG RESTS (ELR)

Mimic the motion of the knee during leg elevation.

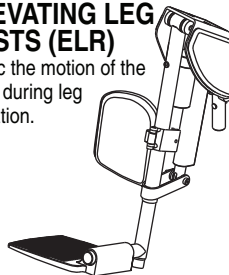


SWING-AWAY POWER ARTICULATING LEG RESTS (ALR)

Maintain correct knee-to-heel measurements when user's legs are raised or lowered.

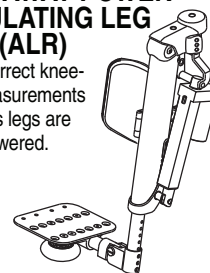


MID PIVOT POWER ELEVATING LEG RESTS (ELR)

Mimic the motion of the knee during leg elevation.

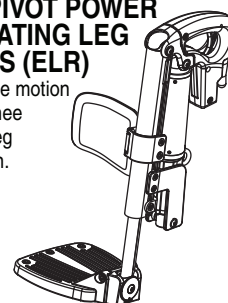


ADJUSTABLE CENTER-MOUNT FOOT PLATFORM

Installed directly on the seating system to accommodate users who require a positioning system and prefer a foot platform.

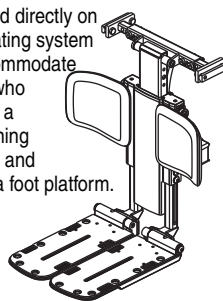


CENTER-MOUNT ARTICULATING FOOT PLATFORM (AFP)

Maintains correct knee-to-heel measurements when user's legs are raised or lowered.

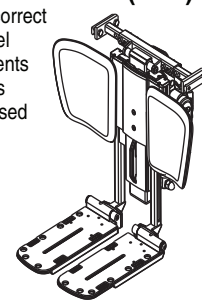


BASIC CENTER-MOUNT FOOT PLATFORM

Installed directly on the seating system to accommodate users who require a positioning system and prefer a foot platform.

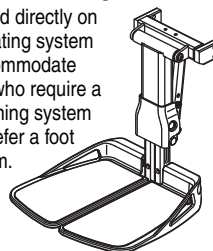

POWER ARTICULATING LEG RESTS (ALR)

Maintain correct knee-to-heel measurements when user's legs are raised or lowered.

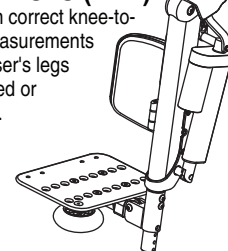

Rysunek 1. Podnóżki

Odchylane podnóżki

Odchylane podnóżki umożliwiają obracanie ich na bok przed przesiadką na wózek lub z wózka.

Aby obrócić odchylane podnóżki:

1. Popchnąć dźwignię zwalniającą do środka.
2. Obrócić odchylane podnóżki.

Aby zmienić długość odchylanych podnóżków:


1. Wymontować śruby regulujące z rury przedłużającej podnóżek. **Patrz rysunki 2 lub 3.**
2. Przesuwać podnóżkiem w górę lub w dół w celu ustawienia go w żądanej pozycji.
3. Zamontować ponownie śruby regulujące.

Aby zmienić kąt płyty podnóżka:


1. Poluzować elementy łączne na spodzie płyty podnóżka. **Patrz rysunek 4.**
2. Dostosować płytę podnóżka do wymaganej pozycji. **Patrz rysunek 4.**
3. Dokręcić elementy łączne na spodzie płyty podnóżka.

Aby zmienić kąt odchylanego podnóżka w przypadku podnóżków 60°–90°:


1. Zdjąć piankową osłonę. **Patrz rysunek 5.**
2. Wymontować śrubę z niepełnym gwintem. **Patrz rysunek 5.**
3. Ustawić odchylaną podnóżek do wymaganego kąta.
4. Zamontować ponownie śrubę z niepełnym gwintem. **Patrz rysunek 5.**
5. Zamontować ponownie piankową osłonę.

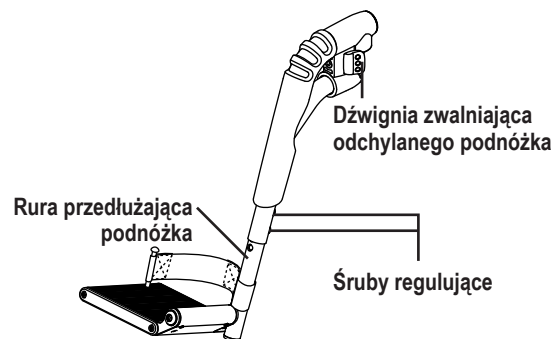

Rysunek 2. Regulacja odchylanego podnóżka

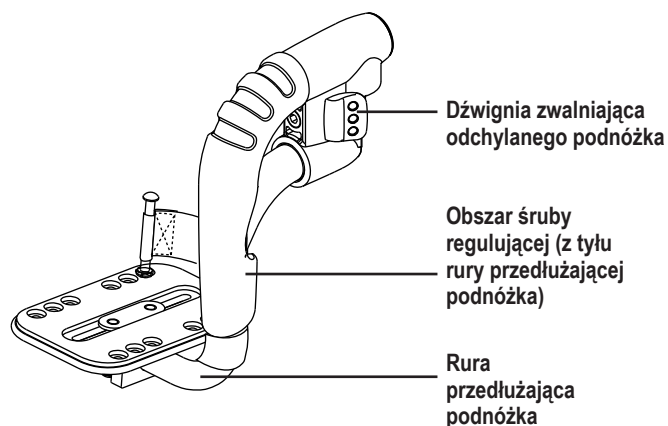

Rysunek 3. Regulacja podnóżka dla dzieci

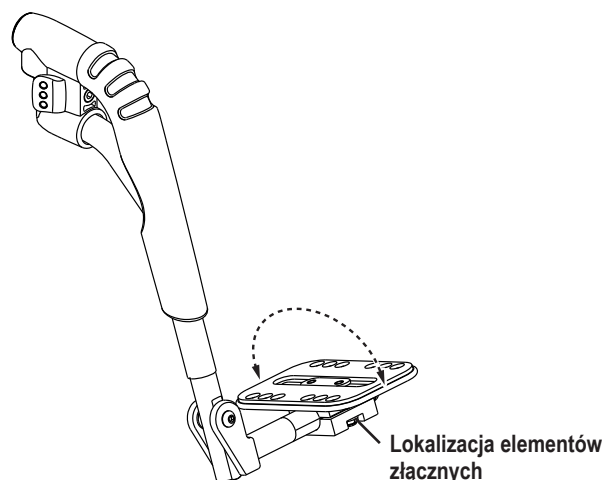

Rysunek 4. Regulacja kąta podnóżka

Podnóżki wpuszczane

Podnóżki wpuszczane bardzo łatwo instaluje się w uchwytach podnóżków. Możliwa jest regulacja pozycji przód/tył, a także długości podnóżków wpuszczanych. **Patrz rysunek 6.**

Aby dostosować pozycję przód/tył:

1. Usunąć śrubę regulującą z każdej szyny bocznej.
2. Przesunąć uchwyt podnóżka w stronę do środka lub na zewnątrz w celu ustawienia go w żądanej pozycji.
3. Wyrównać otwory regulujące w uchwycie podnóżka z otworami w szynie bocznej.
4. Zamontować ponownie śruby regulujące, aby zabezpieczyć uchwyty podnóżków.

Aby zmienić wysokość podnóżka:

1. Wymontować śruby regulujące z rury przedłużającej podnóżek.
2. Przesuwać podnóżkiem w górę lub w dół w celu ustawienia go w żądanej pozycji.
3. Wyrównać otwory regulujące w rurze przedłużającej podnóżka i zamontować ponownie śruby regulujące.

Podnoszone podnóżki

Podnoszone podnóżki zapewniają płynny zakres regulacji kąta.

Aby obrócić podnoszone podnóżki:

1. Popchnąć dźwignię zwalniającą A do środka.
2. Obracać podnoszonymi podnóżkami.

Aby zmienić kąt podnoszonych podnóżków standardowych lub do pracy w trudnych warunkach:


1. Popchnąć w dół dźwignię zwalniającą B. **Patrz rysunek 7.**
2. Przesunąć podnóżek do żądanego kąta.

Aby zmienić długość podnoszonych podnóżków:


1. Wymontować dwie śruby regulujące z boku każdej rury przedłużającej podnóżek. **Patrz rysunek 7.**
2. Przesuwać podnóżkiem w górę lub w dół w celu ustawienia go w żądanej pozycji.
3. Zamontować ponownie dwie śruby regulujące.

Aby zmienić długość podnoszonych podnóżków:


1. Poluzować śrubę regulującą, aż pręt przedłużający podnóżka się odłączy. **Patrz rysunek 8.**
2. Przesuwać pręt przedłużający podnóżka do żądanej wysokości.
3. Upewnić się, że śruba regulująca wchodzi w otwór pręta przedłużającego podnóżka.
4. Dokręcić śrubę regulującą.

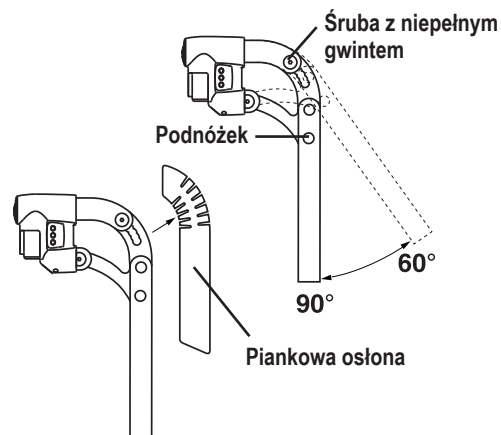


Rysunek 5. Podnóżki odchylane 60°–90°

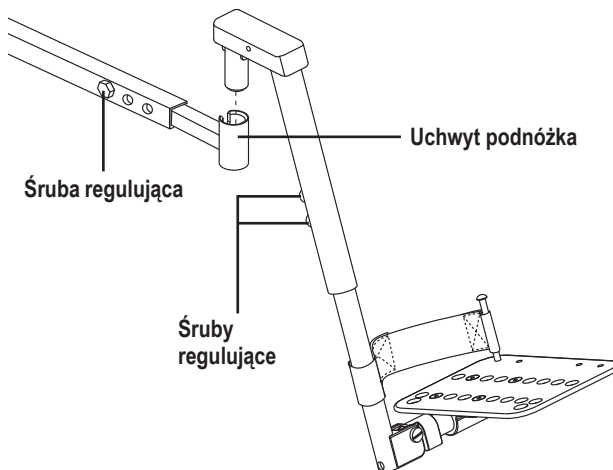

Rysunek 6. Podnóżki wpuszczane do trudnych warunków

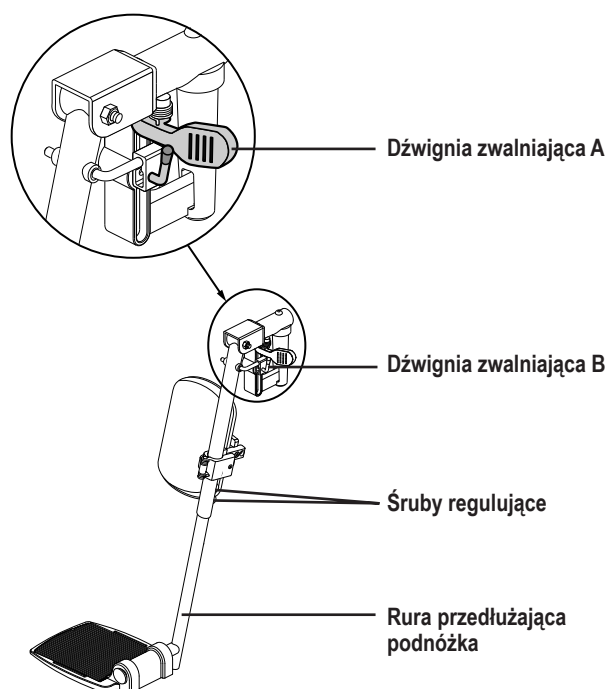

Rysunek 7. Standardowe podnoszone podnóżki

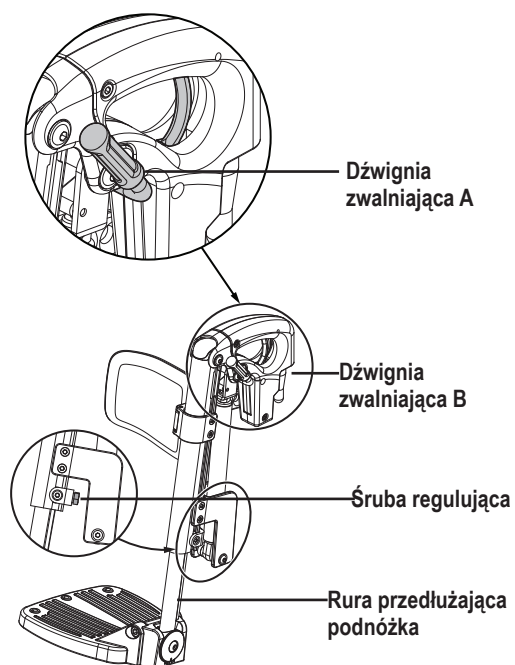

Rysunek 8. Podnoszone podnóżki ze środkową osią obrotu



Wieloosiowe płyty podnóżków

Wieloosiowe płyty podnóżków można instalować na standardowych podnoszonych podnóżkach lub odchylanych podnóżkach. Wieloosiowe płyty podnóżków mają cztery opcje regulacji: długość podnóżka (A), pozycja (B), odchylenie (C) i kąt (D). **Patrz rysunek 9.**

Aby zmienić długość podnóżka (A):

1. Wymontować (poluzować na odchylanych podnóżkach) elementy złączne.
2. Przesunąć podnóżek do żądanej pozycji.
3. Ponownie zamontować (dokręcić na odchylanych podnóżkach) elementy złączne.

Aby zmienić pozycję płyty podnóżka (B):


1. Wymontować (poluzować na odchylanych podnóżkach) elementy złączne.
2. Przesunąć płytę podnóżka do wymaganej pozycji.
3. Ponownie zamontować (dokręcić na odchylanych podnóżkach) elementy złączne.

Aby zmienić odchylenie płyty podnóżka i kąt na odchylanych podnóżkach (C):

1. Poluzować elementy złączne.
2. Odchylić (obrócić na odchylanych podnóżkach) płytę podnóżka do żądanej pozycji.
3. Dokręcić elementy złączne.

Aby zmienić kąt płyty podnóżka na podnoszonych podnóżkach (D):

1. Kręcić śrubami ustalającymi w prawo, aby zmniejszać kąt.
2. Kręcić śrubami ustalającymi w lewo, aby zwiększać kąt.

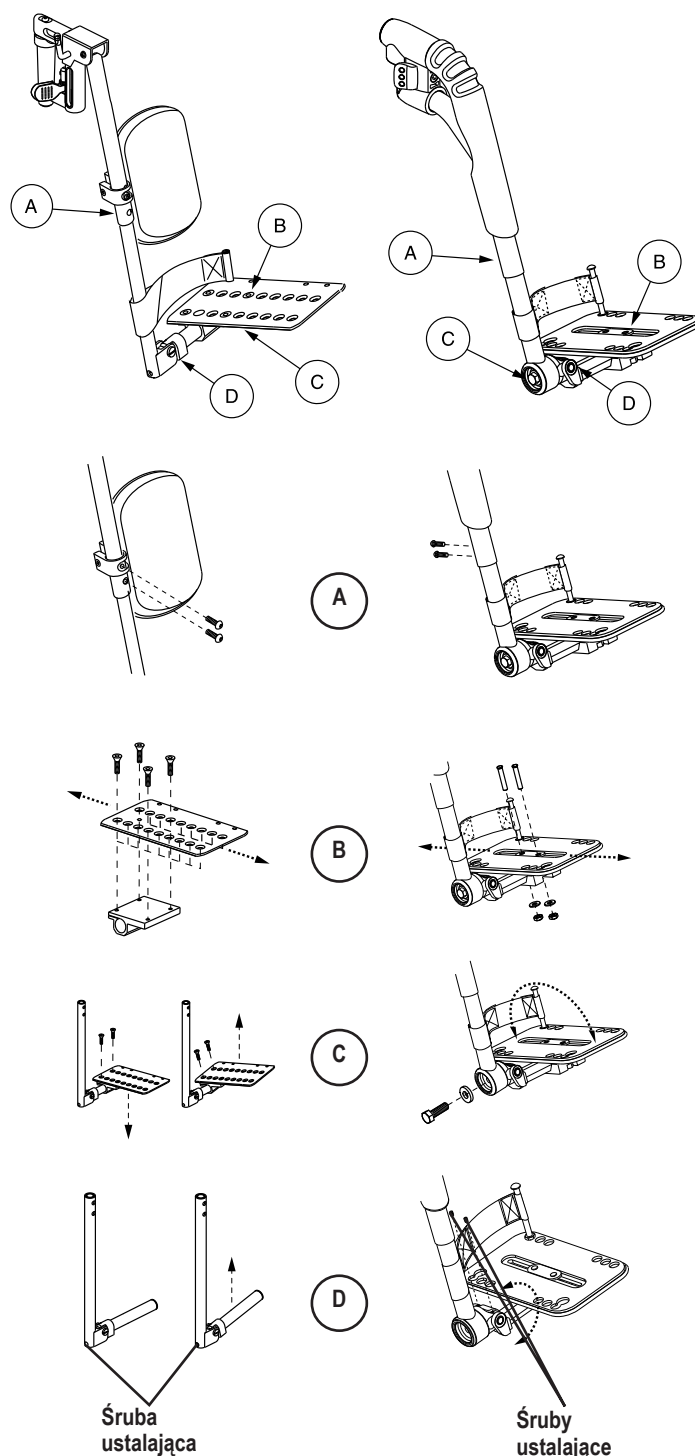

Rysunek 9. Wieloosiowa płyta podnóżka do podnoszonego podnóżka (lewa) oraz do odchylanego podnóżka (prawa)

Regulowany podnóżek z montażem środkowym

Regulowany podnóżek z montażem środkowym instaluje się bezpośrednio na systemie siedziska i przeznaczony jest dla użytkowników, którzy wymagają systemu pozycjonującego, ale wolą podnóżek w formie platformy. Regulowany podnóżek z montażem środkowym zapewnia regulację wysokości i kąta, a obsługuje się go za pomocą uchwytu regulującego lub dźwigni. Kąt każdej płyty podnóżka można regulować oddzielnie.

Aby dostosować kąt podnóżka za pomocą uchwytu regulującego:

1. Wymontować elementy złączne do regulacji kąta z uchwytu do regulacji kąta. **Patrz rysunek 11.**
2. Ustawić podnóżek do wymaganego kąta. **Patrz rysunek 11.**
3. Ponownie zamontować elementy złączne do regulacji kąta na uchwycie do regulacji kąta i dokręcić.

Aby dostosować kąt podnóżka za pomocą dźwigni:

1. Pociągnąć dźwignię w dół. **Patrz rysunek 11.**
2. Ustawić podnóżek do wymaganego kąta. **Patrz rysunek 11.**

Aby ustawić podnóżek ponownie w pozycji neutralnej:

1. Pociągnąć dźwignię w dół i nacisnąć podnóżek, aby go obniżyć.






Aby dokonać regulacji wysokości podnóżka:

1. Poluzować śruby do regulacji wysokości. **Patrz rysunek 11.**
2. Przesuwać podnóżkiem w górę lub w dół w celu ustawienia go na żądanej wysokości.
3. Dokręcić śruby do regulacji wysokości.
4. W razie potrzeby powtórzyć operację z drugiej strony.

Aby zmienić kąt każdej płyty podnóżka:

1. Podnieść płytę podnóża i zlokalizować śrubę. **Patrz rysunek 10.**
2. Obracać śrubą w celu podniesienia lub obniżenia przedniej części płyty podnóżka.

Elementy złączne do regulacji kąta

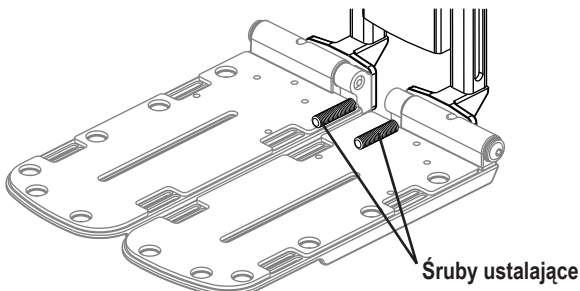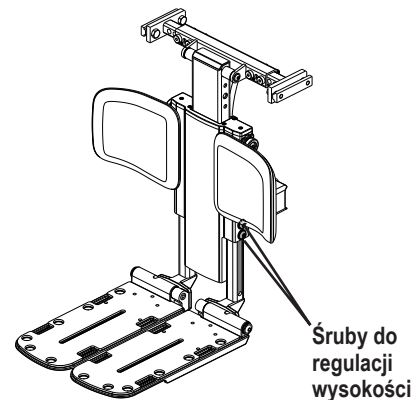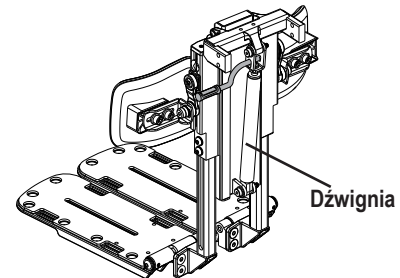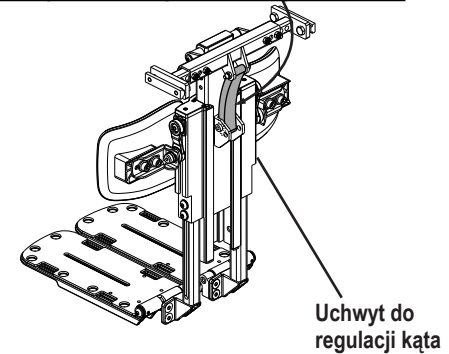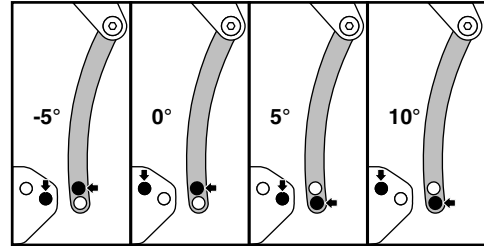

Rysunek 10. Regulacja kąta płyty podnóżka

Rysunek 11. Regulowany podnóżek z montażem środkowym

Elektrycznie podnoszone podnóżki



Elektrycznie podnoszone podnóżki z wysokim punktem obrotu używają wysokiego punktu obrotu, aby lepiej imitować ruch kolana podczas podnoszenia podnóżka. Można regulować oba podnóżki jednocześnie lub osobno. **Patrz rysunek 12.** Elektrycznie podnoszone podnóżki z wysokim punktem obrotu zapewniają ruch w zakresie 80° – 170° , mają standardowe poduszki na łydkę, a ich maksymalne dopuszczalne obciążenie to 136 kg (300 lbs.). Dostępne są do wszystkich zespołów napędowych, które obsługują ulepszone układy elektroniczne i wyposażone są w system TRU-Balance 3. Elektrycznie podnoszone podnóżki z wysokim punktem obrotu obsługuje się za pośrednictwem sterownika wózka z napędem elektrycznym lub przełącznika.

UWAGA: Poniżej przedstawiono instrukcję obsługi z użyciem czterokierunkowego joysticka. W przypadku korzystania z innego przełącznika, modułu sterownika osoby towarzyszącej lub innego urządzenia sterującego należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia i/lub instrukcją użytkownika wózka z napędem elektrycznym.

Obsługa połączonych podnóżków:

1. Przetawić przełącznik w prawo, aby podnieść oba podnóżki.
2. Przetawić przełącznik w prawo, zwolnić, a następnie ponownie przetawić go w prawo, aby obniżyć oba podnóżki.

UWAGA: Informacje dotyczące oddzielnej obsługi poszczególnych elektrycznie podnoszonych podnóżków znajdują się w instrukcji obsługi dotyczącej używanego urządzenia sterującego lub można je uzyskać, kontaktując się z dostawcą produktów Pride / Quantum Rehab.

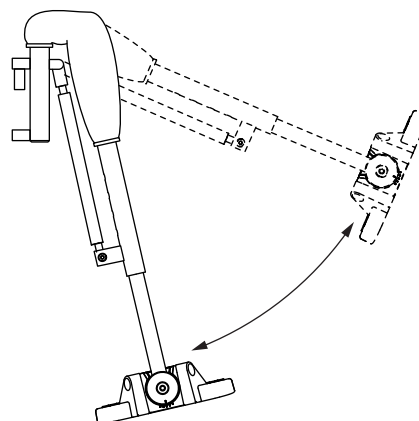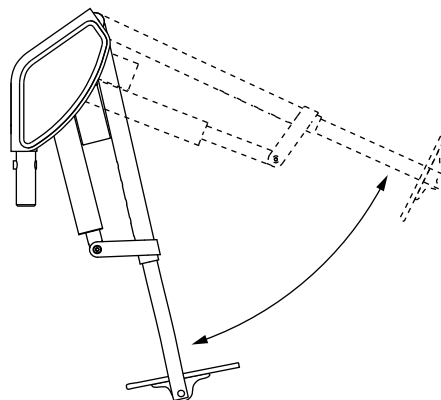

Rysunek 12. Elektrycznie podnoszone podnóżki

Elektrycznie uchylnie podnóżki

Elektrycznie uchylnie podnóżki utrzymują prawidłowe wymiary odcinka między kolanem a piętą, gdy nogi użytkownika są podnoszone. Można regulować oba podnóżki jednocześnie lub osobno. **Patrz rysunek 13.** Elektrycznie uchylnie podnóżki zapewniają ruch w zakresie 70° lub 80°, są wyposażone w standardowe poduszki na łydkę odchylane/z regulacją wysokości i głębokości (**patrz rysunek 17**), umożliwiają instalację wszystkich płyt podnózek, a ich maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 136 kg (300 lbs.). Dostępne są do wszystkich zespołów napędowych, które obsługują ulepszone układy elektroniczne i wyposażone są w system siedziska Synergy. Elektrycznie uchylnie podnóżki obsługuje się za pośrednictwem sterownika wózka z napędem elektrycznym lub przełącznika.

UWAGA: Poniżej przedstawiono instrukcję obsługi z użyciem czterokierunkowego joysticka. W przypadku korzystania z innego przełącznika, modułu sterownika osoby towarzyszącej lub innego urządzenia sterującego należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia i/lub instrukcją użytkownika wózka z napędem elektrycznym.

Obsługa połączonych podnóżków:

1. Przesłać przełącznik w prawo, aby podnieść oba podnóżki.
2. Przesłać przełącznik w prawo, zwolnić, a następnie ponownie przesłać go w prawo, aby obniżyć oba podnóżki.


UWAGA: Informacje dotyczące oddzielnej obsługi poszczególnych elektrycznie uchylnych podnóżków znajdują się w instrukcji obsługi dotyczącej używanego urządzenia sterującego lub można je uzyskać, kontaktując się z dostawcą produktów Pride / Quantum Rehab.

Odchylane elektrycznie uchylnie podnóżki


Odchylane elektrycznie uchylnie podnóżki obsługuje się w ten sam sposób i mają te same funkcje, co elektrycznie uchylnie podnóżki, lecz mają dodatkową opcję odchylania podnóżków na boki przed przesiadką na wózek lub z wózka.

Aby obrócić odchylane elektrycznie uchylnie podnóżki:

1. Popchnąć dźwignię zwalniającą do środka. **Patrz rysunek 14.**
2. Obrócić podnóżek.

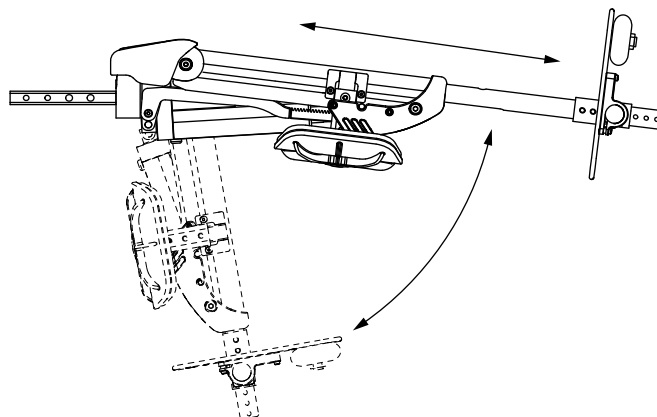

Rysunek 13. Elektrycznie uchylnie podnóżki

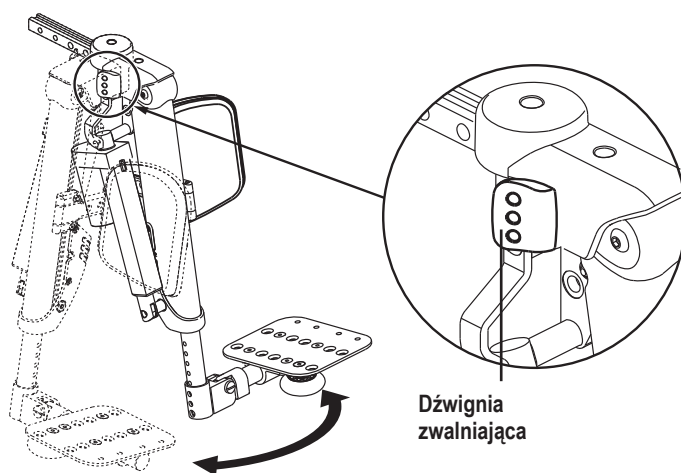

Rysunek 14. Odchylane elektrycznie uchylnie podnóżki

Uchylny podnóżek z montażem środkowym

Uchylny podnóżek z montażem środkowym utrzymuje prawidłowe wymiary odcinka między kolanem a piętą, gdy nogi użytkownika są podnoszone. **Patrz rysunek 15.** Uchylny podnóżek z montażem środkowym podnosi się do 170°, jest wyposażony w standardowe poduszki na łydki z regulacją głębokości i wysokości (**patrz rysunek 17**), jego maksymalne dopuszczalne obciążenie to 204 kg (450 lbs.), a zakres temperatury roboczej to 4°C (40°F) do 40°C (105°C). Jest dostępny wraz ze wszystkimi elektrycznymi systemami pozycjonującymi TRU-Balance oraz systemem siedziska Synergy. Uchylny podnóżek obsługuje się za pośrednictwem sterownika wózka z napędem elektrycznym lub przełącznika.

UWAGA: Poniżej przedstawiono instrukcję obsługi z użyciem czterokierunkowego joysticka. W przypadku korzystania z innego przełącznika, modułu sterownika osoby towarzyszącej lub innego urządzenia sterującego należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia i/lub instrukcją użytkownika wózka z napędem elektrycznym.

Obsługa uchylnego podnóżka z montażem środkowym:

1. Przetawić przełącznik w prawo, aby podnieść uchylny podnóżek z montażem środkowym.
2. Przetawić przełącznik w prawo, zwolnić, a następnie ponownie przestawić go w prawo, aby obniżyć uchylny podnóżek z montażem środkowym.

Aby zmienić kąt każdej płyty podnóżka:

1. Podnieść płytę podnóża i zlokalizować śrubę. **Patrz rysunek 16.**
2. Obracać śrubą w celu podniesienia lub obniżenia przedniej części płyty podnóżka.

Odchylane poduszki na łydki


Kilka podnóżków jest wyposażonych w odchylane poduszki na łydki, które zapewniają regulację wysokości i głębokości.

Aby zmienić wysokość odchylanej poduszki na łydkę:


1. Wymontować śruby do regulacji wysokości. **Patrz rysunek 17.**
2. Przesunąć poduszkę na łydkę w górę lub w dół do żądanej wysokości.
3. Zamontować ponownie śruby do regulacji wysokości i dokręcić.

Aby zmienić głębokość odchylanej poduszki na łydkę:


1. Wymontować śrubę do regulacji głębokości. **Patrz rysunek 17.**
2. Przesunąć poduszkę na łydkę w stronę do środka lub na zewnątrz do żądanej głębokości.
3. Zamontować ponownie śrubę do regulacji głębokości i dokręcić.

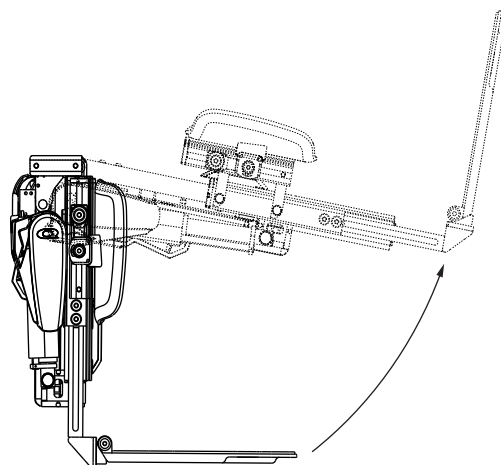

Rysunek 15. Uchylny podnóżek z montażem środkowym

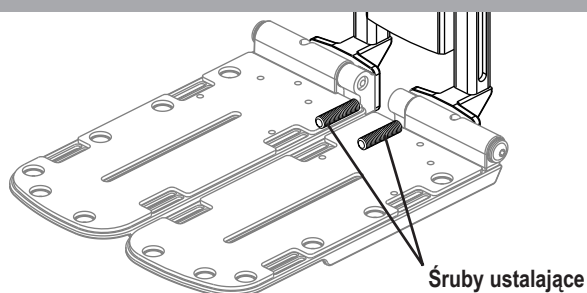

Rysunek 16. Regulacja kąta płyty podnóżka

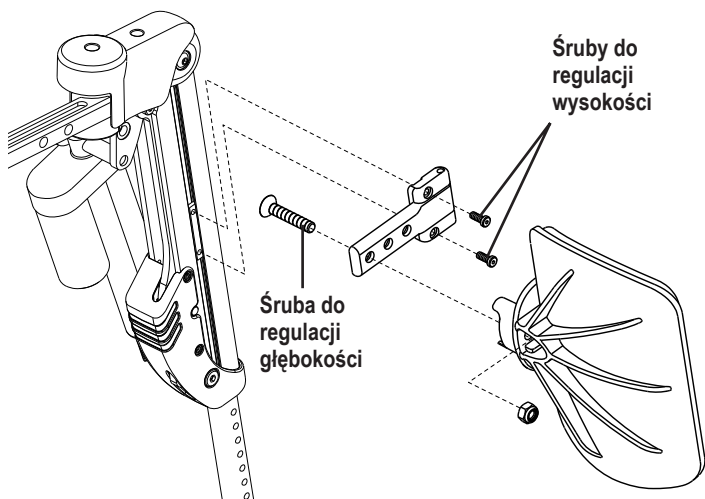

Rysunek 17. Regulacja odchylanej poduszki na łydkę (na ilustracji uchylny podnóżek)



FRONT RIGGINGS

USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.quantumrehab.com

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
www.quantumrehab.ca

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.quantumrehab.com.au

New Zealand

Unit 5/208 Swanson Road
Henderson, Auckland 0610
www.pridemobility.co.nz

UK

(Authorised UK Representative)
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.quantumrehab.co.uk

The Netherlands

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.quantumrehab.eu
www.quantumrehab.nl

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.quantumrehab-italia.it

France

26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.quantumrehab.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.quantumrehab.es

Germany

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.quantumrehab.de

China

Room 508, Building #4
TianNa Business Zone
No. 500 Jianyun Road
Pudong New Area
Shanghai 201318
www.pridechina.cn



I N F M A N U 5 2 9 2