

Q6 Edge 3 STRETTO

Instrukcja Użytkownika



STEROWNIK Q-LOGIC 3



ŚWIATŁA LED NA
BŁOTNIKU



KOLOROWE KOŁPAKI

QUANTUM®

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

⚠ OSTRZEŻENIE!

Wstępną konfigurację wózka z napędem elektrycznym oraz wszystkie procedury opisane w niniejszej instrukcji przeprowadza dostawca produktów firmy Quantum Rehab lub wykwalifikowany technik.

Poniższe symbole są używane w niniejszej instrukcji użytkownika oraz na wózku z napędem elektrycznym w celu zwrócenia uwagi na ostrzeżenia i ważne informacje. Należy bezwzględnie się z nimi w pełni zapoznać i je zrozumieć.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Oznacza potencjalnie niebezpieczne warunki / niebezpieczną sytuację. Nieprzestrzeganie wskazanych procedur może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie elementów lub nieprawidłowe działanie. Na produkcie ikona ta ma formę czarnego symbolu w żółtym trójkącie z czarną obwódką.

Ⓚ CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Czynności te należy przeprowadzić zgodnie z opisem. Niewykonanie czynności obowiązkowych może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie urządzenia. Na produkcie ikona ta ma formę białego symbolu w niebieskim punkcie z białą obwódką.

⊘ CZYNNOŚĆ ZAKAZANA!

Czynności te są zabronione. Pod żadnym pozorem nie wolno ich wykonywać. Wykonanie czynności zakazanej może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie urządzenia. Na produkcie ikona ta ma formę czarnego symbolu w czerwonym kole z czerwonym przekreśleniem.

Przeznaczenie

Urządzenie z serii Pride Mobility ma na celu zapewnienie mobilności u osób ograniczonych do pozycji siedzącej, które są zdolne do obsługi wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym.

Dane referencyjne

Dostawca produktów Quantum Rehab: _____

Adres: _____

Numer telefonu: _____

Data zakupu: _____

Dotyczy urządzeń do stosowania zgodnie z zaleceniami

⚠ OSTRZEŻENIE!

PRZESTROGA! Prawo federalne zezwala na sprzedaż niniejszego wyrobu wyłącznie lekarzowi lub z przepisu lekarza bądź innemu certyfikowanemu personelowi posiadającemu licencję na mocy prawa stanowego (dot. wyłącznie USA) lub lokalnego prawa właściwego dla miejsca, w którym personel ten użytkuje lub zleca użytkowanie urządzenia.

UWAGA: Niniejsza instrukcja użytkownika została sporządzona na podstawie najnowszych specyfikacji i informacji o produkcie dostępnych w momencie jej publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian w produkcie. Wszelkie zmiany w naszych produktach mogą powodować nieznaczne różnice między ilustracjami/ opisami w niniejszej instrukcji a zakupionym produktem. Najnowsza/aktualna wersja niniejszej instrukcji jest dostępna na naszej witrynie.

UWAGA: Produkt jest zgodny z dyrektywami i wymogami WEEE, RoHS oraz REACH.

UWAGA: Produkt spełnia wymagania klasyfikacji IPX4 (IEC 60529).

UWAGA: Produkt i jego elementy nie zawierają lateksu z kauczuku naturalnego. Przed zastosowaniem nieoryginalnych akcesoriów należy skonsultować się z producentem.



Spis treści


Wstęp.....	5
Bezpieczeństwo.....	6
Twój wózek z napędem elektrycznym	7
Montaż	11
Regulacje w zakresie wygody użytkownika.....	13
Akumulatory i ładowanie	15
Pielęgnacja i konserwacja	18

OŚWIADCZENIE DORADCZE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH KOMPONENTÓW WBUDOWANYCH PRZEZ PRODUCENTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO GOTOWYCH WÓZKÓW ELEKTRYCZNYCH: W przypadku gdy elektryczne bazy jezdne, systemy siedzisk lub inne elementy wyprodukowane lub zmontowane przez jakąkolwiek stronę trzecią, są wbudowywane w gotowy wózek elektryczny, ta strona trzecia jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i zgodności z prawem gotowego wózka elektrycznego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, funkcjonalność lub zgodność z prawem gotowego wózka elektrycznego lub jego elementów wyprodukowanych przez stronę trzecią. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty i części były dystrybuowane w sposób odpowiedzialny, producentom, dystrybutorom i konsumentom przypominamy, że gotowe wózki elektryczne muszą być zgodne z różnymi normami i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Jeśli wykonywana jest fizyczna modyfikacja wózka elektrycznego, w tym dodanie innych części/akcesoriów strony trzeciej (innego producenta), konieczne jest wykonanie ponownej oceny ryzyka dla wózka elektrycznego zgodnie z normą ISO 14971, jak określono w ISO_DIS_7176-19 (wstępne wydanie).

Zmiany w wózkach elektrycznych, które mogą mieć wpływ na zgodność i ocenę ryzyka, obejmują między innymi: przesuwanie wsporników punktów mocowania; obniżenie wysokości oparcia pleców; skrócenie długości siedziska; dodanie dodatkowych wsparć tułowia, które nie są mocno przymocowane do wózka elektrycznego; dodawanie komponentów, które mają ostre krawędzie (tj. krawędzie o promieniu mniejszym niż 0,08 cala [2 mm]); lub wszelkie zmiany, które naruszają integralność strukturalną ramy wózka elektrycznego.

ZESPÓŁ SIEDZISKA

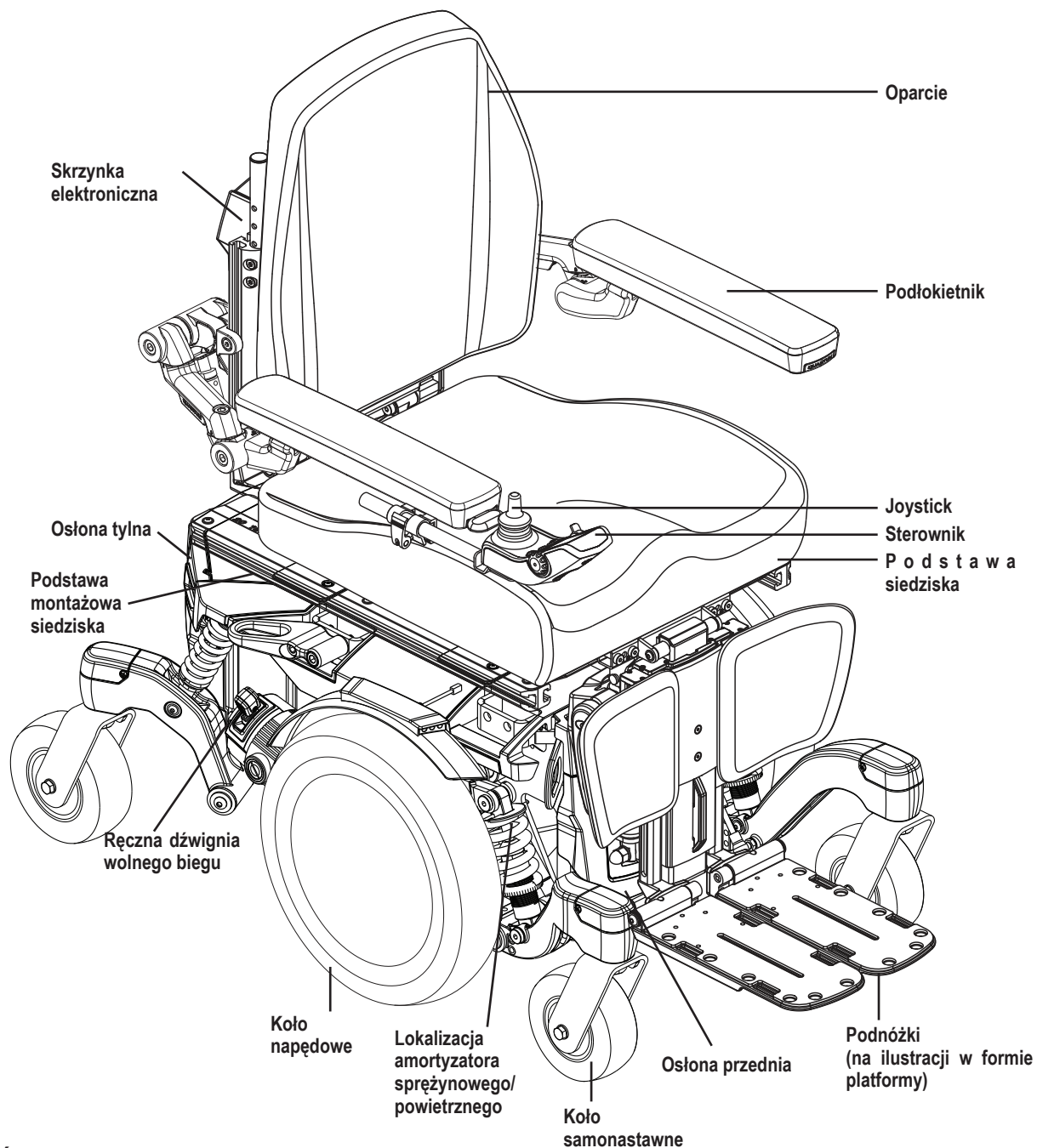

Bezpieczeństwo

WITAMY w Quantum Rehab. Zakupiony przez Państwa wózek z napędem elektrycznym łączy w sobie najnowocześniejsze elementy z **bezpieczeństwem**, wygodą i stylem. Jesteśmy przekonani, że te cechy konstrukcyjne zapewnią Państwu oczekiwaną wygodę w codziennym życiu. Zapoznanie się z zasadami **bezpiecznej** obsługi i pielęgnacji wózka z napędem elektrycznym powinno zapewnić wiele lat bezproblemowej eksploatacji urządzenia.

Przed pierwszym użyciem wózka z napędem elektrycznym należy **przeczytać** wszystkie instrukcje, ostrzeżenia i uwagi zawarte w niniejszej instrukcji oraz ich **przestrzegać**. Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia konieczne jest również przeczytanie wszystkich instrukcji, ostrzeżeń i uwag zawartych we wszystkich dodatkowych broszurach instruktażowych dotyczących sterownika, podnóżków i/ lub systemu siedziska, dostarczonych wraz z wózkiem z napędem elektrycznym. **Bezpieczeństwo** użytkownika zależy zarówno od samego użytkownika, jak i jego dostawcy, opiekuna lub fachowego personelu medycznego — wszystkie strony muszą postępować z zachowaniem zdrowego rozsądku.

Jeśli jakiegokolwiek informacje zawarte w niniejszej instrukcji są niezrozumiałe lub konieczna jest dodatkowa pomoc w zakresie konfiguracji lub obsługi, należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab. **Nieprzestrzeganie poleceń zawartych w niniejszej instrukcji oraz tych znajdujących się na wózku z napędem elektrycznym może spowodować obrażenia ciała i/ lub uszkodzenie wózka z napędem elektrycznym, w tym unieważnienie gwarancji.**

Zobowiązanie nabywcy

Poprzez przyjęcie dostawy produktu nabywca zobowiązuje się, że nie będzie wprowadzać żadnych zmian w produkcie ani usuwać bądź dezaktywować żadnych osłon, zabezpieczeń ani żadnych innych funkcji bezpieczeństwa produktu. Ponadto nabywca zobowiązuje się instalować wszelkie zestawy modernizacyjne, które firma Quantum może zapewniać w celu ulepszenia lub zachowania bezpieczeństwa produktu.

Wysyłka i dostawa

Przed użyciem wózka z napędem elektrycznym należy upewnić się, że dostawa jest kompletna, ponieważ niektóre elementy są pakowane oddzielnie. W przypadku niekompletnej dostawy należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab. Jeśli podczas transportu doszło do uszkodzeń opakowania lub jego zawartości, należy skontaktować się z firmą przewozową odpowiedzialną za transport.

UWAGA: W przypadku utraty lub zagubienia egzemplarza niniejszej instrukcji należy skontaktować się z producentem w celu niezwłocznego otrzymania nowej.



Symbole dot. bezpieczeństwa na produkcie

Poniższe symbole znajdują się na wózku z napędem elektrycznym i wskazują na ostrzeżenia, czynności obowiązkowe i czynności zakazane. Należy bezwzględnie się z nimi w pełni zapoznać i je zrozumieć.

UWAGA: Więcej ostrzeżeń zidentyfikowano i wyjaśniono w Przewodniku bezpieczeństwa dla konsumenta, który dołączono do wózka z napędem elektrycznym. Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa znajdującymi się w Przewodniku bezpieczeństwa dla konsumenta i często z niego korzystać.



Należy przeczytać instrukcję użytkownika i jej przestrzegać.

Urządzenie zablokowane oraz w trybie jazdy.



Podczas zmiany z trybu jazdy na tryb wolnego biegu lub z trybu wolnego biegu na tryb jazdy należy ustawić wózek na równym podłożu i stanąć po jednej jego stronie.

Urządzenie odblokowane oraz w trybie wolnego biegu.



Oznacza punkty mocowania wózka z napędem elektrycznym.



Oznacza, że wózek z napędem elektrycznym, o podobnie oznakowanym systemie siedziska, jest zgodny z normą ANSI/RESNA WC/Vol. 4, Section 19, w zakresie transportu wózka z napędem elektrycznym w pojeździe mechanicznym, gdy na wózku siedzi jego użytkownik.



Oznacza, że wózek z napędem elektrycznym zawierający podobne oznakowanie nie nadaje się do transportu z siedzącym na nim użytkownikiem.



Urządzenie klasy II



Kraj produkcji



Tabliczka znamionowa wózka z napędem elektrycznym

Wytyczne ogólne



CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Nie wolno rozpoczynać użytkowania nowego wózka z napędem elektrycznym bez uprzedniego, pełnego zapoznania się i zrozumienia niniejszej instrukcji użytkownika.

Wózek z napędem elektrycznym to najnowszej generacji urządzenie poprawiające jakość życia, opracowane w celu podnoszenia mobilności. Zapewniamy szeroki asortyment produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników wózków z napędem elektrycznym. Należy mieć na uwadze, że odpowiedzialność za ostateczny wybór i decyzję zakupową dotyczącą rodzaju wózka z napędem elektrycznym ponoszą użytkownik wózka z napędem elektrycznym, który jest zdolny do podejmowania takiej decyzji, oraz jego lekarz/fizjoterapeuta.

Przy sporządzaniu niniejszej instrukcji założono, że specjalista ds. urządzeń zwiększających mobilność odpowiednio dostosował wózek z napędem elektrycznym do użytkownika i pomógł lekarzowi/fizjoterapeucie zalecającemu urządzenie i/lub dostawcy produktów Quantum Rehab w procesie instruktażowym w zakresie użytkowania produktu.

Istnieją pewne sytuacje, w tym niektóre choroby, w przypadku których użytkownik wózka z napędem elektrycznym będzie wymagał praktyki w zakresie obsługi wózka w obecności przeszkolonej osoby towarzyszącej. Przeszkoloną osobą towarzyszącą może być członek rodziny lub zawodowy opiekun specjalnie przeszkolony w zakresie pomagania użytkownikowi wózka z napędem elektrycznym w różnych codziennych czynnościach.

Na początku użytkowania wózka z napędem elektrycznym w codziennych czynnościach mogą mieć miejsce sytuacje wymagające praktyki. Należy dać sobie czas, aby wkrótce osiągnąć pełną i pewną kontrolę podczas przekraczania progów drzwi, korzystania z wind, wjeżdżania na podjazdy i zjeżdżania z nich oraz poruszania się po nierównym terenie.

Poniżej opisano środki ostrożności, wskazówki i inne kwestie bezpieczeństwa, które pomogą opanować bezpieczną obsługę wózka z napędem elektrycznym.

Kontrola bezpieczeństwa przed jazdą

Należy poznać sposób działania wózka z napędem elektrycznym i jego funkcje. Przed każdym użyciem zalecamy wykonywanie kontroli bezpieczeństwa, aby upewnić się, że wózek z napędem elektrycznym pracuje płynnie i bezpiecznie.

Przed użyciem wózka z napędem elektrycznym należy wykonać następujące inspekcje:

- Należy sprawdzić, czy ciśnienie w oponach jest prawidłowe. Należy utrzymywać ciśnienie powietrza (psi/bar/kPa) na poziomie wskazanym na każdej oponie, jeśli wózek jest wyposażony w opony pneumatyczne, lecz nie wolno tego ciśnienia przekraczać.
- Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne. Nie mogą być luźne ani skorodowane.

- Sprawdzić wszystkie połączenia sterownika do bazy napędowej. Muszą być odpowiednio przymocowane.
- Sprawdzić hamulce. Patrz rozdział „Pielęgnacja i konserwacja”.
- Sprawdzić stan naładowania akumulatora. Patrz rozdział „Akumulatory i ładowanie”.
- Przed wejściem na wózek z napędem elektrycznym należy upewnić się, że ręczne dźwignie wolnego biegu są ustawione na tryb jazdy.

UWAGA: W przypadku wystąpienia problemu należy zwrócić się do dostawcy produktów Quantum Rehab o pomoc.

Wózek z napędem elektrycznym Q6 Edge 3 Stretto

Wózek z napędem elektrycznym składa się z dwóch głównych zespołów: zespół siedziska i zespół napędowy. Zwykle zespół siedziska zawiera podłokietniki, oparcie siedziska oraz podstawę siedziska. Zespół napędowy zawiera dwa zespoły silnikowe/hamulcowe, dwa koła napędowe, cztery koła samonastawne, dwa akumulatory oraz wiązki kablowe.

Patrz rozdział „Q6 Edge 3 Stretto” (strona 4) i rysunek 1.

Elementy elektryczne

Elementy elektryczne obejmują zespół sterownika, akumulatory oraz silniki. Akumulatory, silniki i moduł zasilający sterownika (jeśli jest obecny) znajdują się na zespole napędowym. Sterownik znajduje się na zespole siedziska. Łączność między sterownikiem a silnikami, akumulatorami i ładowarką akumulatorów zapewnia jedna lub więcej wiązek kablowych. **Patrz rysunek 1.**


Złącze kabla sterownika: Złącze kabla sterownika znajduje się w miejscu, w którym sterownik jest podłączony do zespołu napędowego. Każdy sterownik wykorzystuje inny rodzaj kabla. Niezależnie od rodzaju sterownika wiązkę kablową należy przymocować do zespołu siedziska, aby nie ciągnęła się po podłożu.

Złącza silnika: W tym miejscu sterownik łączy się z silnikami.

Złącze akumulatorów: W tym miejscu sterownik łączy się z akumulatorami.

Moduł zasilający sterownika: Umożliwia komunikację między sterownikiem a akumulatorami i silnikami.

Wyłącznik główny (znajdujący się po lewej stronie ramy głównej): Wyłącznik główny to funkcja bezpieczeństwa wbudowana w wózek z napędem elektrycznym. Gdy akumulatory i silniki są nadmiernie obciążone, wyłącznik główny wyzwala się, aby zapobiec uszkodzeniu silników i układów elektronicznych. W przypadku zadziałania wyłącznika należy odczekać około jedną minutę przed ponownym włączeniem wózka z napędem elektrycznym. Wyłącznik resetuje się samoczynnie. Włączyć sterownik i kontynuować normalną obsługę. Jeśli wyłącznik główny nadal się wyzwala wiele razy z rzędu, należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.

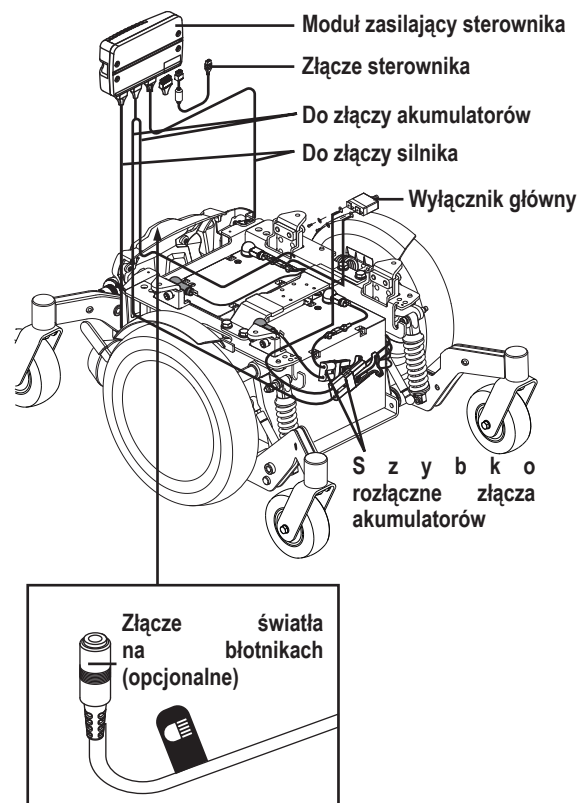

Rysunek 1. Elementy elektryczne

Ręczne dźwignie wolnego biegu

Dla wygody użytkownika ręczna dźwignia wolnego biegu znajduje się na każdym silniku wózka z napędem elektrycznym. Dźwignie umożliwiają odłączenie silników napędowych w celu ręcznego manewrowania wózkiem.



OSTRZEŻENIE!

Nie wolno używać wózka z napędem elektrycznym, gdy silniki są odłączone! Nie wolno odłączać silników, gdy wózek znajduje się na pochylonej powierzchni, ponieważ może się z niej stoczyć w niekontrolowany sposób! Tryb wolnego biegu można aktywować wyłącznie na równej, poziomej powierzchni.



OSTRZEŻENIE!

Należy pamiętać, że w trybie wolnego biegu system hamulcowy jest odłączony.

Aby użyć ręcznych dźwigni wolnego biegu:

1. Popchnąć obie ręczne dźwignie wolnego biegu w dół, aby włączyć tryb wolnego biegu (silnik napędowy odłączony). **Patrz rysunek 2.**
2. Pociągnąć obie ręczne dźwignie wolnego biegu do góry, aby włączyć tryb jazdy (silnik napędowy podłączony). **Patrz rysunek 2.**



CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Przed odłączeniem silników należy wyłączyć zasilanie, ponieważ w innym wypadku na sterowniku wyświetli się kod błędu. Aby skasować ten kod, należy wyłączyć sterownik i ustawić wózek z napędem elektrycznym na tryb jazdy. Następnie należy włączyć sterownik. Komunikat o błędzie powinien być skasowany. W innym wypadku należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.

UWAGA: Wózek z napędem elektrycznym jest zdecydowanie łatwiej popchnąć, gdy zasilanie jest wyłączone.



OSTRZEŻENIE!

Należy unikać stosowania nadmiernej siły podczas operowania dźwigniami wolnego biegu.


Do obsługi dźwigni wolnego biegu nie wolno używać nóg. Nie wolno stawać na dźwigniach wolnego biegu. Użycie nadmiernej siły do obsługi dźwigni wolnego biegu może doprowadzić do uszkodzenia dźwigni wolnego biegu, silników i hamulców.

Uchwytów dźwigni wolnego biegu nie wolno używać jako punktów zaczepienia do celów mocowania produktu.


Funkcja iLevel® (opcjonalna)

Wózek z napędem elektrycznym może być wyposażony w funkcję iLevel, która będzie używana w połączeniu z systemem siedziska. Funkcja iLevel jest zapewniana na zespole napędowym Quantum w celu zapewnienia maksymalnej stabilności, gdy system siedziska jest podniesiony. **Patrz rysunek 3.**

Tryb wolnego biegu

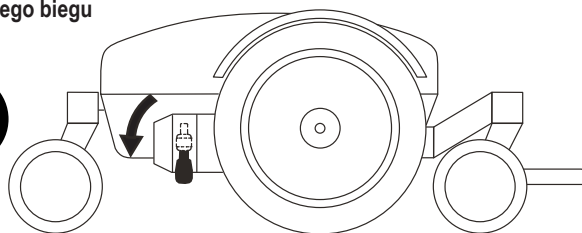

Tryb jazdy

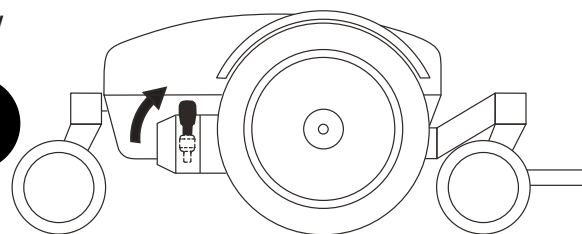

Rysunek 2. Obsługa ręcznej dźwigni wolnego biegu

UWAGA: Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w elektryczny system pozycjonujący TRU-Balance® 3, należy stosować się do informacji podanych w instrukcji obsługi zawartej w pakiecie użytkownika.



CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Przed użyciem funkcji iLevel należy przeczytać następujące informacje. Niniejsze wytyczne mają na względzie dobro użytkownika i pomogą w bezpiecznej obsłudze funkcji iLevel.

- Zanim użytkownik usiądzie na wózek, należy wyłączyć zasilanie.
- Podczas siadania na wózku z napędem elektrycznym zawsze powinna być obecna osoba towarzysząca.
- Należy przestrzegać wszystkich procedur i zwracać uwagę na ostrzeżenia, które są wyjaśnione w niniejszej instrukcji użytkownika, instrukcji uzupełniających oraz przewodniku bezpieczeństwa dla konsumenta.



OSTRZEŻENIE!

Środek ciężkości wózka z napędem elektrycznym został fabrycznie ustawiony w pozycji, która spełnia potrzeby demograficznej większości użytkowników. Dostawca produktów Quantum Rehab ocenił wózek z napędem elektrycznym i dokonał wszelkich niezbędnych regulacji w celu spełnienia konkretnych wymagań użytkownika. Nie wolno zmieniać konfiguracji siedziska bez uprzedniego skontaktowania się z firmą Quantum Rehab lub dostawcą produktów Quantum Rehab.

Niektóre elementy wózka z napędem elektrycznym są ciężkie. Do ich podniesienia lub przeniesienia może być konieczne poproszenie o pomoc innej osoby. Przed demontażem wózka z napędem elektrycznym należy sprawdzić tabelę z danymi technicznymi pod kątem masy konkretnych elementów.

Aby móc dokonać jakichkolwiek regulacji, na wózku z napędem elektrycznym nie może znajdować się osoba.

UWAGA: Funkcja iLevel włącza się automatycznie podczas elektrycznego podnoszenia siedziska i wskaźnik funkcji iLevel wyświetla się na sterowniku.

Dostęp do funkcji iLevel jest możliwy za pośrednictwem sterownika lub pojedynczego przełącznika, a do jej aktywacji wózek z napędem elektrycznym musi znajdować się na płaskiej, równej powierzchni. Po uruchomieniu siłownika systemu siedziska funkcja iLevel blokuje (patrz rysunek 3) ruch ramion kół przednich. Gdy funkcja iLevel jest aktywna, system siedziska można odchylić do tyłu, a oparcie siedziska opuścić o maksymalnie 20°.

UWAGA: Więcej informacji dotyczących ostrzeżeń dotyczących funkcji iLevel znajduje się w podstawowych instrukcjach obsługi sterownika.

Funkcji iLevel należy używać wyłącznie wewnątrz budynku na równej i płaskiej powierzchni, na przykład w sklepie, biurze i/lub placówce medycznej, a na zewnątrz jedynie w ograniczonym zakresie, wyłącznie na płaskiej, równej i twardej powierzchni.

Gdy funkcja iLevel jest aktualnie używana, wózek z napędem elektrycznym może poruszać się z wstępnie ustaloną, bezpieczną prędkością. Więcej informacji dotyczących redukcji prędkości maksymalnej znajduje się w tabeli z danymi technicznymi.

OSTRZEŻENIE!


Funkcji iLevel należy używać wyłącznie wewnątrz budynku na równej i płaskiej powierzchni, na przykład w sklepie, biurze i/lub placówce medycznej. Nie wolno nigdy podnosić siedziska z jego najniższej pozycji na nachylonej powierzchni. Mogłoby to doprowadzić do przechylenia się wózka z napędem elektrycznym.

Funkcji iLevel można używać na zewnątrz jedynie w ograniczonym zakresie, wyłącznie na płaskiej, równej i twardej powierzchni. W przypadku braku pewności nie wolno używać funkcji iLevel na zewnątrz.

Nie wolno nigdy podnosić siedziska do poziomu iLevel podczas obsługi wózka z napędem elektrycznym na wyboistej lub nierównej nawierzchni. Mogłoby to doprowadzić do przechylenia się wózka z napędem elektrycznym.

Podczas obsługi wózka z napędem elektrycznym pas pozycjonujący musi być zawsze zapięty.

Nie wolno obsługiwać funkcji iLevel ani zmieniać wysokości siedziska w żaden sposób, podczas gdy wózek z napędem elektrycznym znajduje się pod stałym przedmiotem, takim jak stół lub biurko. Przed ruchem i w trakcie ruchu należy zapewnić, aby w obszarze ruchu nie znajdowały się żadne przedmioty.

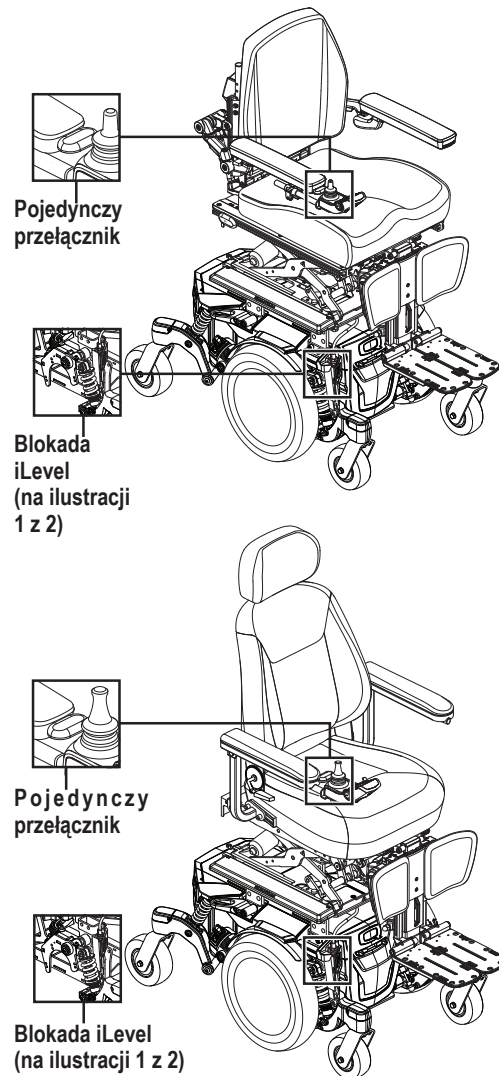

Rysunek 3. Funkcja iLevel®

CZYNNOŚĆ ZAKAZANA!

Nie wolno nigdy używać funkcji iLevel na nierównym terenie (żwir, wzniesienia lub inne nierówne, nieutwardzone nawierzchnie) ani na polu.

UWAGA: Funkcja iLevel jest wyposażona w system, który umożliwia jazdę wózka z napędem elektrycznym z wstępnie ustaloną, bezpieczną prędkością, gdy siedzisko jest podniesione. Przed użyciem wózka z napędem elektrycznym należy zawsze upewnić się, że system pracuje prawidłowo.

UWAGA: Jeśli na sterowniku wyświetla się ostrzeżenie lub wskaźnik, które informują, że funkcja iLevel jest wyłączona, prędkość wózka z podniesionym siedziskiem zostanie ograniczona do 25%. Jeśli tego typu ostrzeżenie pojawi się, gdy wózek znajduje się na równej powierzchni, nie wolno dalej używać funkcji iLevel. W takiej sytuacji należy zwrócić się do dostawcy produktów Quantum Rehab o pomoc.

Światła na błotnikach (opcjonalne)

Wózek z napędem elektrycznym może być wyposażony w światła na błotnikach. Światła składają się z trzech białych żarówek LED z przodu i trzech czerwonych żarówek LED z tyłu i montowane są na błotnikach zespołu napędowego. **Patrz rysunek 4.**

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że przełącznik światła na błotnikach jest podłączony.

UWAGA: Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w sterownik osoby towarzyszącej, wówczas światła na błotnikach aktywuje się za pomocą pojedynczego przełącznika, gdy sterownik jest włączony.

Światła na błotnikach obsługuje się za pomocą pojedynczego przełącznika.


Obsługa światła na błotnikach za pomocą pojedynczego przełącznika:

1. Nacisnąć pojedynczy przełącznik raz, aby włączyć światła na błotnikach.
2. Nacisnąć pojedynczy przełącznik ponownie, aby wyłączyć światła na błotnikach.

UWAGA: Umieszczenie pojedynczego przełącznika poza wózkiem z napędem elektrycznym, na przykład na szynie bocznej, może zwiększyć ogólną szerokość wózka.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Pojedynczy przełącznik należy montować w miejscu wygodnym dla użytkownika wózka oraz w takim, w którym kabel przełącznika nie będzie zahaczał o koła ani układ napędowy, nie zostanie zakleszczony w ramie siedziska ani nie uszkodzi się podczas przejeżdżania przez drzwi.

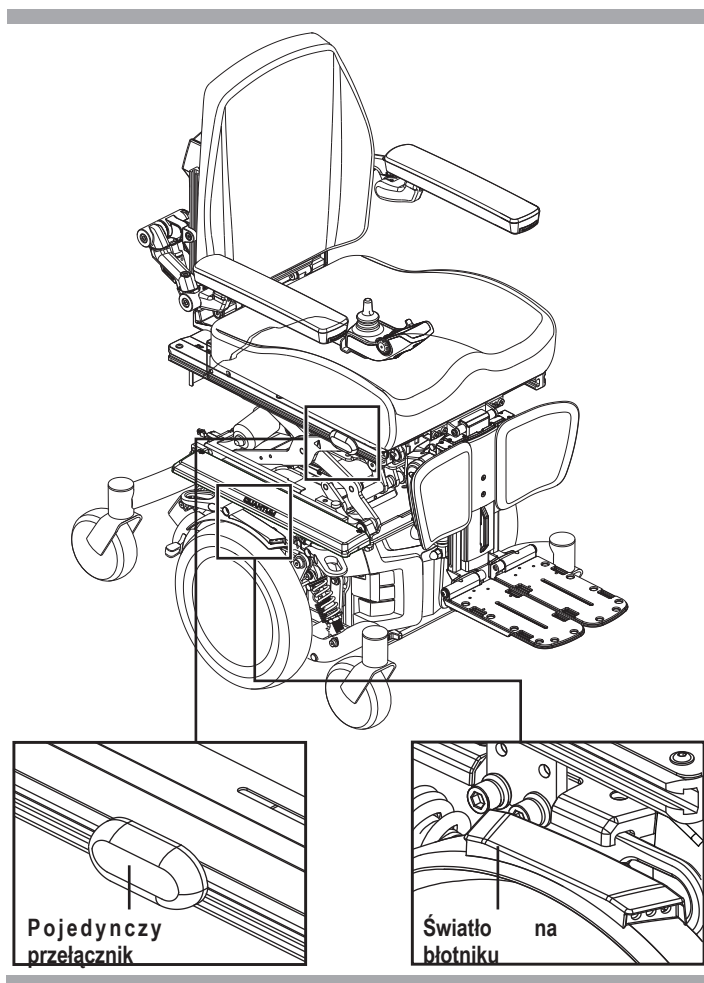

Rysunek 4. Pojedynczy przełącznik do obsługi światła na błotnikach

Wstępny montaż


Wózek z napędem elektrycznym może wymagać pewnych czynności montażowych albo przed pierwszym użyciem, albo po transporcie. Może również wymagać demontażu na potrzeby pewnych regulacji w zakresie wygody użytkownika. **Rysunek 5** przedstawia te części wózka z napędem elektrycznym, które są przeznaczone do demontażu i montażu przez użytkownika końcowego lub wykwalifikowanego opiekuna przed użyciem produktu lub dokonaniem regulacji w zakresie wygody użytkownika.

UWAGA: Każdą nakrętkę samokontrującą z wkładką nylonową usuniętą podczas demontażu lub regulacji wózka z napędem elektrycznym należy wymienić na nową. Nakrętek samokontrujących z wkładką nylonową nie wolno używać ponownie, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie wkładki nylonowej, a co za tym idzie — gorsze mocowanie. Zamienne nakrętki samokontrujące z wkładką nylonową są dostępne w lokalnych sklepach z narzędziami lub u dostawcy produktów Quantum Rehab.

UWAGA: Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w siedzisko TB-Flex lub elektryczny system pozycjonujący TRU-Balance® 3, należy stosować się do informacji podanych w oddzielnych instrukcjach.

■ CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Należy chronić wiązkę kablową sterownika przed uszkodzeniami! Należy unikać prowadzenia wiązki kablowej sterownika na zewnątrz poduszki podłokietnika. Wiazkę kablową należy prowadzić pod podłokietnikiem lub do wewnątrz poduszki podłokietnika. Należy używać prawidłowych punktów mocowania wiązki kablowej sterownika, aby nie haczyła o koła, nie została zmiażdżona przez ramę siedziska ani nie uszkodziła się podczas przechodzenia przez drzwi.

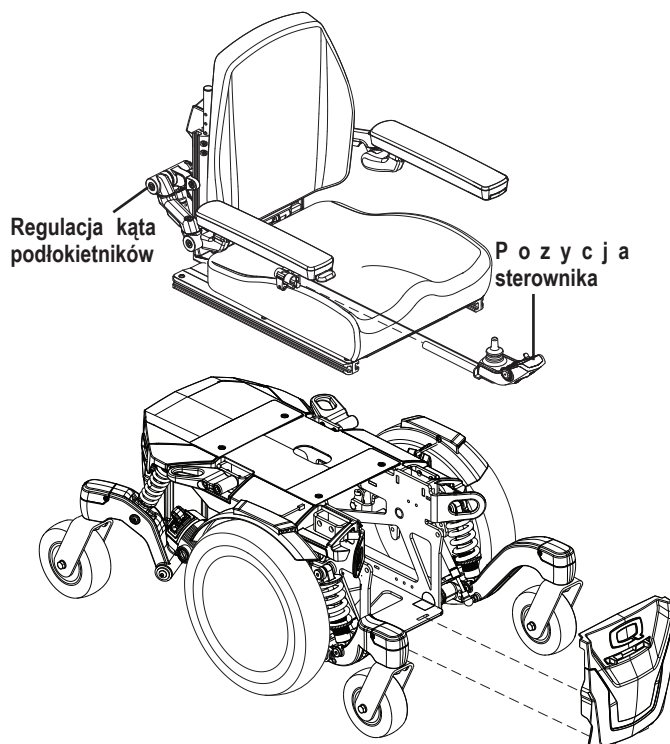

Rysunek 5. Widok rozstrzelony

System mocowania na czas transportu

Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w system mocowania na czas transportu, wówczas znajdują się na nim fabrycznie zamontowane przednie i tylne uchwyty mocujące oraz mogą znajdować się również uchwyty mocujące pas pozycjonujący. **Patrz rysunek 6.** Informacje dotyczące sposobu używania systemu mocowania na czas transportu znajdują się w instrukcji uzupełniającej dołączonej do wózka z napędem elektrycznym.

Punkty mocowania wózka z napędem elektrycznym


Silnik z napędem elektrycznym może być wyposażony w cztery (4) punkty mocowania na potrzeby zabezpieczenia aktualnie nieużytkowanego wózka z napędem elektrycznym na czas transportu w pojeździe mechanicznym. Każdy punkt mocowania jest w tym celu wyraźnie oznakowany.

Aby zabezpieczyć wózek z napędem elektrycznym wyposażony w punkty mocowania:


- Należy zawsze mocować wózek z napędem elektrycznym ustawiony w stronę kierunku jazdy pojazdu mechanicznego.
- Cztery (4) pasy mocujące należy podłączać wyłącznie do wyznaczonych, oznakowanych punktów mocowania na czas transportu, wskazanych na wózku symbolem kotwicy. **Patrz rysunki 6 i 7.** Dociągnąć pasy w celu pozbycia się wszelkiego luzu.
- Elementów mocujących nigdy nie wolno podłączać do regulowanych, ruchomych ani demontowalnych części wózka z napędem elektrycznym, takich jak podłokietniki, podnóżki czy koła.
- Punkt mocowania tylnych pasów mocujących muszą znajdować się bezpośrednio za tylnymi punktami mocowania na wózku z napędem elektrycznym. Przednie pasy mocujące należy przytwierdzić do punktów mocowania na podłodze, których rozstaw jest szerszy od wózka z napędem elektrycznym w celu zapewnienia dodatkowej stabilności. **Patrz rysunek 7.**

CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Wózka z napędem elektrycznym należy używać zgodnie z instrukcją producenta. W razie pytań dotyczących prawidłowego użytkowania wózka z napędem elektrycznym należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.

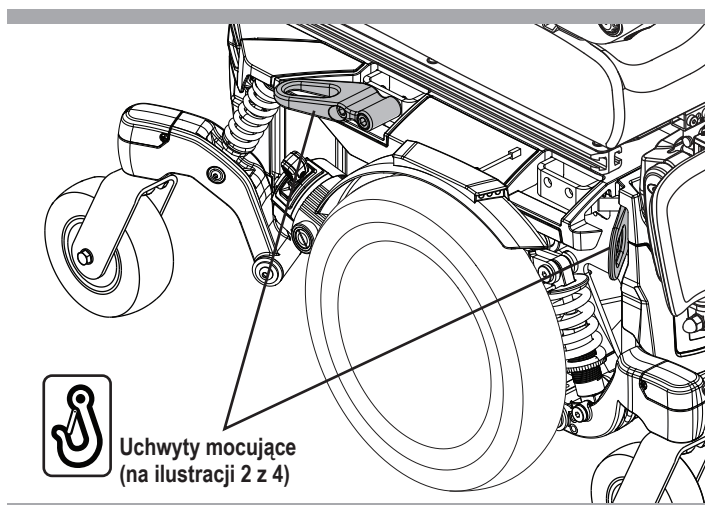

Rysunek 6. Uchwyty mocujące na czas transportu

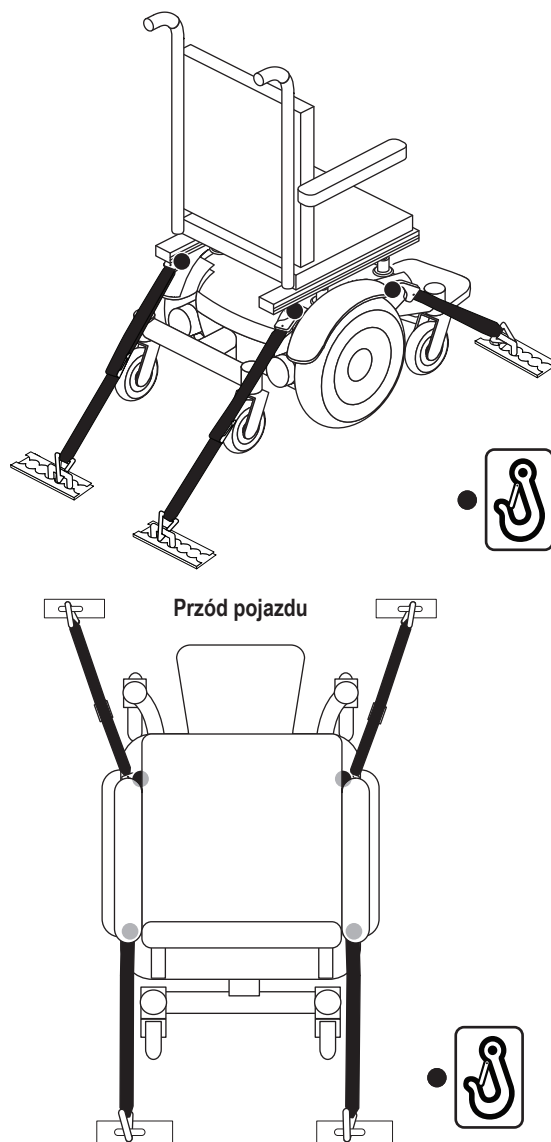

Rysunek 7. Punkty mocowania na czas transportu wózka bez użytkownika

Regulacje w zakresie wygody użytkownika

Po zapoznaniu się z obsługą wózka z napędem elektrycznym konieczne może być dokonanie pewnych regulacji w celu zwiększenia wygody.

UWAGA: Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w siedzisko TB-Flex lub elektryczny system pozycjonujący TRU-Balance® 3, należy stosować się do informacji dotyczących regulacji siedziska podanych w oddzielnych instrukcjach.

UWAGA: Informacje dotyczące obsługi joysticka znajdują się w instrukcji dołączonej do sterownika. Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w inne urządzenie sterujące, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Środek ciężkości wózka z napędem elektrycznym został fabrycznie ustawiony w pozycji, która spełnia potrzeby demograficznej większości użytkowników. Dostawca produktów Quantum Rehab ocenił wózek z napędem elektrycznym i dokonał wszelkich niezbędnych regulacji w celu spełnienia konkretnych wymogów użytkownika. Nie wolno zmieniać konfiguracji siedziska bez uprzedniego skontaktowania się z firmą Quantum Rehab lub dostawcą produktów Quantum Rehab.

Niektóre elementy wózka z napędem elektrycznym są ciężkie. Do ich podniesienia lub przeniesienia może być konieczne poproszenie o pomoc innej osoby. Przed demontażem wózka z napędem elektrycznym należy sprawdzić tabelę z danymi technicznymi pod kątem masy konkretnych elementów.


Aby móc dokonać jakichkolwiek regulacji, na wózku z napędem elektrycznym nie może znajdować się osoba.

CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w system mocowania na czas transportu, a konieczna jest regulacja wysokości lub kąta nachylenia siedziska, należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab. Regulacji tych dokonać może wyłącznie dostawca produktów Quantum Rehab.

Pas pozycjonujący

Wózek z napędem elektrycznym może być wyposażony w pas pozycjonujący, który można regulować w celu zapewnienia wygody użytkownika. **Patrz rysunek 8.** Pas pozycjonujący ma na celu podtrzymywanie użytkownika, aby nie zsuwał się z siedziska. Pas pozycjonujący nie jest przeznaczony do stosowania jako urządzenie bezpieczeństwa.

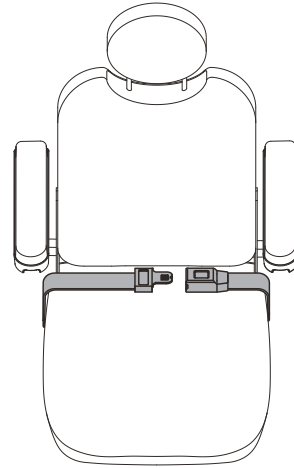

Rysunek 8. Regulacja pasa pozycjonującego

OSTRZEŻENIE!

Pas pozycjonujący nie jest przeznaczony do stosowania jako pas w pojazdach mechanicznych. Każda osoba podróżująca w pojeździe powinna być odpowiednio przypięta do siedzenia pasami zatwierdzonymi przez producenta pojazdu. Wózek z napędem elektrycznym nie nadaje się do użytku jako siedzenie w jakimkolwiek pojeździe z następującym wyjątkiem: Pojazd ten musi być wyposażony w system mocowania wózka inwalidzkiego i zabezpieczania użytkownika (Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint System, WTORS), zainstalowany zgodnie z instrukcją producenta systemu mocowania oraz zgodny z normami ANSI/RESNA WC/Vol. 4, Section 18/ISO 10542, natomiast wózek z napędem elektrycznym musi być wyposażony w system mocowania na czas transportu zgodny z normami ANSI/RESNA WC/ Vol. 4, Section 19/ISO 7176-19. Do zabezpieczenia wózka z napędem elektrycznym w pojeździe konieczne jest użycie kompletnego systemu WTORS oraz zapewnienie użytkownikowi wózka odpowiednio zaprojektowany i przetestowany system pasów bezpieczeństwa. Należy użyć systemu pasów bezpieczeństwa zawierającego pas biodrowy i pas barkowy, aby zabezpieczyć użytkownika wózka i zminimalizować prawdopodobieństwo obrażeń ciała spowodowanych kontaktem z pojazdem podczas wypadku lub gwałtownego hamowania.

Pas pozycjonujący musi być zawsze zapięty. Nie wolno pozwalać, aby pas pozycjonujący zwisał lub ciągnął się po podłożu, ponieważ może się o coś zaplątać.

Aby zainstalować pas pozycjonujący:

1. Wymontować śrubę znajdującą się zupełnie z tyłu, która przytrzymuje zawias siedziska do podstawy siedziska, zarówno na lewym, jak i prawym zawiasie siedziska.
2. Wprowadzić śrubę przez dostarczoną podkładkę, przez pas pozycjonujący, aż do podstawy siedziska po każdej stronie siedziska wózka z napędem elektrycznym.
3. Dokręcić obie śruby.

Aby dostosować pas pozycjonujący do wygody operatora:

1. Gdy użytkownik siedzi na wózku, wprowadzić metalową płytkę znajdującą się po jednej stronie pasa do plastikowej obudowy po drugiej stronie, aż do usłyszenia kliknięcia. **Patrz rysunek 8.**
2. Pociągnąć nadmiar pasa podłączonego do metalowej płytki, aby zapewnić bezpieczeństwo, ale nie zbyt mocno, aby nie powodować dyskomfortu.

Aby zwolnić pas pozycjonujący:

1. Nacisnąć mechanizm przycisku na plastikowej obudowie.

**CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!**

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że pas pozycjonujący jest odpowiednio przymocowany do wózka z napędem elektrycznym oraz jest dopasowany do operatora, aby zapewnić mu właściwy komfort.

Przed każdym użyciem wózka z napędem elektrycznym należy sprawdzić pas pozycjonujący pod kątem luźnych elementów lub uszkodzeń, takich jak rozdarcia, miejsca nadmiernego zużycia, wygięte elementy metalowe, uszkodzone mechanizmy zatraskowe, zanieczyszczenia. W przypadku wystąpienia problemu należy zwrócić się do dostawcy produktów Quantum Rehab w celu konserwacji i naprawy.



Akumulatory i ładowanie

Wózek z napędem elektrycznym korzysta z dwóch, długo działających akumulatorów głębokiego rozładowania 12 V. Akumulatory są zaplombowane i bezobsługowe. Ponieważ są zaplombowane, nie ma potrzeby sprawdzania poziomu elektrolitu (płynu). Akumulatory głębokiego rozładowania są przeznaczone do radzenia sobie z dłuższymi stanami głębokiego rozładowania. Chociaż wyglądem przypominają akumulatory samochodowe, nie są one wymienne. Akumulatory samochodowe nie nadają się do radzenia sobie z długimi stanami głębokiego rozładowania, a ponadto ich użycie w wózkach z napędem elektrycznym nie jest bezpieczne.



CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Słupki, klemy i powiązane akcesoria akumulatorów zawierają ołów i związki ołowiu. Podczas wykonywania czynności przy akumulatorach należy nosić okulary i rękawice ochronne, a po ich zakończeniu umyć ręce.

! OSTRZEŻENIE!

W razie pytań dotyczących akumulatorów w wózku z napędem elektrycznym należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.



CZYNNOŚĆ ZAKAZANA!

Należy zawsze używać dwóch akumulatorów tego samego typu, o tym samym składzie chemicznym oraz tej samej pojemności w amperogodzinach (Ah). Tabela z danymi technicznymi w niniejszej instrukcji użytkownika oraz w instrukcji dołączonej do ładowarki akumulatora zawiera informacje o zalecanym typie i pojemnościach.

Ładowanie akumulatorów

Ładowarka akumulatorów ma kluczowe znaczenie w zapewnianiu długiego okresu eksploatacji akumulatorów wózka z napędem elektrycznym. Została zaprojektowana tak, aby optymalizować pracę wózka z napędem elektrycznym poprzez bezpieczne, szybkie i łatwe ładowanie akumulatorów.



CZYNNOŚĆ ZAKAZANA! Usunięcie bolca uziemiającego może stwarzać zagrożenie elektryczne. W razie konieczności należy zainstalować zatwierdzony 3-bolcowy adapter do gniazdka elektrycznego zapewniającego dostęp dla wtyczek 2-bolcowych.



CZYNNOŚĆ ZAKAZANA! Do podłączania ładowarki akumulatora nie wolno używać przedłużacza. Ładowarkę należy podłączać bezpośrednio do prawidłowo zainstalowanego, standardowego gniazdka elektrycznego.



CZYNNOŚĆ ZAKAZANA! Nie wolno dopuszczać do sytuacji, w której dzieci bawią się bez nadzoru w pobliżu wózka z napędem elektrycznym podczas ładowania akumulatorów. Firma Quantum Rehab zaleca, aby nie ładować akumulatorów, gdy na wózku z napędem elektrycznym znajduje się użytkownik.



CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA! Przed ładowaniem akumulatorów należy przeczytać instrukcje dotyczące ładowania akumulatorów zawarte w niniejszej instrukcji oraz w instrukcji dołączonej do ładowarki akumulatorów.



OSTRZEŻENIE! Podczas ładowania akumulatorów mogą uwalniać się wybuchowe gazy. Podczas ładowania akumulatorów wózek z napędem elektrycznym oraz ładowarka akumulatorów muszą znajdować się z dala od źródeł zapłonu, takich jak płomień lub iskry.



OSTRZEŻENIE! Akumulatory wózka z napędem elektrycznym należy ładować za pomocą dostarczonej, zewnętrznej ładowarki akumulatorów. Nie wolno używać ładowarki do akumulatorów samochodowych.



OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy sprawdzić ładowarkę akumulatorów, okablowanie i złącza pod kątem uszkodzeń. W razie wykrycia uszkodzenia należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.



OSTRZEŻENIE! Nie wolno próbować otwierać obudowy ładowarki akumulatorów. Jeśli ładowarka akumulatorów wydaje się pracować nieprawidłowo, należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.



OSTRZEŻENIE! Należy mieć na uwadze, że podczas ładowania obudowa ładowarki akumulatorów może być gorąca. Należy unikać kontaktu ze skórą i nie wolno jej umieszczać na powierzchniach, na które emitowane ciepło może mieć wpływ.



OSTRZEŻENIE! Jeśli ładowarka jest wyposażona w szczeliny chłodzące, nie wolno w nie wkładać żadnych obiektów.



OSTRZEŻENIE! Jeśli ładowarka akumulatorów nie została przetestowana i zatwierdzona do użytku zewnętrznego, wówczas nie wolno jej wystawiać na niekorzystne lub skrajne warunki atmosferyczne. Jeśli ładowarka akumulatorów była narażona na niekorzystne lub skrajne warunki atmosferyczne, wówczas przed jej użyciem wewnątrz budynku należy odczekać, aż urządzenie przystosuje się do nowych warunków środowiskowych. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do ładowarki akumulatorów.

Aby naładować akumulatory za pomocą ładowarki zewnętrznej:

1. Ustawić wózek z napędem elektrycznym obok standardowego gniazdka elektrycznego.
2. Upewnić się, że sterownik jest wyłączony, a wózek jest ustawiony w trybie jazdy.
3. Podłączyć ładowarkę zewnętrzną do gniazda ładowarki zewnętrznej / programowania na sterowniku. **Patrz rysunek 9.**
4. Podłączyć ładowarkę zewnętrzną do gniazdka elektrycznego.
5. Gdy akumulatory są w pełni naładowane, odłączyć ładowarkę zewnętrzną od gniazdka elektrycznego, a następnie od sterownika.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Kontrolki LED na ładowarce wskazują różne stany ładowarki w różnych momentach: ładowarka włączona, ładowanie w toku oraz ładowanie ukończone. Jeśli w przeciągu 24 godzin kontrolka LED nie wskaże, że ładowanie jest ukończone, należy odłączyć ładowarkę z gniazdka i skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab. Pełne wyjaśnienia dotyczące kontrolki znajdują się w instrukcji dołączonej do ładowarki.

Wskaźniki ładowania akumulatorów Q-Logic 3

Jeśli ładowarka akumulatorów jest podłączona do sterownika, lecz nie do gniazdka elektrycznego, system sterownika Q-Logic 3 wyświetli ostrzeżenie i poinformuje, że system nie jest ładowany. **Patrz rysunek 10.**


Aby skasować ten błąd, gdy wystąpi:

1. Jeśli system jest wyłączony, a ładowarka jest podłączona do sterownika, odłączyć ładowarkę od sterownika.
2. Jeśli system jest włączony, odłączyć ładowarkę od sterownika, a następnie włączyć system ponownie.


Przygotowanie akumulatora

Aby przygotować nowe akumulatory w celu zmaksymalizowania ich wydajności:

1. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować każdy nowy akumulator. Akumulator osiąga wtedy do około 90% jego szczytowego poziomu wydajności.
2. Używać wózka z napędem elektrycznym w obrębie domu i ogrodu. Z początku poruszać się powoli, nie pokonywać zbyt długich dystansów do momentu przyzwyczajenia się do elementów sterujących oraz przygotowania akumulatorów.
3. Następnie ładować akumulatory ponownie przez co najmniej 8-14 godzin i ponownie obsługiwać wózek z napędem elektrycznym. Akumulatory będą teraz pracować z wydajnością powyżej 90%.
4. Po czterech lub pięciu cyklach ładowania akumulatory będą ładować się do 100% i zapewniać wydłużoną pracę.

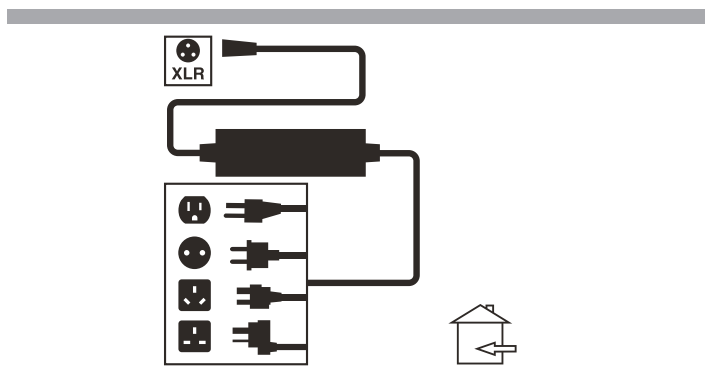

Rysunek 9. Ładowarka akumulatorów

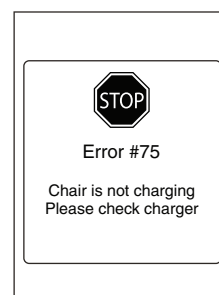

Rysunek 10. Wskaźniki ładowania akumulatorów Q-Logic 3

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak działa ładowarka?

Ładowarka pobiera napięcie ze standardowego gniazdka elektrycznego (prąd przemienny) i przekształca je do wartości 24 V DC (prąd stały). Akumulatory wózka z napędem elektrycznym używają prądu stałego do jego napędzania. Gdy napięcie akumulatora jest niskie, ładowarka pracuje ciężiej w celu naładowania akumulatora. Gdy napięcie akumulatora jest bliskie pełnego naładowania, ładowarka pracuje lżej, by dokończyć cykl ładowania. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, natężenie prądu z ładowarki jest bliskie zeru. W ten sposób ładowarka utrzymuje stan naładowania, lecz nie przeładowuje akumulatora.

Czy można użyć innej ładowarki akumulatorów?

Należy używać ładowarki dostarczonej wraz z wózkiem z napędem elektrycznym. Jest to najbezpieczniejsze i najwydajniejsze urządzenie do ładowania akumulatorów. Nie zalecamy używania innych rodzajów ładowarek (np. ładowarka do akumulatorów samochodowych).

UWAGA: Ładowarka wózka z napędem elektrycznym nie zadziała, jeśli akumulatory zostały rozładowane do napięcia bliskiego zeru. W takiej sytuacji należy zwrócić się do dostawcy produktów Quantum Rehab o pomoc.

Jak często należy ładować akumulatory?

Częstość ładowania akumulatorów zależy od wielu różnych czynników. Wózek z napędem elektrycznym może być używany przez cały dzień codziennie lub może nie być używany przez kilka tygodni.

■ Codzienne użytkowanie

Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest użytkowany codziennie, akumulatory należy ładować bezpośrednio po zakończeniu użytkowania wózka z napędem elektrycznym. Kolejnego dnia rano wózek z napędem elektrycznym będzie gotowy do całoniewej pracy. Zaleca się ładowanie akumulatorów przez co najmniej 8-14 godzin po całoniewym użytkowaniu. Zalecamy ładowanie akumulatorów przez dodatkowe 4 godziny po tym, jak ładowarka akumulatorów poinformuje o zakończeniu ładowania.

■ Użytkowanie sporadyczne

Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest użytkowany sporadycznie (raz w tygodniu lub mniej), akumulatory należy ładować co najmniej raz w tygodniu przez co najmniej 24 godziny.

UWAGA: Należy utrzymywać pełen stan naładowania akumulatorów i unikać ich głębokiego rozładowywania. Instrukcje dotyczące ładowania można znaleźć w instrukcji dołączonej do ładowarki akumulatorów. Zalecamy, aby raz w miesiącu przeprowadzić ciągłe ładowanie akumulatorów trwające co najmniej 48 godzin, aby poprawić wydajność i wydłużyć okres eksploatacji akumulatorów.

Jak mogę zmaksymalizować zasięg lub odległość na jednym ładowaniu?

Rzadko mamy do czynienia z idealnymi warunkami do jazdy, takimi jak gładka, płaska i twarda nawierzchnia, bez wiatru, wzniesień lub zakrętów. Częściej musimy pokonywać wzniesienia, pęknięcia w chodnikach, nierówne i luźne nawierzchnie, zakręty i wiatr. Wszystkie te czynniki wpłyną na odległość i czas pracy na jednym ładowaniu. Poniżej przedstawiamy kilka sugestii, które pozwolą uzyskać maksymalny zasięg na jednym ładowaniu:

- Przed podróżą należy zawsze w pełni naładować akumulatory.
- Podróż należy zaplanować z wyprzedzeniem, aby w miarę możliwości uniknąć wzniesień.
- Bagaż należy ograniczyć do niezbędnych przedmiotów.
- Należy starać się utrzymywać stałą prędkość i unikać częstego zatrzymywania i ruszania.
- Zalecamy, aby raz w miesiącu przeprowadzić ciągłe ładowanie akumulatorów trwające co najmniej 48 godzin, aby poprawić wydajność i wydłużyć okres eksploatacji akumulatorów.

Jakiego typu akumulatorów należy używać?

Zalecamy używanie akumulatorów głębokiego rozładowania, które są zaplombowane i bezobsługowe. Zarówno akumulatory AGM, jak i żelowe są akumulatorami głębokiego rozładowania o podobnej wydajności. Więcej informacji dotyczących akumulatorów używanych do wózka z napędem elektrycznym znajduje się w tabeli z danymi technicznymi.



OSTRZEŻENIE!

Akumulatory zawierają żrące substancje chemiczne. Należy używać wyłącznie akumulatorów AGM lub żelowych, aby zmniejszyć ryzyko wycieku lub wybuchu.

Dlaczego moje nowe akumulatory wydają się słabe?

Akumulatory głębokiego rozładowania wykorzystują dużo inną technologię chemiczną niż ta używana w akumulatorach samochodowych, akumulatorach niklowo-kadmowych lub innych powszechnych typach akumulatorów. Akumulatory głębokiego rozładowania są specjalnie zaprojektowane do dostarczania mocy, rozładowania, a następnie stosunkowo szybkiego naładowania. Akumulatory AGM i żelowe należy ładować możliwie najczęściej. Nie występuje u nich efekt pamięci, jak w przypadku akumulatorów niklowo-kadmowych.

Współpracujemy ściśle z naszym producentem akumulatorów, aby zapewniać akumulator, który najlepiej spełnia szczególne wymagania użytkowników wózków z napędem elektrycznym. Nowo wyprodukowane akumulatory są regularnie dostarczane do firmy Quantum, a z niej są niezwłocznie wysyłane w stanie pełnego naładowania. W trakcie transportu akumulatory są narażone na skrajne temperatury, które mogą wpływać na ich początkową wydajność. Wysokie temperatury zmniejszają stan naładowania akumulatora, a niskie spowalniają dostępną moc i wydłużają czas potrzebny do naładowania akumulatora (jak w przypadku akumulatora samochodowego).

Stabilizacja temperatury akumulatora i jego przystosowanie do nowej temperatury otoczenia może zająć kilka dni. Co więcej, uzyskanie krytycznej równowagi chemicznej, która jest niezbędna, by akumulator osiągnął szczytową wydajność i długi okres eksploatacji, może zająć kilka „cykli ładowania” (częściowe rozładowanie, a następnie pełne naładowanie). Warto poświęcić czas na prawidłowe przygotowanie akumulatora.

Jak mogę zapewnić maksymalny okres eksploatacji akumulatora?

W pełni naładowany akumulator głębokiego rozładowania zapewnia niezawodną wydajność i wydłużony okres eksploatacji. Należy w miarę możliwości utrzymywać stan pełnego naładowania akumulatorów wózka z napędem elektrycznym. Akumulatory, które są regularnie głęboko rozładowywane, rzadko ładowane lub przechowywane bez pełnego naładowania mogą ulec permanentnemu uszkodzeniu, powodując niepełne działanie wózka z napędem elektrycznym i ograniczony okres eksploatacji akumulatora.

UWAGA: Okres eksploatacji akumulatora często odzwierciedla, czy był on prawidłowo użytkowany.

Jak należy przechowywać wózek z napędem elektrycznym i jego akumulatory?

Jeśli wózek z napędem elektrycznym nie jest używany regularnie, zalecamy, aby ładować akumulatory co najmniej raz na tydzień w celu utrzymania ich żywotności.

Jeśli wózek z napędem elektrycznym nie będzie używany przez dłuższy okres, należy uprzednio w pełni naładować akumulatory. Odłączyć okablowanie akumulatora i przechowywać wózek z napędem elektrycznym w ciepłym, suchym miejscu. Należy unikać skrajnych temperatur, takich jak mróz i upał. Nie wolno nigdy ładować zamrożonego akumulatora. Przed naładowaniem zimny lub zamrożony akumulator należy ocieplić przez kilka dni.

Ca akumulatory należy wysłać w osobnych opakowaniach. czy można korzystać z transportu publicznego?

Akumulatory AGM oraz żelowe są zaprojektowane do stosowania w wózkach z napędem elektrycznym oraz innych urządzeniach zwiększających mobilność. Akumulatory te są zatwierdzone przez Federalną Administrację Lotnictwa Stanów Zjednoczonych (Federal Aviation Administration, FAA), co oznacza, że mogą być bezpiecznie transportowane w samolotach, autobusach i pociągach, ponieważ nie stwarzają zagrożenia wycieku. Zalecamy uprzednie skontaktowanie się z kasą biletową przewoźnika w celu ustalenia szczególnych wymogów tego przewoźnika.

Czy można wysłać urządzenie?

Jeśli wózek z napędem elektrycznym ma zostać wysłany za pośrednictwem firmy przewozowej do miejsca docelowego, należy go zapakować w oryginalne opakowanie przewozowe,



Pielęgnacja i konserwacja

Wózek z napędem elektrycznym to zaawansowane urządzenie. Jak każdy inny pojazd, wymaga regularnych kontroli konserwacyjnych. Niektóre z nich można przeprowadzać samemu, inne natomiast wymagają pomocy ze strony dostawcy produktów Quantum Rehab. Konserwacja zapobiegawcza jest bardzo istotna. Zgodnie z harmonogramem przestrzeganie kontroli konserwacyjnych opisanych w niniejszym rozdziale pomoże zapewnić wiele lat bezproblemowej obsługi wózka z napędem elektrycznym. W razie wątpliwości dotyczących pielęgnacji lub obsługi wózka z napędem elektrycznym należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.

OSTRZEŻENIE!

Nie wolno serwisować wózka z napędem elektrycznym, gdy użytkownik na nim siedzi.

Wózek z napędem elektrycznym, jak większość urządzeń elektrycznych, jest podatny na działanie czynników środowiskowych. Należy unikać wszelkich wilgotnych miejsc.

OSTRZEŻENIE!

Bezpośrednie lub długotrwałe narażenie na wodę lub wilgoć może spowodować nieprawidłowe działanie układów elektronicznych i mechanicznych wózka z napędem elektrycznym. Woda może powodować korozję elementów elektrycznych oraz wystąpienie rdzy na ramie wózka. Wózki z napędem elektrycznym należy okresowo sprawdzać pod kątem oznak korozji spowodowanej narażeniem na wodę bądź płyny ustrojowe lub nietrzymaniem moczu. Uszkodzone elementy należy niezwłocznie wymienić lub naprawić.

W przypadku kontaktu wózka z napędem elektrycznym z wodą:

1. Wysuszyć wózek z napędem elektrycznym możliwie najdokładniej ręcznikiem.
2. Odstawić wózek z napędem elektrycznym w ciepłym, suchym miejscu na 12 godzin, aby wszelkie pozostałości wody odparowały.
3. Przed ponownym użyciem wózka z napędem elektrycznym sprawdzić działanie joysticka i hamulców.
4. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości wózek z napędem elektrycznym należy zabrać do dostawcy produktów Quantum Rehab. Wózki z napędem elektrycznym, które są często narażone na źródła wody, na przykład nietrzymanie moczu, muszą być często sprawdzane pod kątem korozji, a elementy elektroniczne mogą wymagać częstej wymiany.

Temperatura

- Niektóre części wózka z napędem elektrycznym są narażone na skrajne zmiany temperatury. Wózek należy zawsze trzymać w temperaturze od -8°C (18°F) do 50°C (122°F).
- W skrajnie niskich temperaturach akumulatory mogą zamarznąć. Dokładna temperatura, w której zamarzają, zależy od wielu czynników, takich jak poziom naładowania akumulatorów, zużycie oraz skład chemiczny akumulatorów (np. AGM lub żelowe).

Wytyczne ogólne

- Chronić sterownik, a szczególnie joystick, przed uderzeniami mechanicznymi.
- Zapobiegać długotrwałemu narażeniu wózka z napędem elektrycznym na skrajne warunki, takie jak wysoka/niska temperatura lub wilgoć.
- Dbać o czystość sterownika.
- Sprawdzać wszystkie złącza, aby upewnić się, że są prawidłowo podłączone.
- Należy upewnić się, że ciśnienie powietrza w oponach ma prawidłową wartość (psi/bar/kPa) wskazaną na oponie.

OSTRZEŻENIE!

Należy upewnić się, że ciśnienie powietrza w oponach ma prawidłową wartość (psi/bar/kPa) wskazaną na każdej oponie pneumatycznej. Ciśnienie powietrza w oponach nie może być zbyt niskie ani zbyt wysokie. Niskie ciśnienie może doprowadzić do utraty kontroli, natomiast zbyt wysokie może spowodować pęknięcie opony. Zbyt wysokie ciśnienie w oponach może doprowadzić do ich wybuchu.

Do pompowania opon nie wolno używać węży wysokociśnieniowych.

- Na bocznych ścianach opon należy używać środka do pielęgnacji wyrobów gumowych w celu ich zabezpieczenia.

OSTRZEŻENIE!

Nie wolno używać środka do pielęgnacji wyrobów gumowych na powierzchniach opon mających kontakt z nawierzchnią, gdyż mogłoby to zmniejszyć przyczepność wózka i spowodować poślizg.

- Wszystkie łożyska kół są fabrycznie nasmarowane i zaplombowane. Nie wymagają dodatkowego smarowania.
- Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w osłonę korpusu z **połyskiem**, na osłonę korpusu naniesiono przezroczystą powłokę uszczelniającą. Aby utrzymać jej wysoki połysk, można na nią nanieść lekką warstwę wosku do samochodów. Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony w osłonę korpusu z **wykończeniem matowym**, należy używać WYŁĄCZNIE produktów przeznaczonych do farb matowych. Nie wolno wówczas używać wosku, spray do detailingu samochodowego, ArmorAll® ani żadnego innego produktu wykonanego z myślą o farbie z połyskiem.

OSTRZEŻENIE!

Należy starannie wybrać prawidłowy produkt przeznaczony do zabezpieczenia wykończenia osłon wózka z napędem elektrycznym. Na osłonach z wykończeniem matowym można używać WYŁĄCZNIE produktów przeznaczonych do farb matowych. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować uszkodzenie matowego wykończenia osłon.

- Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne. Nie mogą być luźne ani skorodowane. Akumulatory muszą być równo umiejscowione na półce akumulatorów, a kłemy akumulatorów powinny być skierowane do tyłu. Informacje o prawidłowym podłączeniu znajdują się na etykiecie dot. podłączania akumulatorów.

OSTRZEŻENIE!

Mimo że wózek z napędem elektrycznym przeszedł pomyślnie testy dotyczące przedostawania się płynów, złącza elektryczne należy chronić przed wilgocią, w tym bezpośrednim narażeniem na wodę lub płyny ustrojowe i nietrzymaniem moczu. Elementy elektryczne należy często sprawdzać pod kątem oznak korozji i w razie potrzeby wymieniać.

Kontrole codzienne

- Gdy sterownik jest wyłączony, sprawdzić joystick. Upewnić się, że nie jest zgięty ani uszkodzony oraz że wraca do neutralnej pozycji po jego zwolnieniu. Sprawdzić gumową osłonę wokół podstawy joysticka pod kątem uszkodzeń. Osłonę należy sprawdzić wzrokowo. Nie wolno próbować jej naprawiać. W przypadku problemu należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.
- Należy sprawdzić wzrokowo wiązkę kablową sterownika. Należy upewnić się, że nie jest wytarta, przecięta, a żadne przewodniki kabli nie są odsłonięte. W przypadku problemu należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.
- Należy sprawdzić opony pełne pod kątem płaskich obszarów. Płaskie obszary mogą niekorzystnie wpływać na stabilność.
- Sprawdzić zespół siedziska, podłokietniki oraz podnóżki pod kątem luźnych elementów łączących, punktów naprężenia lub uszkodzeń. W przypadku problemu należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.

Kontrole cotygodniowe

- Odłączyć sterownik od zespołu napędowego i sprawdzić. Sprawdzić pod kątem oznak korozji. W razie potrzeby należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.
- Należy upewnić się, że wszystkie części systemu sterownika są bezpiecznie przymocowane do wózka z napędem elektrycznym. Nie wolno nadmiernie dokręcać żadnych śrub.
- Należy sprawdzić, czy ciśnienie w oponach jest prawidłowe. Ciśnienie powietrza w oponach pneumatycznych powinno mieć prawidłową wartość (psi/bar/kPa) wskazaną na każdej oponie. Jeśli opona nie trzyma powietrza, należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab w sprawie wymiany dętki.
- Sprawdzić hamulce. Test ten należy przeprowadzić na równej powierzchni w miejscu, w którym znajduje się co najmniej 1 metr (3 stopy) wolnej przestrzeni wokół wózka z napędem elektrycznym.

Aby sprawdzić hamulce:

1. Włączyć sterownik i obniżyć prędkość wózka z napędem elektrycznym.
2. Po sekundzie sprawdzić miernik stanu akumulatora. Upewnić się, że pozostaje włączony.
3. Powoli popchnąć joystick do przodu, aż słyszalne będzie kliknięcie hamulców elektrycznych. Natychmiast zwolnić joystick. Konieczne jest, aby móc usłyszeć pracę każdego hamulca elektrycznego w przeciągu kilku sekund od ruchu joysticka. Powtórzyć test trzy razy, popychając joystick do tyłu, potem w lewo, a następnie w prawo.

Kontrole comiesięczne

- Sprawdzić oponę koła napędowego pod kątem zużycia. W sprawie naprawy należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.
- Sprawdzić koła samonastawne pod kątem zużycia. Wymienić w razie potrzeby.
- Sprawdzić widelce kół samonastawnych pod kątem uszkodzeń lub trzepotania, co może oznaczać konieczność regulacji lub wymiany łożysk. W sprawie naprawy należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.
- Sprawdzić cały wózek z napędem elektrycznym pod kątem luźnych elementów złącznych i zmian w pracy lub osiągnięciach wózka. W sprawie serwisu lub naprawy należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.
- Wózek z napędem elektrycznym należy utrzymywać w czystości. Powinien być wolny od obcych materiałów, takich jak błoto, zanieczyszczenia, włosy, jedzenie, napoje itp.
- Amortyzatory sprężynowe i powietrzne należy sprawdzać wzrokowo pod kątem wszelkich nieprawidłowości, uszkodzeń strukturalnych lub zgiętych prętów. W sprawie naprawy należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.

Kontrole roczne

Należy zabrać wózek z napędem elektrycznym do dostawcy produktów Quantum Rehab na roczny przegląd, szczególnie jeśli jest użytkowany codziennie. Pomoże to zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie wózka z napędem elektrycznym i uniknąć problemów w przyszłości.

OSTRZEŻENIE!

Przechowywanie

Wózek elektryczny należy przechowywać w suchym miejscu, w którym nie występują skrajne temperatury. Podczas przechowywania należy odłączyć akumulatory od wózka z napędem elektrycznym. Patrz rozdział „Akumulatory i ładowanie”.

Nieprawidłowe przechowywanie urządzenia może spowodować korozję ramy i uszkodzenie układów elektronicznych. Wszelkie skorodowane połączenia elektroniczne należy wymienić.

Akumulatory, które są regularnie głęboko rozładowywane, rzadko ładowane, trzymane w skrajnych temperaturach lub przechowywane bez pełnego naładowania mogą ulec permanentnemu uszkodzeniu, powodując niepewną wydajność i ograniczony okres eksploatacji. Aby zapewnić odpowiednią wydajność, zaleca się okresowe ładowanie akumulatorów podczas okresów długotrwałego przechowywania.

Na czas długotrwałego przechowywania warto umieścić kilka desek pod ramą wózka z napędem elektrycznym, aby podnieść go z podłoża. Pozwoli to odciążyć opony i ograniczyć ryzyko wystąpienia płaskich obszarów w miejscach kontaktu opon z podłożem.

Utylizacja wózka z napędem elektrycznym

Wózek z napędem elektrycznym należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi przepisami ustawowymi. Należy skontaktować się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub dostawcą produktów Quantum Rehab w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji opakowania wózka z napędem elektrycznym, metalowych elementów ramy, elementów z tworzywa sztucznego, układów elektronicznych, akumulatorów, a także materiałów neoprenowych, silikonowych i poliuretanowych.

OSTRZEŻENIE!

Torby plastikowe stwarzają zagrożenie uduszenia. Torby plastikowe należy prawidłowo utylizować. Nie wolno pozwolić, aby bawiły się nimi dzieci.

Czyszczenie i dezynfekcja

- Do czyszczenia plastikowych i metalowych części wózka z napędem elektrycznym używać wilgotnej ściereczki i łagodnego, nietrącego środka czyszczącego. Należy unikać produktów, które mogą rysować powierzchnie wózka z napędem elektrycznym.
- W razie potrzeby produkt można czyścić zatwierdzonym środkiem dezynfekującym. Przed zastosowaniem należy upewnić się, że środek ten nadaje się do użycia na produkcie.

OSTRZEŻENIE!

Przed użyciem na produkcie należy zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa w zakresie prawidłowego użytkowania środka dezynfekującego i/lub środka czyszczącego. W innym wypadku może dojść do podrażnienia skóry lub przedwczesnego pogorszenia stanu tapicerki i/lub wykończeń wózka z napędem elektrycznym.

Wózka z napędem elektrycznym nie wolno polewać wodą ani umieszczać w bezpośrednim kontakcie z wodą. Wózek z napędem elektrycznym ma pomalowaną, plastikową osłonę korpusu z tworzywa ABS, które można łatwo przecierać wilgotną ściereczką.

Do czyszczenia siedziska winylowego nie wolno używać żadnych środków chemicznych, ponieważ mogą sprawić, że będzie ono śliskie lub zacznie przesychać i pękać. Należy użyć wody z mydłem i dokładnie wysuszyć siedzisko.

Wymiana koła

W przypadku przebitej opony pneumatycznej można wymienić dętkę. Jeśli wózek z napędem elektrycznym jest wyposażony we wkładkę z oponą pełną, wówczas konieczna jest wymiana całego zespołu koła. Zamienne opony, dętki i zespoły koła są dostępne przez dostawcę produktów Quantum Rehab.

OSTRZEŻENIE!


Koła wózka z napędem elektrycznym powinny być serwisowane lub wymieniane wyłącznie przez dostawcę produktów Quantum Rehab lub wykwalifikowanego technika.

Przed wykonaniem tej procedury należy upewnić się, że sterownik jest wyłączony, a wózek z napędem elektrycznym nie jest w trybie wolnego biegu.


Podczas wymiany opony należy usunąć wyłącznie nakrętki koła, a następnie zdjąć koło. W przypadku dalszego demontażu należy całkowicie spuścić powietrze z opony, gdyż może wybuchnąć.

Należy postępować zgodnie z następującymi prostymi krokami w celu szybkiej i bezpiecznej naprawy zarówno pneumatycznych, jak i pełnych opon:


1. Wyłączyć zasilanie sterownika.
2. Ustawić wózek na bloczkach.
3. W przypadku wymiany opony pneumatycznej przed zdjęciem koła należy całkowicie spuścić z niej powietrze.
4. Usunąć kołpak, jeśli jest obecny, a następnie wymontować trzy (3) lub pięć (5) nakrętek koła z piasty koła. **Patrz rysunki 11 lub 12.**
5. Ściągnąć koło z piasty.
6. Usunąć śruby i rozdzielić przednią felgę od tylnej. **Patrz rysunek 13.**
7. Wyjąć starą dętkę z opony pneumatycznej i wymienić ją na nową bądź wymienić cały zespół w przypadku opony pełnej.
8. Skręcić ze sobą dwie połowy felgi.
9. Wsunąć koło z powrotem na piastę.
10. Umieścić kołpak ponownie, jeśli jest obecny, a następnie zamontować ponownie trzy (3) lub pięć (5) nakrętek koła na piaście koła i dokręcić.
11. Napompować oponę pneumatyczną do prawidłowej wartości ciśnienia powietrza (psi/bar/kPa) wskazanej na każdej oponie.
12. Zdjąć wózek z bloczków.

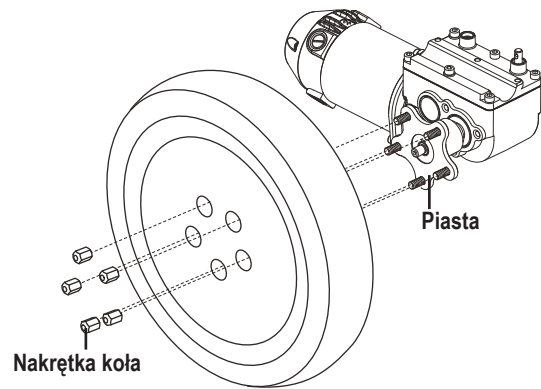


Rysunek 11. Koło napędowe z pięcioma nakrętkami koła

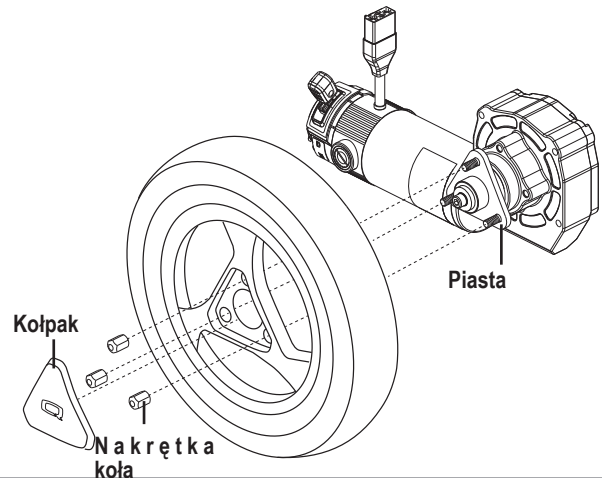

Rysunek 12. Koło napędowe z trzema nakrętkami koła i kołpak

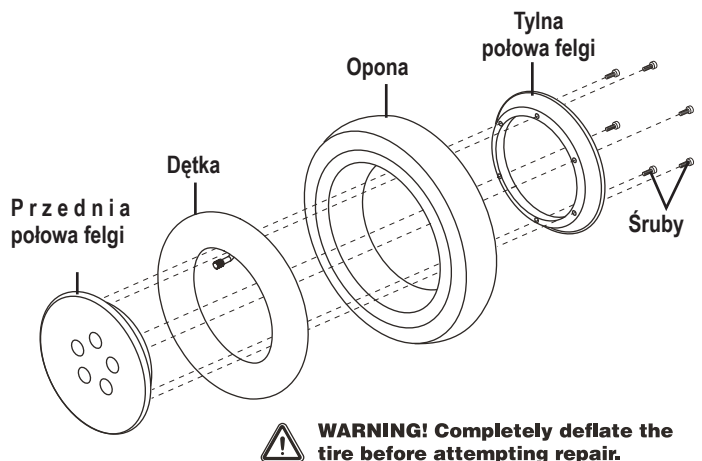

Rysunek 13. Widok rozstrzelony koła napędowego

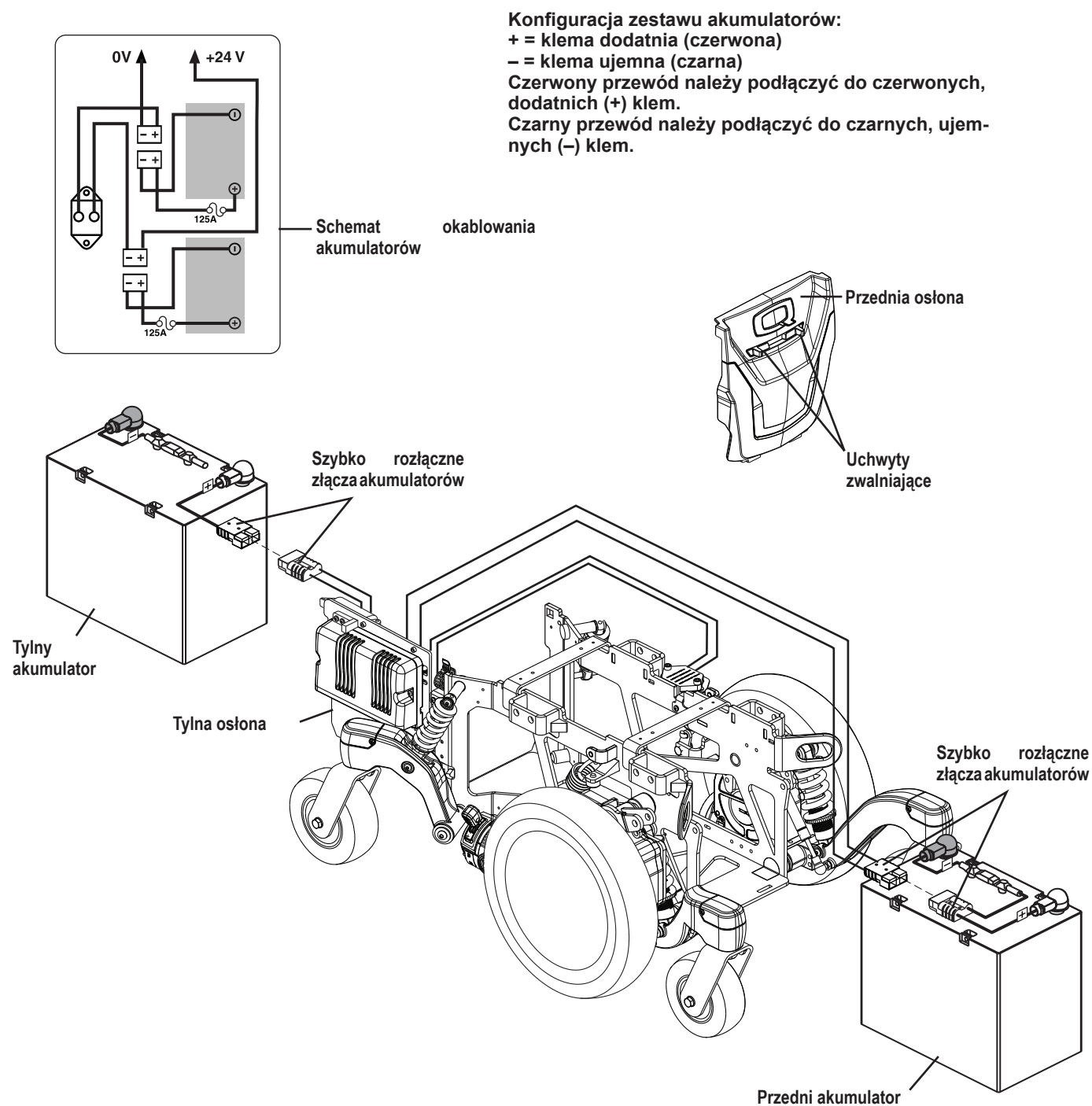

Rysunek 14. Montaż akumulatorów

Wymiana akumulatora

Schemat okablowania akumulatora znajduje się na naklejce zlokalizowanej na przedniej osłonie. Prawidłowe specyfikacje akumulatorów znajdują się w tabeli z danymi technicznymi.

CZYNNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Słupki, klemy i powiązane akcesoria akumulatorów zawierają ołów i związki ołowiu. Podczas wykonywania czynności przy akumulatorach należy nosić okulary i rękawice ochronne, a po ich zakończeniu umyć ręce.

OSTRZEŻENIE!

Akumulatory wózka z napędem elektrycznym powinny być serwisowane lub wymieniane wyłącznie przez dostawcę produktów Quantum Rehab lub wykwalifikowanego technika.

Nie wolno wymieniać akumulatorów, gdy użytkownik siedzi na wózku.

Akumulatory wózka z napędem elektrycznym są ciężkie. Patrz tabela z danymi technicznymi. W przypadku problemów z podniesieniem takiego ciężaru należy poprosić kogoś o pomoc. Należy zastosować prawidłowe techniki podnoszenia, aby uniknąć przeciążenia.

Nie wolno łączyć starych akumulatorów z nowymi. Należy zawsze wymieniać oba akumulatory jednocześnie.

CZYNNOŚĆ ZAKAZANA!

Narzędzia i inne metalowe przedmioty należy trzymać z dala od klem akumulatorów. Kontakt z narzędziami może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Aby wymienić akumulatory:

1. Wyłączyć zasilanie sterownika.
2. Upewnić się, że wózek z napędem elektrycznym jest w trybie jazdy. Patrz sekcja „Twój wózek z napędem elektrycznym”.
3. Zdjąć osłonę przednią poprzez ściśnięcie uchwytów zwalniających (**patrz rysunek 14**) i podniesienie osłony przedniej z zespołu napędowego.
4. Zdjąć tylną osłonę poprzez obracanie dwoma (2) żółtymi zaciskami do zewnątrz w kierunku kół napędowych. Podnieść tylną osłonę z zespołu napędowego.
5. Nacisnąć uchwyt pokrywy komory akumulatorów, a następnie pociągnąć pokrywę do tyłu, aby ją otworzyć.
6. Odłączyć szybko rozłączne złącza akumulatorów. **Patrz rysunek 14.**
7. Wyjąć akumulatory.
8. Odłączyć kabel akumulatora od każdego akumulatora.
9. Podłączyć kabel akumulatora do nowego przedniego akumulatora zgodnie ze schematem okablowania akumulatorów. **Patrz rysunek 14.**

OSTRZEŻENIE!

Należy prawidłowo dokręcić elementy mocujące, aby połączenia były odpowiednio silne.

10. Podłączyć kabel akumulatora do nowego tylnego akumulatora zgodnie ze schematem okablowania akumulatorów. **Patrz rysunek 14.**
11. Zainstalować nowe akumulatory i podłączyć szybko rozłączne złącza akumulatorów.
12. Zamknąć i zabezpieczyć tylną pokrywę komory akumulatorów.
13. Zamontować ponownie tylną osłonę i przednią pokrywę.
14. Naładować akumulatory. Patrz rozdział „Akumulatory i ładowanie”.

Sytuacje, w których należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab w sprawie serwisu

Następujące objawy mogą oznaczać poważny problem z wózkiem z napędem elektrycznym. W razie potrzeby należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab. Przed rozmową należy przygotować następujące informacje: numer modelu, numer seryjny, rodzaj problemu oraz kod błędu, jeśli jest dostępny.

- Hałas z silnika
- Wytarte kable
- Pęknięte lub uszkodzone złącza
- Nierównomierne zużycie którejkolwiek opony
- Szarpanie podczas jazdy
- Ściąganie na jedną stronę
- Wygięte lub pęknięte zespoły koła
- Wózek się nie uruchamia
- Wózek się uruchamia, lecz się nie rusza
- Luźne siedzisko lub elementy siedziska

Konserwacja korygująca

Jeśli miernik stanu akumulatora się nie zapala po włączeniu zasilania:

- Sprawdzić połączenia kablowe. Upewnić się, że są prawidłowe.
- Sprawdzić wyłącznik. Zresetować w razie potrzeby.
- Sprawdzić połączenia akumulatorów.

Jeśli powyższe warunki okażą się w normie, można wykonać próbę obciążeniową akumulatorów za pomocą testera obciążeniowego do akumulatorów. Testery dostępne są w sklepach z artykułami motoryzacyjnymi. Przed próbą obciążeniową odłączyć oba akumulatory i postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do testera obciążeniowego. Jeśli jeden z akumulatorów nie przejdzie pomyślnie próby, należy wymienić oba. Jeśli wózek z napędem elektrycznym nadal się nie uruchamia, należy skontaktować się z dostawcą produktów Quantum Rehab.



Q6 Edge[®] 3 STRETTO

USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.quantumrehab.com

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
www.quantumrehab.ca

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.quantumrehab.com.au

New Zealand

Unit 5/208 Swanson Road
Henderson, Auckland 0610
www.pridemobility.co.nz

UK

(Authorised UK Representative)
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.quantumrehab.co.uk

The Netherlands

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.quantumrehab.eu
www.quantumrehab.nl

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.quantumrehab-italia.it

France

26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.quantumrehab.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.quantumrehab.es

Germany

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.quantumrehab.de

China

Room 508, Building #4
TianNa Business Zone
No. 500 Jianyun Road
Pudong New Area
Shanghai 201318
www.pridechina.cn

Nr seryjny



I N F M A N U 5 3 0 4