


INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

CARETTA BUGGY

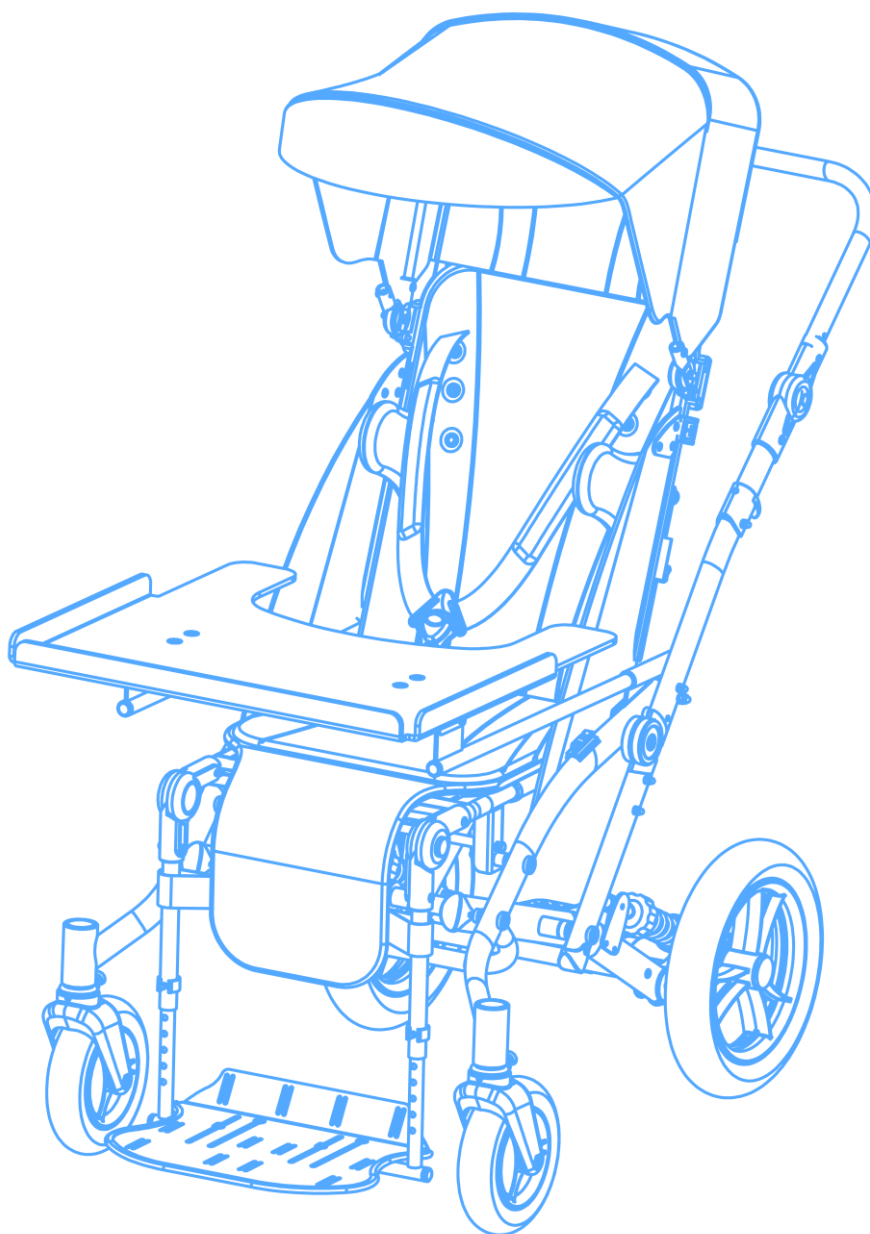

Rozmiary: 1,2



Wydanie 7 – 2022-02-17



UWAGA! PRODUCENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SPRZĘT ZAKUPIONY U BEZPOŚREDNIEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY LIW CARE TECHNOLOGY, LUB W WYSPECJALIZOWANYM SKLEPIE MEDYCZNYM REPREZENTUJĄCYM LIW CARE TECHNOLOGY NA TERYTORIUM POLSKI.

Spis treści:.....	2
1. Wstęp	3
2. Ogólne zasady bezpieczeństwa	4
3. Wskazania do stosowania wyrobu	5
4. Waga i wymiary wózka	6
5. Ogólna budowa wózka spacerowego Caretta Buggy	9
6. Szczegółowy opis montażu wózka spacerowego Caretta Buggy.....	11
7. Montaż dodatkowych adapterów	13
7.1 Montaż przedłużenia pleców	13
7.2 Montaż pelot głowy.....	14
7.3 Montaż zagłówka rogatego	14
7. Montaż pelot piersiowych.....	15
8. Montaż barierki	15
9. Montaż budki.....	16
10. Montaż stolika	16
11. Montaż koszyka podramowego	17
13 Składanie wózka	18
14. Demontaż kół jezdnych	20
11.1 Demontaż kół przednich.....	20
11.2 Demontaż kół tylnych.....	20
15. Przenoszenie wózka spacerowego Caretta Buggy	21
16. Szczegółowy opis budowy i regulacji wózka spacerowego Caretta Buggy	22
16.1 Hamulec postojowy.....	22
16.2 Regulacja kąta oparcia pleców	22
16.3 Regulacja ręczki do prowadzenia	23
16.4 Regulacja kąta siedziska	23
16.5 Regulacja głębokości siedziska.	24
16.6 Regulacja wysokości podnóżka	25
16.7 Regulacja pelot piersiowych.....	26
16.8 Regulacja pelot głowy.....	27
16.9 Regulacja kąta podparcia stóp	27
16.10 Regulacja kąta wsporników podnóżka	28
16.11 Regulacja położenia platformy podnóżk	28
16.12 Regulacja położenia zagłówka rogatego	28
16.13 Regulacja położenia kątownego stolika	29
17. Konserwacja i czyszczenie	30
18. Gwarancja/Serwis.....	30
19. Tabliczka znamionowa	31
20. Oznaczenie symboli.....	31
21. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych.....	32
KARTA GWARANCYJNA.....	33

Opracowany i stworzony przez firmę LIW Care Technology, wysokiej klasy **Wózek Inwalidzki Specjalny Dziecięcy Caretta Buggy** (dalej zwany również Wózek spacerowy), jest przeznaczony do przewożenia dzieci, których waga nie przekracza 55 kg (dla rozmiaru 1) oraz 60 kg (dla rozmiaru 2). Wózek ma za zadanie ułatwienie codziennej opieki nad osobami wymagającymi transportu, a których schorzenia uniemożliwiają samodzielne poruszanie jak również poprawne siedzenie i stanie. Wyrób medyczny Caretta Buggy przeznaczony jest dla dzieci z porażeniami i niedowładami trzy lub cztero kończynowymi; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych.

Dołożyliśmy wszelkich starań, by Wózek Inwalidzki Specjalny Dziecięcy Caretta Buggy był możliwie najprostszy w obsłudze, zapewniał dobrą stabilizację dziecka oraz dawał duże możliwości dopasowywania do anatomicznych kształtów ciała.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przyjęcie postawy siedzącej przez osobę niepełnosprawną jest niezwykle ważnym elementem stymulacji rozwoju psychoruchowego, a możliwość komfortowego i bezpiecznego poruszania się po otwartej przestrzeni ma ogromny, pozytywny wpływ zarówno na pacjentów, jak i ich opiekunów. Dlatego dziś oddajemy w Państwa ręce Wózek Spacerowy Caretta Buggy, który został stworzony z myślą o prostocie użytkowania, a także o jak najmniej skomplikowanym demontażu, który może być używany zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na terenie otwartym.

Zwracamy szczególną uwagę na jakość naszych produktów, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją – zapewni to bezpieczne i komfortowe korzystanie z urządzenia, wpłynie na jego efektywność użytkowania i pozwoli w pełni wykorzystać wszystkie zalety Wózka Spacerowego Caretta Buggy.

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Instrukcja jest przeznaczona dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi.



Największą troską firmy LIW Care Technology Sp. z o. o. jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom używającym nasze urządzenia. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników Wózka Spacerowego Caretta Buggy, należy bezwzględnie zastosować się do następujących zaleceń:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prób użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z Instrukcją Obsługi i Użytkowania, a w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem. Nasze aktualne dane kontaktowe znajdziecie Państwo na stronie www.liwcare.pl
2. Upewnić się, że wszystkie informacje, zalecenia i ostrzeżenia zawarte w tych rozdziałach są w pełni zrozumiałe.
3. Nie należy pozostawiać dziecka w wózku bez nadzoru opiekuna.
4. Nieprawidłowe używanie wózka może być niebezpieczne dla zdrowia i spowodować obrażenia ciała użytkownika.
5. Podczas użytkowania i obsługi wózka oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów należy szczególnie uważać na elementy ruchome, które tworzą realne zagrożenie bezpieczeństwa typu ściśnięcie ciała w otworach lub pomiędzy elementami. Po każdej czynności regulacyjnej należy ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek/śrub oraz upewnić się czy elementy wózka znajdują się w osadzonym i zabezpieczonym położeniu.
6. Jeśli dziecko znajduje się w wózku, należy upewnić się, że jest odpowiednio zabezpieczone pasami i kamizelką.
7. Wózek Spacerowy Caretta Buggy przeznaczony jest do korzystania przez jedną osobę w tym samym czasie.
8. Zabronione jest transportowanie dziecka w Wózku Spacerowym Caretta Buggy w czasie jazdy środkami transportu publicznego i prywatnego, tj. autobus, bus, tramwaj, trolejbus, kolej.
9. Zabronione jest przewożenie dziecka w Wózku Spacerowym Caretta Buggy w czasie jazdy samochodem, tzn. siedzisko Wózka nie jest fotelikiem samochodowym. Dziecko nie może przebywać w siedzisku w czasie jazdy samochodem.
10. W kieszonce plecaka znajdują się narzędzia, które są niezbędne do przeprowadzenia regulacji opisanych w niniejszej instrukcji: klucz imbusowy nr 4.
11. Zabronione jest wjeżdżanie i zjeżdżanie wózkiem po schodach zarówno z dzieckiem jak i bez niego.
12. Zabronione jest przenoszenie wózka razem z dzieckiem.

W instrukcji urządzeń produkowanych przez firmę LIW Care Technology Sp. z o.o. znajdują się informacje oznaczone symbolem UWAGA, którego zadaniem jest zwrócenie szczególnej uwagi na treść jaką zawierają. Oznaczenie wyżej wymienionego symbolu jest następujące:



UWAGA! SYMBOL TEN JEST UŻYWANY W CELU WZMOCNIENIA UWAGI CZYTAJĄCEGO NA TREŚĆ OZNACZONĄ TYM ZNAKIEM. NIESTOSOWANIE SIĘ DO TREŚCI ZAWARTYCH POD TYM OZNACZENIEM MOŻE ZAGRAŻAĆ ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU UŻYTKOWNIKA, LUB SKUTKOWAĆ USZKODZENIEM URZĄDZENIA.



3. Wskazania do stosowania wyrobu





Wózek Spacerowy Caretta Buggy jako wyrób medyczny przeznaczony jest dla dzieci z porażeniami i niedowładami trzy lub cztero kończynowymi; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych.

Wyrób medyczny Caretta Buggy zalecany jest dla dzieci, u których rozpoznano:

- mózgowe porażenie dziecięce (MPD),
- dystrofie mięśniowe,
- porażenia różnego pochodzenia,
- rozczep kręgosłupa,
- przepukliny oponowo-rdzeniowe,
- stany po urazach kręgosłupa,
- stany po urazach czaszkowo-mózgowych,
- stany po udarach,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

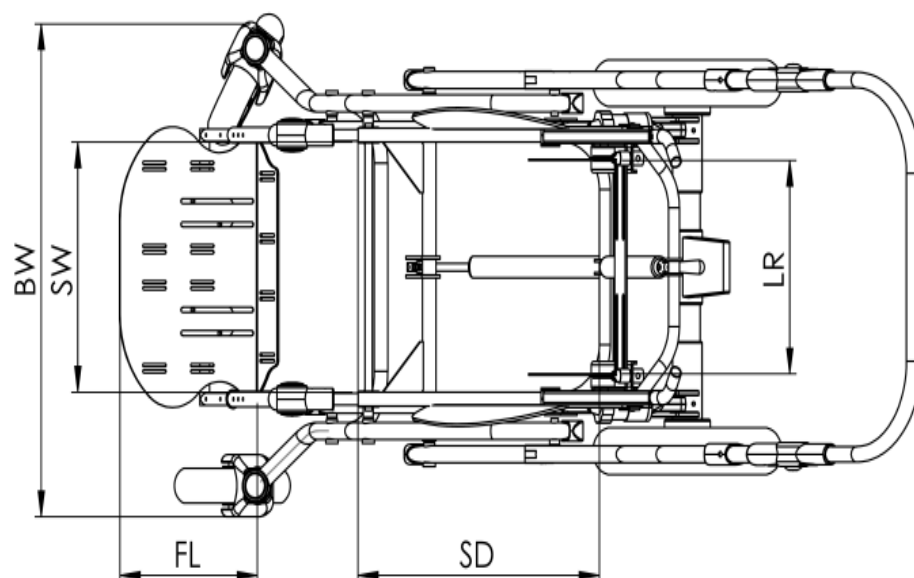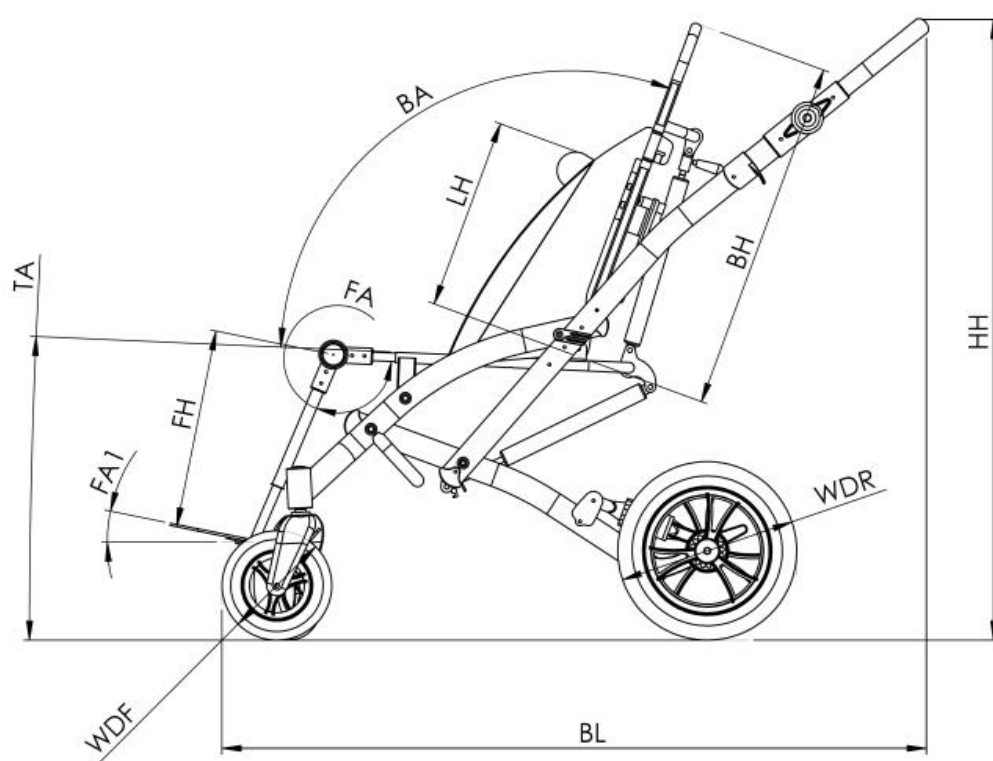

4.1 Wymiary wózka po złożeniu

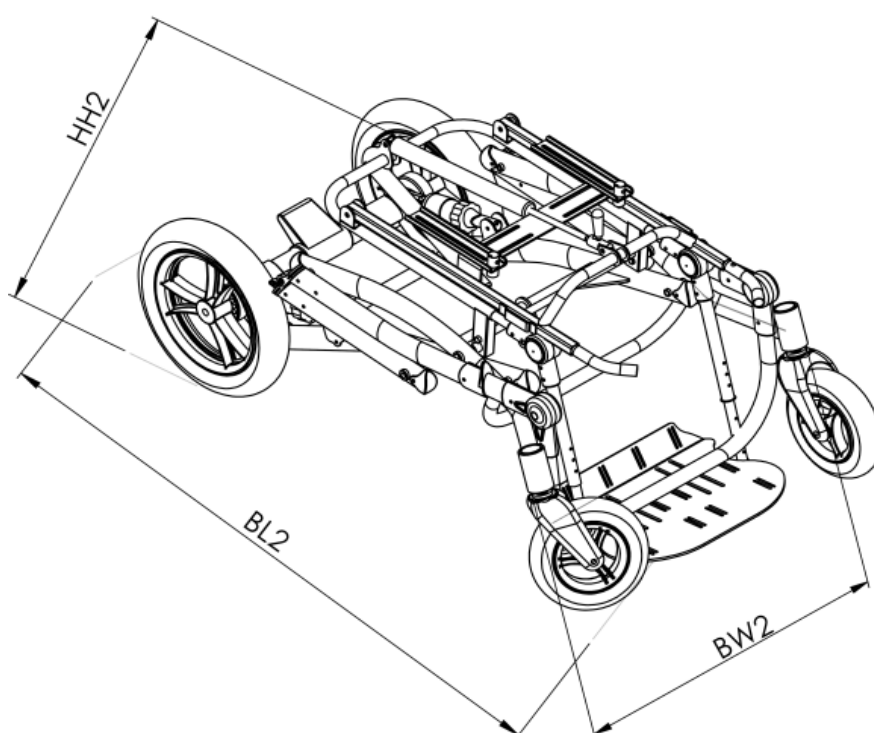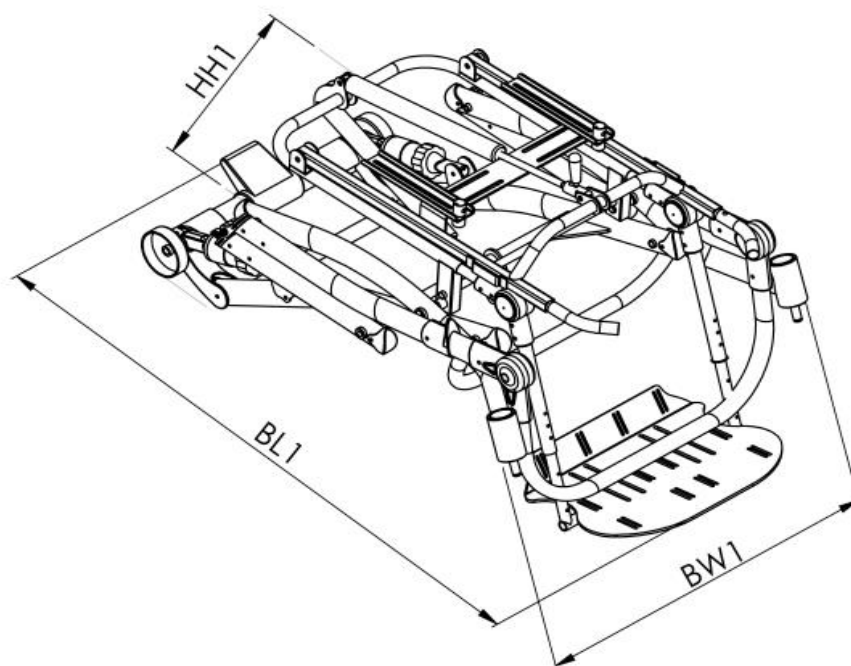

Lp.	Nazwa wymiaru	Symbol wymiaru	Wymiar [cm]	
			Rozmiar 1	Rozmiar 2
1	Szerokość siedziska	SW	32	38
2	Głębokość siedziska	SD	36÷42÷48	36÷42÷48
3	Wychylenie do tyłu	TA	-1°÷23°	12°÷25°
4	Długość pleców	BH	55÷75	55÷75
5	Kąt oparcia pleców	BA	90°÷120°	90°÷120°
6	Wysokość pelot piersiowych	LH	12÷42	12÷42
7	Rozstaw pelot piersiowych	LR	17÷30	22÷35
8	Rozstaw pelot głowy	HR	12÷21	12÷21
9	Wysokość podnóżków	FH	28÷39	33÷50
10	Długość podnóżka	FL	23	23
11	Kąt regulacji podnóżka	FA	0°÷90°	0°÷90°
12	Kąt regulacji platformy	FA1	-20°÷20°	-20°÷20°
13	Długość podstawy	BL	113	113
14	Szerokość podstawy	BW	64	69
15	Średnica koła przód	WDF	19	19
16	Średnica koła tył	WDR	31	31
17	Wysokość rączki do prowadzenia	HH	70÷113	70÷113
18	Wysokość wózka po złożeniu bez kół	HH1	52	52
19	Szerokość wózka po złożeniu bez kół	BW1	61	66
20	Długość wózka po złożeniu bez kół	BL1	94	94
21	Wysokość wózka po złożeniu z kołami	HH2	57	57
22	Szerokość wózka po złożeniu z kołami	BW2	63	63
23	Długość wózka po złożeniu z kołami	BL2	97	97
24	Maksymalna waga pacjenta		55 kg	60 kg
25	Waga wózka		23 kg	24 kg



Rys. 1 Ogólna budowa wózka

5.1 Wyposażenie standardowe

1. Rączka do prowadzenia
2. Oparcie pleców
3. Siedzisko
4. Rama wózka

- 5. Koła przednie z blokadą obrotu, koła tylne
- 6. Hamulec postojowy
- 7. Amortyzatory tylne
- 8. Podnózek
- 9. Uprząż z kamizelką i osłoną klamry

- 10. Wiatrochrony boczne
- 11. Plecak
- 12. Adaptery wydłużające oparcie pleców.
- 13. Osłony na rury rączki.

5.2 Wyposażenie dodatkowe (dostępne na zamówienie)

- 14. Budka
- 15. Śpiwór
- 16. Zagłówek
- 17. Pasy odwodzące uda
- 18. Peloty piersiowe - podpaszki
- 19. Osłony rur siedziska
- 20. Worek na akcesoria
- 21. Folia przeciwdeszczowa
- 22. Bariarka
- 23. Stolik
- 24. Zagłówek rogaty
- 25. Koszyk podramowy


6. Szczegółowy opis montażu wózka spacerowego Caretta Buggy



Ze względów bezpieczeństwa, wózek jest do Państwa dostarczany w częściach: rama wózka wraz z siedziskiem, koła, wiatrochrony oraz nadstawka pleców wraz ze stabilizacją głowy lub bez stabilizacji. Aby zmontować wózek należy:

KROK 1. Zdjąć wszelkie folie ochronne z elementów wózka oraz ułożyć ramę tj. na rysunku 2.

KROK 2. Zamontować koła przednie poprzez wciśnięcie trzpieni kółek do buksów ramy. Wciśnięcie kółek możliwe jest tylko w jednej pozycji (blokada obrotu kółek musi być zwrócona ku tyłowi ramy - patrz rys. 2). Po wciśnięciu trzpieni usłyszymy charakterystyczne kliknięcie, wtedy koła są zamontowane prawidłowo.

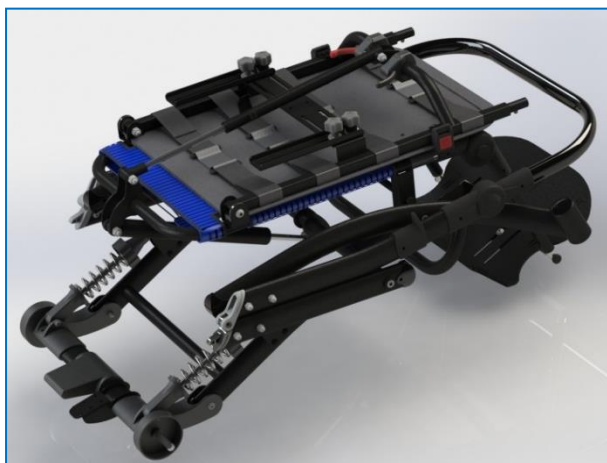

Rys. 2 Rama wózka wraz z siedziskiem

KROK 3. Zamontować koła tylne na trzpień tylnego zawieszenia. Wcisnąć koła do momentu, aż usłyszymy charakterystyczne kliknięcie.



Rys. 3 Rama wózka wraz z kołami

KROK 4. Nacisnąć czarną dźwignię zamontowaną na plecach, a następnie odchylić plecy w celu ustawienia odpowiedniego kąta oparcia.



Rys. 4 Wózek z rozłożonym oparciem

KROK 5. Aby prawidłowo zamontować wiatrochrony, w pierwszej kolejności osadzamy wiatrochron w gnieździe 1 , następnie obracamy wiatrochron i zatrzaskujemy go w klamrze 2.



Rys. 5 Montaż wiatrochronów

KROK 6. Pociągnąć rączkę wózka do góry do momentu zatrzaśnięcia się blokady ramy wózka.




Rys. 6 Rozkładanie ramy wózka

7. Montaż dodatkowych adapterów



7.1 Montaż przedłużenia pleców

Nacisnąć zatrask 1, a następnie nasunąć na wystające elementy oparcia rurki 2, aż usłyszymy charakterystyczne kliknięcie. Po montażu rurek nasunąć materiał 3.

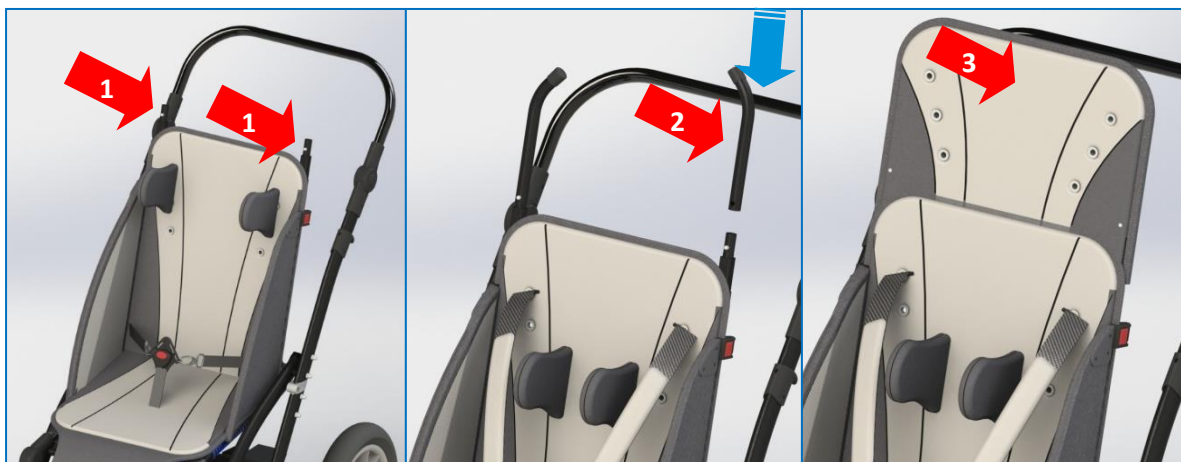

Rys. 7 Montaż adapterów

7.2 Montaż pelot głowy

Nacisnąć zatrzask 1, a następnie nasunąć na wystające elementy oparcia peloty głowy, aż usłyszymy charakterystyczne kliknięcie.



Rys. 8 Montaż pelot głowy

7.3 Montaż zagłówka rogatego

Nacisnąć zatrzask 1, a następnie nasunąć na wystające elementy oparcia rogaty zagłówek, aż usłyszymy charakterystyczne kliknięcie.



Rys. 9 Montaż zagłówka rogatego

8. Montaż pelot piersiowych




Odpiąć zamek tapicerki, a następnie rozciąć siatkę w miejscu przewidzianym na założenie pelot piersiowych. Nacisnąć zatrzask 1, a następnie wsunąć pelotę piersiową w gniazdo z otworem do momentu zatrząśnięcia się peloty.



Rys. 10 Montaż pelot piersiowych

9. Montaż bariarki

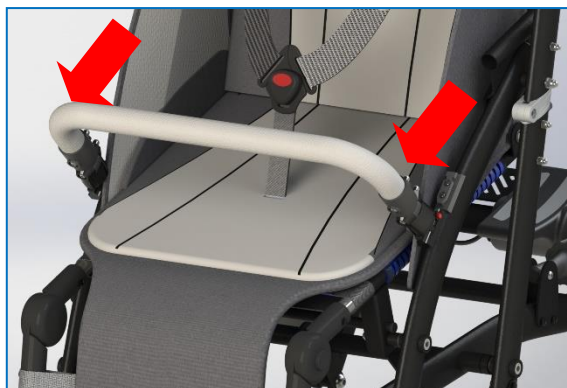

Rys. 11 Montaż bariarki

Wsunąć barierkę w plastikowe mocowania w ramie wózka, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia zatrzasku.

10. Montaż budki



Rys. 12 Montaż budki

Wsunąć budkę na plastikowe mocowania po bokach oparcia pleców, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia zatrzasku.

11. Montaż stolika



W przypadku zamówienia wózka wraz ze stolikiem, montaż stolika jest następujący:

Wysunąć dwie rurki zaślepiające mocowanie stolika (Rys. 13). Umieścić stół w mocowaniu znajdującym się pomiędzy wiatrołapami, a ramą wózka. Następnie zablokować stół dwoma pokrętkami motylkowymi.



Rys. 13 Montaż stolika

W przypadku domówienia stolika należy przed montażem samego stolika przykręcić mocowania stolika śrubami M8x16 kluczem imbusowym 5 mm.



Rys. 14 Montaż mocowań stolika

Po demontażu stolika należy założyć dwie rurki zaślepiające mocowanie stolika.

12. Montaż koszyka podramowego




W przypadku zamówienia wózka wraz z koszykiem podramowym należy zamontować go za pomocą pasek w miejscach oznaczonych na rysunku.




Rys.15 Montaż koszyka podramowego

KROK 1. Zdemontować budkę. Nacisnąć czerwone guziki po obu stronach budki, następnie wysunąć budkę z uchwytów do góry.

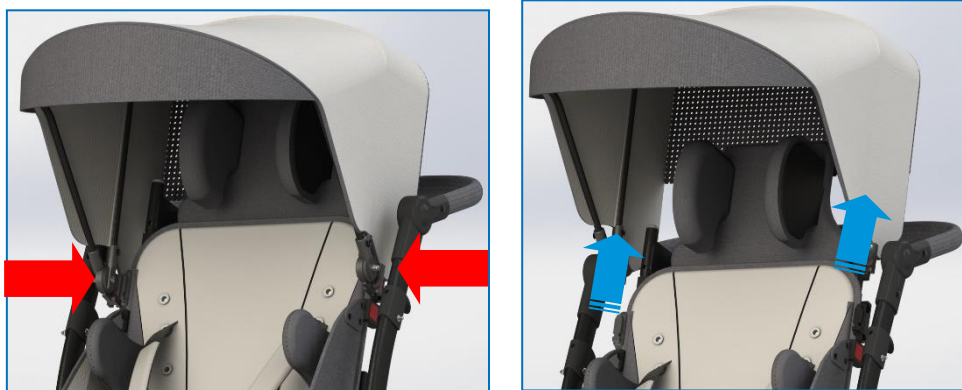

Rys. 16 Demontaż budki

KROK 2. Zdemontować barierkę. Nacisnąć czerwone guziki po obu stronach barierki, następnie wysunąć barierkę z uchwytów.

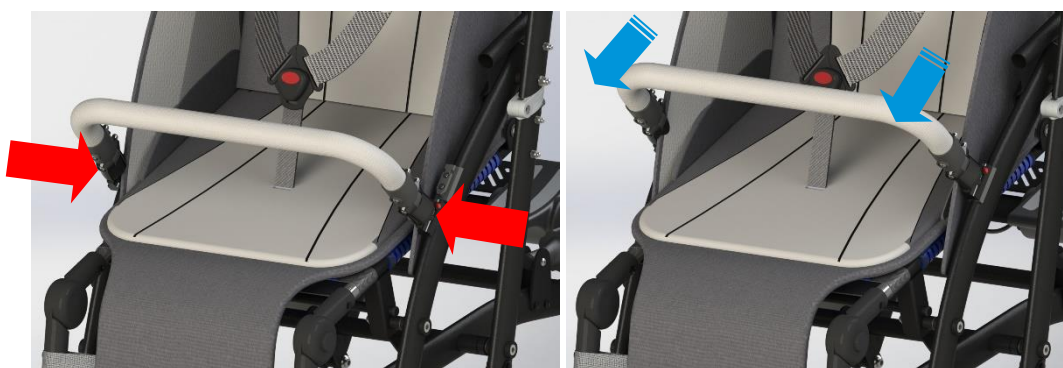

Rys. 17 Demontaż barierki

KROK 3. Ustawić kąt siedziska w pozycji poziomej (nacisnąć czerwoną dźwignię z tyłu oparcia pleców.)



Rys. 18 Regulacja kąta siedziska

KROK 4. Zdemontować peloty piersiowe. Nacisnąć zatrzask 1, a następnie wyciągnąć pelotę z gniazda.



Rys. 19 Demontaż pelot piersiowych

KROK 5. Zdemontować wiatrochrony. Nacisnąć czerwony przycisk z boku oparcia, a następnie wyciągnąć wiatrochrony.



Rys. 20 Demontaż wiatrochronów

KROK 6. Pociągnąć zwalniacze, a następnie złożyć rączkę.



Rys. 21 Składanie ramy wózka

KROK 7. Nacisnąć dźwignię regulacji kąta oparcia pleców, a następnie złożyć oparcie do przodu.



Rys. 22 Składanie oparcia pleców

14. Demontaż kół jezdnych



12.1 Demontaż kół przednich


Nacisnąć od góry czarny plastikowy przycisk, a następnie pociągnąć w dół koło przednie w celu jego demontażu.



Rys. 23 Demontaż kół przednich

12.2 Demontaż kół tylnych.

Nacisnąć metalową zawleczkę w kole tylnym, a następnie zsunąć koło z osi.

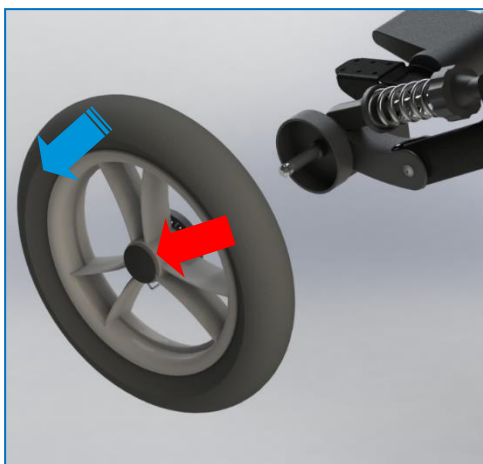


Rys. 24 Demontaż kół tylnych

15. Przenoszenie wózka spacerowego Caretta Buggy



Ze względów bezpieczeństwa należy przenosić złożony wózek, chwytając go za ramę Rys 25.

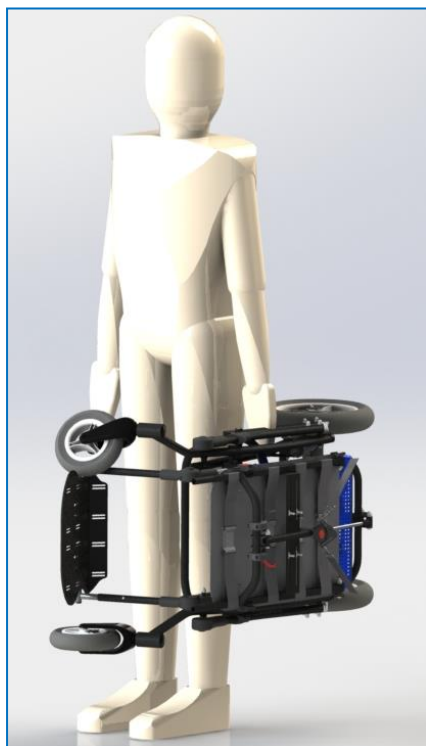

Rys. 25



Rys. 26



UWAGA! Nie wolno przenosić wózka razem z dzieckiem Rys. 26.



UWAGA! PO KAŻDEJ CZYNNOŚCI REGULACYJNEJ NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY REGULACYJNE SĄ WŁAŚCIWIE OSADZONE I ZABEZPIECZONE.

16.1 Hamulec postojowy



Rys. 27 Hamulec postojowy

Blokada kół tylnych jest uruchamiana dźwignią na tylnej poprzeczce ramy. Naciskając ją, blokujemy koła tylne, podnosząc dźwignię do góry zwalniamy hamulec Rys. 27.



UWAGA! NALEŻY REGULARNIE KONTROLOWAĆ STAN HAMULCA I USUWAĆ EWENTUALNY BRUD I BŁOTO.



UWAGA! NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZY PRZEJEŹDZIE PRZEZ PRÓG.



UWAGA! STABILNOŚĆ WÓZKA MOŻE BYĆ ZAGROŻONA W PRZYPADKU NIEOCZEKIWANEGO PCHNIĘCIA, PRZECHYLENIA LUB OPARCIA SIĘ O NIEGO.

16.2 Regulacja kąta oparcia pleców



Rys. 28 Regulacja kąta oparcia pleców

Nacisnąć czarną dźwignię zamontowaną na plecach siedziska, następnie ustawić dogodny kąt oparcia w zakresie $90^{\circ} \div 120^{\circ}$ Rys. 28.

16.3 Regulacja rączki do prowadzenia



Rys. 29 Rączka do prowadzenia

Nacisnąć jednocześnie obydwa przyciski regulatorów, ustawić rączkę na odpowiedniej wysokości. Po ustawieniu poruszyć góra – dół, by usłyszeć kliknięcie blokady Rys. 29. Możliwość regulacji wysokości rączki do prowadzenia w zakresie 70 ÷ 113 cm do podłoża.



UWAGA! NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE KAŻDA DODATKOWA RZECZ ZAWIESZONA NA RĄCZCE MOŻE WPŁYNAĆ NA UTRATĘ STABILNOŚCI WÓZKA.

16.4 Regulacja kąta siedziska



Rys. 30 Regulacja kąta siedziska

Trzymając siedzisko, nacisnąć czerwoną dźwignię zwalniacza Rys. 30, jednocześnie ustawiając żądany kąt siedziska Rys. 30.



UWAGA! Z UWAGI NA DUŻE MOŻLIWOŚCI REGULACYJNE WÓZKA, PODCZAS REGULACJI KĄTA SIEDZISKA I OPARCIA PLECÓW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA POZYCJI, GDZIE GŁOWA DZIECKA ZNAJDZIE SIĘ PONIŻEJ LINII MIEDNICY. ZABRONIONE JEST STOSOWANIE TAKIEJ POZYCJI, GDYŻ MOGŁOBY TO DOPROWADZIĆ DO NIEBEZPIECZEŃSTWA ZACHŁYŚNIĘCIA LUB ZAKRZTUSZENIA SIĘ DZIECKA.

16.5 Regulacja głębokości siedziska.



Rys. 31 (a)

KROK 1. Nacisnąć zatrzask znajdujący się pod siedziskiem.



Rys. 31 (b)

KROK 2. Wysunąć rurkę trzymającą podnózek.



Rys. 31 (c)

KROK 3. Założyć dodatkowy pas podtrzymujący oraz nałożyć tapicerkę siedziska.

16.6 Regulacja wysokości podnóżka



Rys. 32 Regulacja wysokości podnóżka

Zdemontować zatrzask blokady, a następnie wysunąć rurkę w celu ustawienia odpowiedniej wysokości podnóżka.



UWAGA! PODNÓŻEK SŁUŻY PODPIERANIU STÓP, NIE NALEŻY NA NIM STAWIAĆ DZIECKA.

16.7 Regulacja pelot piersiowych



Rys. 33 Regulacja szerokości i wysokości pelot piersiowych


Poluzować pokrętła, a następnie wyregulować wysokość oraz szerokość pelot piersiowych. Pelota prawa i lewa może być ustawiana asymetrycznie.



Rys. 34 Regulacja szerokości i wysokości pelot piersiowych

Pelota piersiowa może być obrócona o kąt 180° stopni w celu zwiększenia zakresu regulacji. W tym celu, należy wykręcić pokrętła mocujące, obrócić wspornik peloty, a następnie nakręcić pokrętła mocujące.

16.8 Regulacja pelot głowy

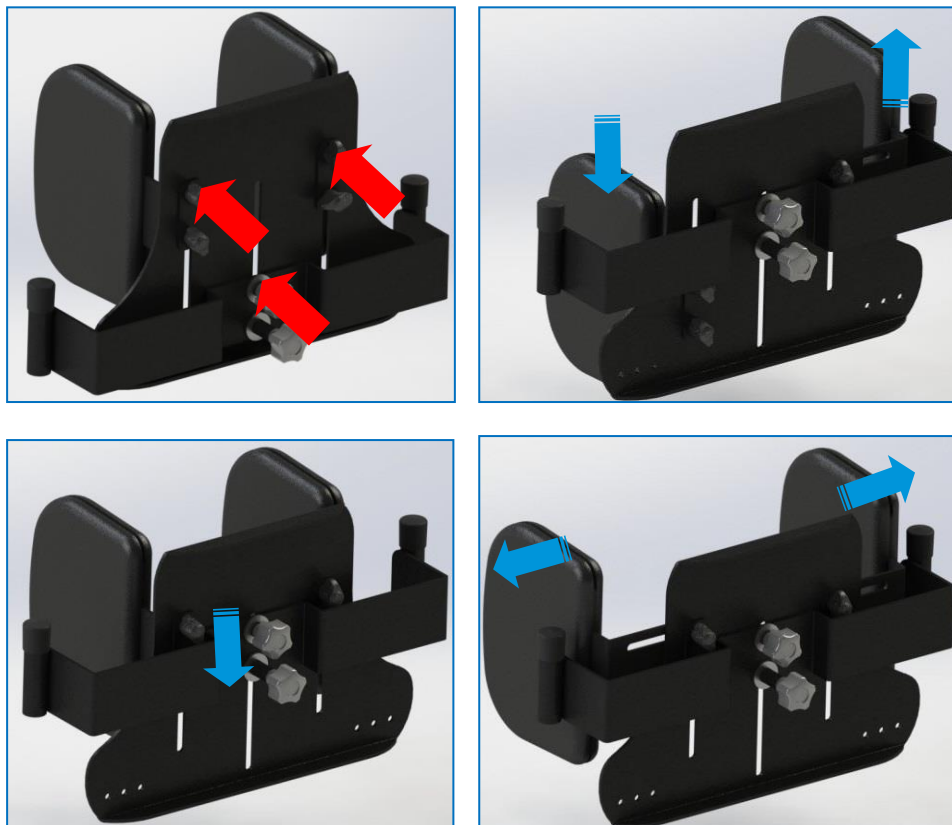

Rys. 35 Regulacja pelot głowy

Odkręcić 6 pokręteł regulacyjnych. Wyregulować wysokość zagłówka oraz szerokość pelot głowy. Po regulacji należy dokręcić pokrętła regulacyjne. Peloty głowy mogą być ustawiane asymetrycznie.

16.9 Regulacja kąta podparcia stóp



Rys. 36 Regulacja kąta podparcia stóp

Odkręcić dolne śruby regulacyjne, ustawić odpowiedni kąt i ponownie zablokować śruby Rys. 35. Możliwa regulacja kąta podparcia stóp w zakresie: $-20^{\circ} \div 20^{\circ}$.

16.10 Regulacja kąta wsporników podnóżka



Rys. 37 Regulacja kąta wsporników podnóżka

Nacisnąć jednocześnie obydwa przyciski regulatorów. Po ustawieniu poruszyć góra – dół, by usłyszeć kliknięcie blokady. Możliwa regulacja kąta wsporników podnóżka w zakresie: 0 - 90°.

16.11 Regulacja położenia platformy podnóżek



Rys. 38 Regulacja położenia platformy podnóżka

Odkręcić 4 śruby mocujące platformę. Ustawić platformę w odpowiedniej pozycji. Po regulacji dokręcić śruby mocujące.

16.12 Regulacja położenia zagłówka rogatego



Rys. 39 Regulacja położenia zagłówka rogatego

Aby zmienić ustawienie zagłówka należy poluzować pokrętła regulacyjne ustawić zagłówek w pożądanym położeniu, po czym dokręcić pokrętła regulacyjne.

16.13 Regulacja położenia kąтового stolika



Rys. 40 Regulacja kąta położenia stolika

Regulacji kąta pochylenia blatu dokonuje się poprzez poluzowanie obu śrub, znajdujących się nad uchwytami stolika, poniżej blatu. Po uzyskaniu pożądanego kąta pochylenia należy dokręcić śruby. Śruby regulacyjne znajdują się zarówno po lewej, jak i po prawej stronie stolika.

Caretta Buggy jest urządzeniem mechanicznym o konstrukcji nośnej wykonanej ze stali i aluminium, pokrytej proszkową powłoką lakierniczą. Siedzisko wózka zbudowane jest z tapicerki materiałowej z zaszytymi wkładami piankowo-gąbkowymi. Niektóre wkłady osłonięte są zdejmowalnymi pokrowcami wykonanymi z materiałów tekstylnych. Żadna z powłok wózka nie powoduje podrażnienia skóry. Wózek Caretta Buggy, podobnie jak każde urządzenie medyczne, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.

- Powłoki lakiernicze oraz osłony z tworzyw sztucznych należy czyścić ściereczką zwilżoną wodą. Dopuszcza się stosowanie łagodnych środków do czyszczenia. Odkurzać mechanicznie lub szczotką z miękkim włosiem.
- Pranie głównej tapicerki:



- Ze względu na zaszyty w tapicerce wkład piankowo gąbkowy konieczne jest bardzo długie suszenie rozwieszanej tapicerki. Suszenie trwa około 48 godzin w temperaturze pokojowej.
- Dopuszcza się czyszczenie wkładów piankowo – gąbkowych ściereczką zwilżoną wodą z łagodnym środkiem chemicznym, po tej czynności wkład dokładnie wysuszyć w temperaturze pokojowej.



UWAGA! PRZED PONOWNYM UŻYCIEM WÓZKA SPACEROWEGO - CARETTA BUGGY TAPICERKA POWINNA BYĆ SUCHA.

- Powinno się systematycznie dbać o ramę, usuwać brud i błoto z ruchomych części.
- Nie używać do czyszczenia środków agresywnych.
- Nie należy prać tapicerki siedziska w pralce.
- Należy unikać dłuższej ekspozycji na światło słoneczne, a przed włożeniem dziecka do wózka sprawdzić temperaturę siedziska.



UWAGA! WÓZEK SPACEROWY CARETTA BUGGY POWINIEN BYĆ KONSERWOWANY CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU (CO 12 M-CY) PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO SERWISANTA. W TRAKCIE KONSERWACJI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WÓZKA - SPRAWDZENIU PODLEGA STAN POŁĄCZEŃ RUCHOMYCH, MECHANIZMÓW ZATRZASKÓW I REGULACJI. OKRESOWY PRZEGLĄD URZĄDZENIA ZAPEWNIĄ DŁUGOTRWAŁĄ I BEZPROBLEMOWĄ EKSPLOATACJĘ.

18. Gwarancja/Serwis



W przypadku zauważenia usterek lub wystąpienia uszkodzeń należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem. Uszkodzone urządzenie należy zabezpieczyć przed powiększaniem się obszaru uszkodzeń. Nie wolno przystępować do samodzielnej naprawy urządzenia. Nie wolno zastępować oryginalnych części urządzenia częściami wykonanymi we własnym zakresie lub pochodzącymi z innego źródła niż zaleca producent.

Jeżeli użytkownik zrezygnuje z dalszej eksploatacji urządzenia to jest zobowiązany do jego likwidacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Producent określa czas życia wyrobu na 5 lat.

Serwis pogwarancyjny urządzenia wykonuje producent.

Dane kontaktowe serwisu:

LIW Care Technology Sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź

tel. : 42 212-35-18 email: reklamacje@liwcare.pl

Aktualne dane adresowe są dostępne na stronie internetowej www.liwcare.pl.

Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej, która jest integralną częścią niniejszej instrukcji. Karta gwarancyjna znajduje się na ostatniej stronie.

19. Tabliczka znamionowa



CARETTA BUGGY		
	CB - 10000	
rozmiar/size:	1	
	55 kg	
	LIW Care Technology Sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Poland	


20. Oznaczenie symboli



Nazwa producenta



Data produkcji

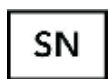

Numer seryjny



Dopuszczalny ciężar użytkownika



Uwaga ! Postępować zgodnie z instrukcją obsługi



Unikać kontaktu z wodą



Strzałka wskazująca omawiany element



Strzałki wskazujące kierunek ruchu



Znak zgodności wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych zał.V



Wyrób medyczny

21. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych



Wózek spacerowy Caretta Buggy spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych

Wózek spacerowy Caretta Buggy zgodnie z załącznikiem VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych jest nieinwazyjnym, aktywnym wyrobem medycznym klasy I według reguły 1.

Deklaracja zgodności urządzenia jest do uzyskania w Dziale Handlowym producenta.

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji:

1. Producent urządzeń rehabilitacyjnych LIW Care Technology Sp. z o.o. (ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź) gwarantuje, że nabywane przez konsumenta lub innego użytkownika urządzenie jest sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych oraz, że urządzenie pozostanie wolne od tych wad w okresie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje zapewnienia użyteczności produktu dla potrzeb kupującego.
2. LIW Care Technology Sp. z o.o. udziela dwuletniej gwarancji na jej produkty licząc od daty wydania produktu konsumentowi.
3. Dowodem udzielenia gwarancji jest wyłącznie niniejsza karta gwarancyjna wydana przez sprzedawcę kupującemu wraz z dowodem zakupu (faktura, lub paragon). Do przeniesienia uprawnień z gwarancji konieczne jest przeniesienie posiadania karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
4. W przypadku stwierdzenia w okresie ważności gwarancji – wady lub uszkodzenia sprzętu - zostanie ona bezpłatnie usunięta poprzez naprawę sprzętu lub jego wymianę. W przypadku konieczności wymiany części produktu, uszkodzona część staje się własnością LIW Care Technology Sp. z o.o. i nie podlega zwrotowi korzystającemu z gwarancji.
5. Korzystający z gwarancji zobowiązany jest zgłosić wadę fizyczną towaru ujawnioną w okresie trwania gwarancji, używając do tego Formularza Reklamacyjnego. Plik z Formularzem Reklamacyjnym zawarty jest na stronie internetowej www.liwcare.pl w sekcji „Produkty”, a jego fizyczna kopia stanowi załącznik do instrukcji, przekazanej Kupującemu wraz z Urządzeniem. Formularz taki można również uzyskać u każdego z naszych Regionalnych Specjalistów ds. Sprzedaży, do których kontakt znajdziecie Państwo na naszej stronie www.liwcare.pl/kontakt. W przypadku problemów ze znalezieniem Karty Reklamacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 42 212-35-18.
6. Korzystający z gwarancji zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania formularza reklamacyjnego do Sklepu, w którym zakupił sprzęt lub bezpośrednio do Producenta na adres mailowy reklamacje@liwcare.pl
7. Na podstawie otrzymanego drogą mailową formularza reklamacyjnego Sprzedawca podejmuje decyzję dotyczącą sposobu naprawy. Sprzedawca może:
 - a. Zlecić naprawę sprzętu na miejscu u Korzystającego z gwarancji – w takim przypadku ustalany jest ze zgłaszającym drogą mailową lub telefoniczną termin naprawy sprzętu.
 - b. Zlecić konieczność wysyłki sprzętu do Producenta, celem dokonania jego naprawy – w takim przypadku Korzystający z gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu do sklepu medycznego w którym zakupił sprzęt lub do siedziby Producenta, wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Reklamowany Towar wysłany jest do Sprzedawcy po ustaleniu z nim terminu jego odbioru przez kuriera. Koszty dostawy ponosi Producent.
8. Gwarancji nie podlegają:
 - a. zużyte elementy i części, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu na skutek niewłaściwego użytkowania (w szczególności, lecz nie wyłącznie wskutek użytkowania niezgodnego z wydaną instrukcją obsługi bądź w nieodpowiednich warunkach) lub niewłaściwego przechowywania produktu,
 - b. uszkodzenia spowodowane przeróbkami, regulacjami, dopasowaniami i zmianami konstrukcyjnymi dokonanymi przez użytkownika produktu lub osoby trzecie,
 - c. uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym czyszczeniem lub konserwacją dokonanymi przez użytkownika produktu lub osoby trzecie,
 - d. uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem bądź normalnym starzeniem się produktu,
 - e. uszkodzenia spowodowane zaniedbaniami po stronie użytkownika produktu (w szczególności, lecz nie wyłącznie, w konserwacji i czyszczeniu produktu),
 - f. uszkodzenia związane z czynnikami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, w tym zalania).
9. Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Gwarancja nie obejmuje regulacji i dopasowania odbywającego się w okresie gwarancyjnym, gdyż nie stanowią one wad produktu.
11. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest dostarczenie produktu do sklepu medycznego, w którym sprzęt został zakupiony lub do Producenta w sposób chroniący przed jego uszkodzeniem.
12. Naprawa gwarancyjna bądź wymiana gwarancyjna zostaną dokonane w terminie 30 dni liczonych od daty dostarczenia sprzętu do Producenta.
13. Po naprawie gwarancyjnej sprzęt zostanie dostarczony na koszt Producenta na adres wskazany przez korzystającego z gwarancji lub do sklepu medycznego, w którym został zakupiony. W przypadku nieodebrania naprawionego produktu przez korzystającego z gwarancji, będzie on zobowiązany ponieść wszystkie związane z tym koszty LIW Care Technology Sp. z o.o., w tym koszty przechowywania i transportu produktu.
14. Udzielenie przez LIW Care Technology Sp. z o.o. gwarancji na produkt nie wpływa na uprawnienia kupującego wynikające z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

WAŻNE!

PROSZĘ ZACHOWAĆ KARTĘ GWARANCYJNĄ W BEZPIECZNYM MIEJSCU.

LIW Care Technology Sp. z o.o. wymaga dostarczenia tego dokumentu przed akceptacją naprawy gwarancyjnej.

Nazwa sprzętu/model:

Numer fabryczny:.....

Data sprzedaży:.....

Pieczętka i podpis sprzedawcy:

Lp.	Data zgłoszenia naprawy	Opis czynności	Data zakończenia naprawy	Pieczęć i podpis dokonującego naprawy
1				
2				
3				